
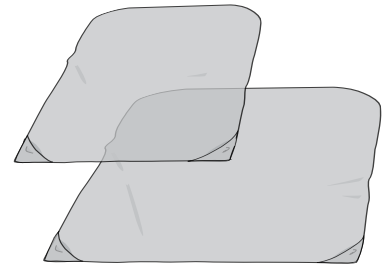
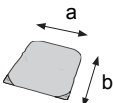


Liko GleitTuch Fix Lang

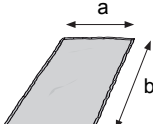

Liko GleitTuch Fix Kurz

Produktübersicht

| Produkt | Einheit | Modell | Art.-Nr. | Größe | Abmessungen (a x b) | |
|--|---------|--------|----------|-------|---------------------|---|
| Liko GleitTuch Fix Kurz, ohne Griffe | Paar | 150 | 3715015 | M | 70 cm x 70 cm |  |
| Liko GleitTuch Fix Kurz, ohne Griffe | Paar | 150 | 3715017 | XL | 120 cm x 85 cm | |
| Liko GleitTuch Fix Lang, mit Griffen, inkl. FixBand* | Paar | 160 | 3716015 | M | 90 cm x 185 cm |  |
| Liko GleitTuch Fix Lang, mit Griffen, inkl. FixBand* | Paar | 160 | 3716017 | XL | 140 cm x 215 cm | |

* FixBand 260 cm, Art.-Nr. 3696002.

Produktbeschreibung

Liko GleitTuch Fix wurde von Liko speziell dafür entwickelt, den Transfer Pflegebedürftiger durch eine Verringerung der Reibung zu erleichtern. GleitTuch Fix wird aus einem reibungsarmen Material hergestellt, das die Reibung zwischen dem Pflegebedürftigen und dem Bettzeug minimiert, wodurch sich die Arbeitslast der Helfer in einer Vielzahl unterschiedlicher Situationen verringert.

Das lange GleitTuch Fix ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um z.B. das Anlegen von Hebegurten bei Pflegebedürftigen zu erleichtern, die unter starken Schmerzen oder einer Kontraktur leiden, oder die sehr groß sind.

Das kurze GleitTuch Fix wird verwendet, um das Anlegen von Hebegurten in Stühlen/Rollstühlen zu erleichtern. Beide Modelle können auch in anderen Situationen eingesetzt

werden, bei denen Umlagerungen nötig sind, wie z.B. Umlagern oder Verlagern des Pflegebedürftigen nach weiter oben im Bett.

Denken Sie immer daran, dass die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Transferverfahren jederzeit reibungslos und leicht vonstatten gehen sollten. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Transfers umständlich und schwierig verlaufen, empfehlen wir Ihnen, auf ein anderes Hebehilfsmittel aus dem umfangreichen Sortiment von Liko-Produkten zum Heben und Umlagern Pflegebedürftiger umzusteigen.

⚠ GleitTuch Fix eignet sich nicht zum Anheben oder Transferieren Pflegebedürftiger aus einer liegenden in eine sitzende Position. Für derartige Anforderungen empfehlen wir das Anheben mittels eines unserer zahlreichen Hebegurtmodelle.

In diesem Dokument wird die zu bewegende/transferierende Person als „Pflegebedürftiger“ und die dem Pflegebedürftigen behilfliche Person als „Helfer“ bezeichnet. Die weibliche Form ist hierbei eingeschlossen.

⚠ Dieses Warndreieck wird bei Arbeitsschritten benutzt, die mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt durchzuführen sind.

📖 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Auf www.liko.com können Sie Gebrauchsanweisungen kostenlos herunterladen.

Sicherheitsvorschriften

⚠ **Beachten Sie vor dem Transfer bitte Folgendes:**

- GleitTuch Fix sollte unter keinen Umständen zum Anheben von Personen verwendet werden.
- Entscheiden Sie von Fall zu Fall, ob Sie einen oder mehrere Helfer benötigen.
- Planen Sie den Transfervorgang sorgfältig, um ihn so sicher und einfach wie möglich zu gestalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Laufrollen des Rollstuhls, des Betts, der Trage, etc., während des Transfervorgangs arretiert sind. Benutzen Sie nötigenfalls ein Bettgeländer.
- GleitTuch Fix besteht aus einem reibungsarmen Material und kann zu Unfällen führen, wenn es unter dem Pflegebedürftigen, auf dem Boden oder in einem Rollstuhl verbleibt. Gehen Sie während der Verwendung des GleitTuch Fix sorgfältig vor und entfernen Sie es umgehend nach seiner Benutzung. Legen Sie es zur Seite oder hängen Sie es auf, wenn es nicht benutzt wird.
- Behalten Sie die Ergonomie im Hinterkopf! Gehen Sie ruhig und methodisch vor, stehen Sie auf und halten Sie Ihren Rücken gerade. Erhöhen oder senken Sie das Bett, je nach Bedarf, ab. Verringern Sie die Hebelwirkung und arbeiten Sie nahe am Pflegebedürftigen.

⚠ **ACHTUNG!**

Das Umlagern eines Pflegebedürftigen ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Deshalb sollten Sie die Gebrauchsanweisung des Hilfsmittels sorgfältig lesen. Es ist wichtig, dass Sie die Inhalte der Gebrauchsanweisung genau verstehen. Das Produkt sollte ausschließlich von in dessen Funktionsweise unterwiesener Personal benutzt werden. Lassen Sie bei dessen Benutzung Sorgfalt und Vorsicht walten. Als Helfer sind Sie jederzeit für die Sicherheit des Pflegebedürftigen verantwortlich. Sie müssen sichergehen, die Fähigkeiten des Pflegebedürftigen zur Bewältigung des Umlagens/Transfers richtig einzuschätzen und sich über diese zu informieren. Falls Sie sich über irgendetwas nicht im Klaren sind, setzen Sie sich mit dem Hersteller oder der Zulieferfirma in Verbindung.

Pflege und Wartung

Überprüfen Sie GleitTuch Fix regelmäßig, insbesondere nach dessen Wäsche. Achten Sie besonders auf Verschleißerscheinungen und Beschädigungen an Nähten, Bändern, Griffen, des Gewebes sowie der Reibung des Materials. Verwenden Sie keine beschädigten Produkte.

Beziehen Sie sich hinsichtlich der Waschanleitung auf das Produktetikett des GleitTuch Fix.

Falls Sie sich über irgendetwas nicht im Klaren sind, setzen Sie sich mit dem Hersteller oder der Zulieferfirma in Verbindung.

CE Medizinisch-technisches Produkt der Klasse I

GleitTuch Fix wurde von einer akkreditierten Prüfanstalt getestet und erfüllt alle an MDD-Produkte der Klasse I gestellten Anforderungen sowie die harmonisierte Norm EN ISO 10535.


Eingetragenes Gebrauchsmuster

Die Produkte von Liko werden ständig weiterentwickelt. Daher behalten wir uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorhergehende Ankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen. Setzen Sie sich bezüglich einer Beratung sowie Informationen hinsichtlich eventueller Produktneuerungen bitte mit Ihrer Liko-Vertretung in Verbindung.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ist gemäß ISO 9001 und ISO 13485, dem speziell für Hersteller medizintechnischer Geräte geltenden Äquivalent, qualitätsgeprüft und zertifiziert. Liko ist des Weiteren auch gemäß der Umweltqualitätsnorm ISO 14001 zertifiziert.

Platzieren des langen GleitTuch Fix

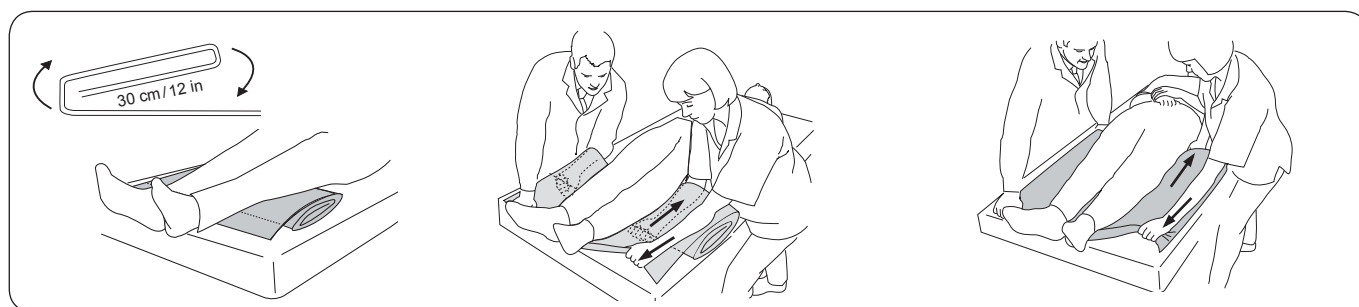

Falten Sie GleitTuch Fix, oder nötigenfalls zwei GleitTuch Fix, in einer Breite von ca. 30 cm. Fahren Sie solange fort, bis die gesamte Länge gefaltet ist.

Legen Sie das gefaltete GleitTuch Fix unter die Waden des Pflegebedürftigen, wobei die Faltung nach unten, in Richtung der Matratze zeigen muss.


Die Helfer ergreifen den unteren Teil des GleitTuch Fix, wobei deren Arme sich so nahe wie möglich am Pflegebedürftigen befinden sollten. Benutzen Sie die andere Hand zum Dagegenhalten, indem Sie die Oberseite des GleitTuch Fix ergreifen. Die Helfer ziehen **gleichzeitig** die erste Faltung unter dem Pflegebedürftigen heraus und nach oben.

TIPP! Dieser Vorgang wird erleichtert, wenn Sie Ihre Hand während des Ziehvorgangs gegen die Matratze drücken.

Arbeiten Sie mit ausgestreckten Armen und Gewichtsverlagerung.

Ergreifen Sie nun die nächste Faltung und wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis GleitTuch Fix sich vollständig ausgebreitet unter dem Pflegebedürftigen befindet.

Platzieren des Hebegurts im Bett mit Hilfe des langen GleitTuch Fix

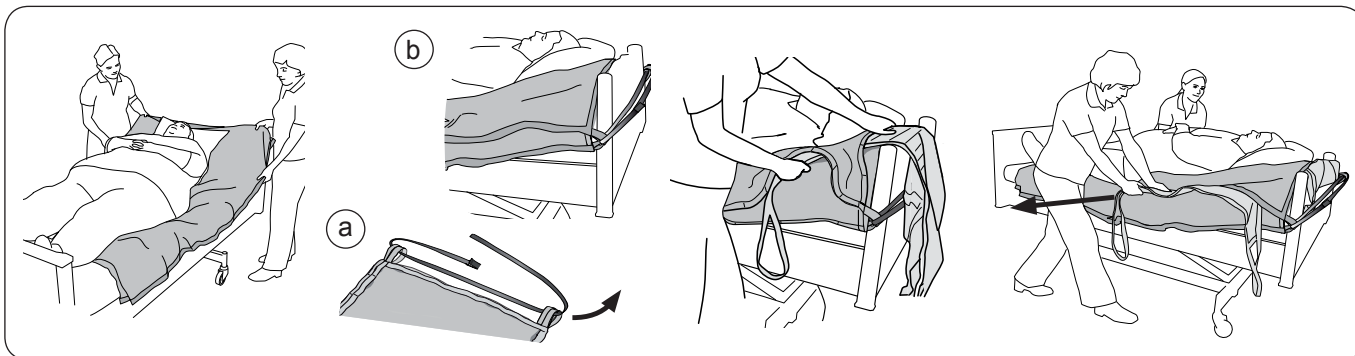


Platzieren Sie die beiden GleitTuch Fix wie in den vorangegangenen Anleitungen beschrieben.

Ziehen Sie beigefügtes FixBand durch die Ösen des GeitTuch Fix (siehe Bild a). Befestigen Sie FixBand um das Kopfende des Bettes (siehe Bild b).

Platzieren Sie den Hebegurt zwischen den beiden GleitTuch Fix. Beginnen Sie am Kopfende. Stellen Sie sicher, dass der Hebegurt sich mittig unter dem Pflegebedürftigen befindet.

Ziehen Sie den Hebegurt unter dem Pflegebedürftigen nach unten, indem Sie die Beinstütze mit einer Hand in Richtung des Fußendes ziehen und diese dabei mit der anderen Hand gegen die Matratze drücken. Behalten Sie bei Ihrer Arbeit die Ergonomie im Hinterkopf!

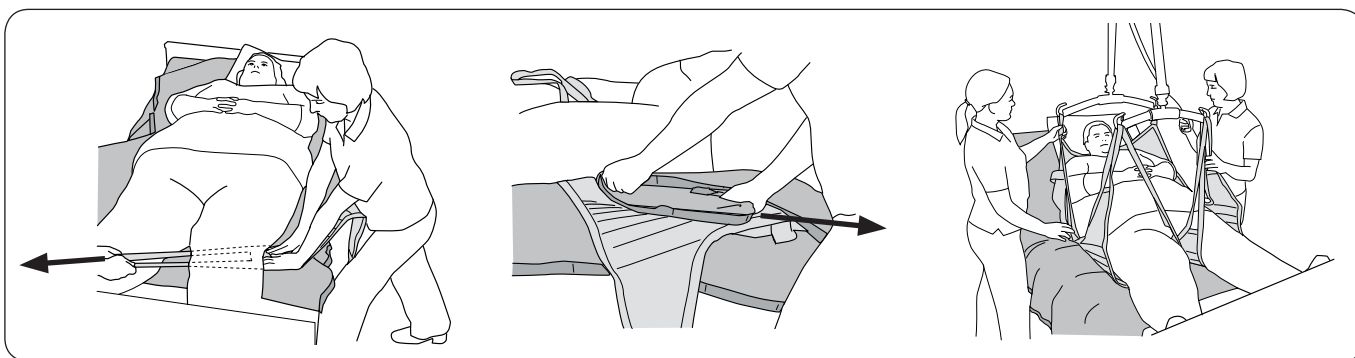


Positionieren Sie die Beinstütze, indem Sie sie nach unten gegen die Matratze drücken, während der andere Helfer an der Beinstützenhebeschlaufe zieht.

Entfernen Sie das obere GleitTuch Fix vorsichtig, indem Sie es unter diesem selbst durch Ziehen zusammenfallen.

Befestigen Sie die Hebeschlaufen des Hebegurts gemäß der Gebrauchsanweisung des Hebegurts am Hebebügel. Nun kann der Lifter in Gang gesetzt werden.

Entfernen des Hebegurts im Bett mit Hilfe des langen GleitTuch Fix

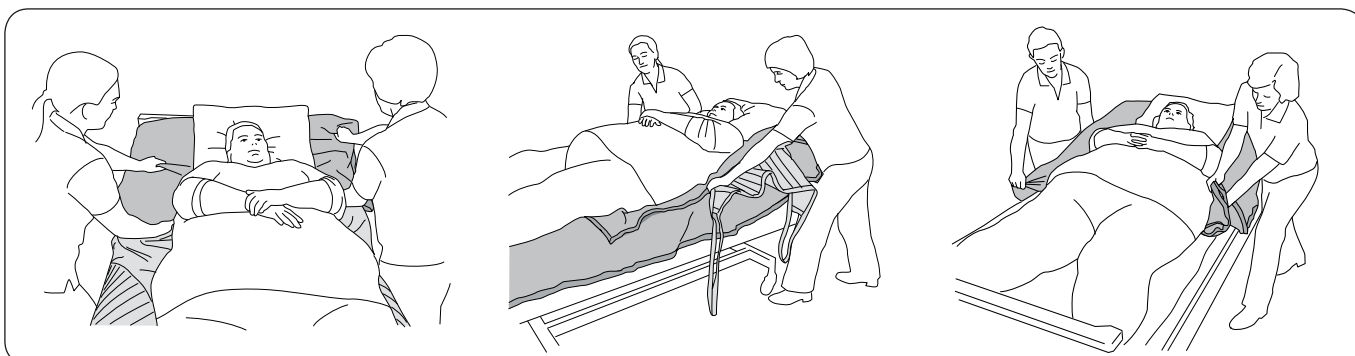


Platzieren Sie GleitTuch Fix auf dem Bett, bevor der Pflegebedürftige während des Hebevorgangs abgesenkt wird. Platzieren Sie, sobald der Pflegebedürftige liegt, das andere GleitTuch Fix, wie in den vorangegangenen Anleitungen beschrieben, beginnen Sie jedoch hier am Kopfende. Stellen Sie sicher, dass dieses GleitTuch Fix über dem Hebegurt liegt und sich bis ganz nach unten erstreckt.

Entfernen Sie den Hebegurt, indem Sie dessen Beinstütze und oberes Ende des Hebegurtes ergreifen und ihn zwischen den beiden GleitTuch Fix nach oben ziehen.

Entfernen Sie beide GleitTuch Fix vorsichtig, indem Sie sie unter diesen selbst durch Ziehen zusammenfallen und nach oben in Richtung des Kopfendes ziehen.

Positionieren des Hebegurts in einem Stuhl/Rollstuhl mit Hilfe des kurzen GleitTuch Fix

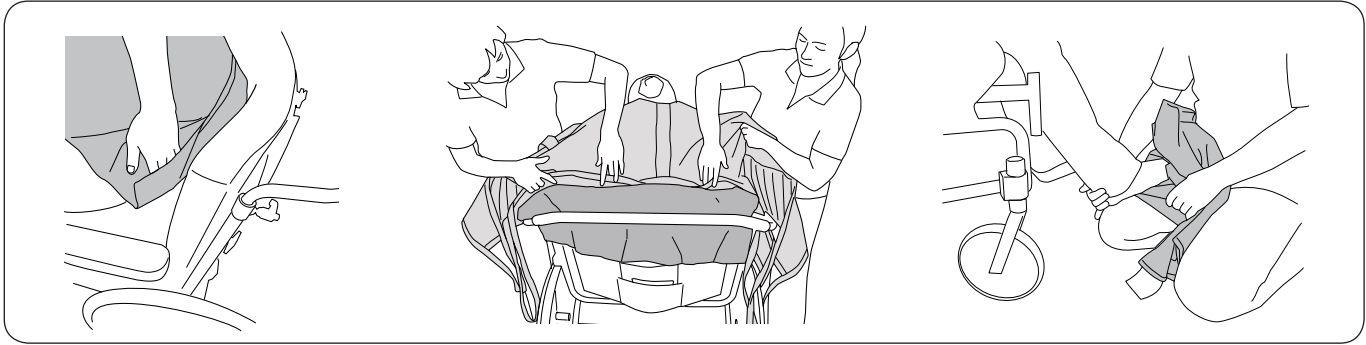

Platzieren Sie beide GleitTuch Fix zwischen dem Pflegebedürftigen und der Stuhllehne. Benutzen Sie zur Erleichterung die Taschen des GleitTuch Fix. Stellen Sie sicher, dass GleitTuch Fix bis zum Gesäß des Pflegebedürftigen hinabreicht.


Platzieren Sie den Hebegurt anschließend zwischen den beiden GleitTuch Fix und drücken Sie ihn hinter dem Rücken des Pflegebedürftigen nach unten.

Behalten Sie bei Ihrer Arbeit die Ergonomie im Hinterkopf!

Verwenden Sie GleitTuch Fix, um den Fuß des Pflegebedürftigen auf Ihrem eigenen Bein nach oben zu schieben und so die Platzierung der Beinstütze des Hebegurts zu erleichtern.

Beziehen Sie sich hinsichtlich weiterer Informationen über die Art und Weise der Platzierung des Hebegurts am Pflegebedürftigen auf die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Hebegurts.

Verlagerung nach weiter oben im Bett mittels des kurzen GleitTuch Fix

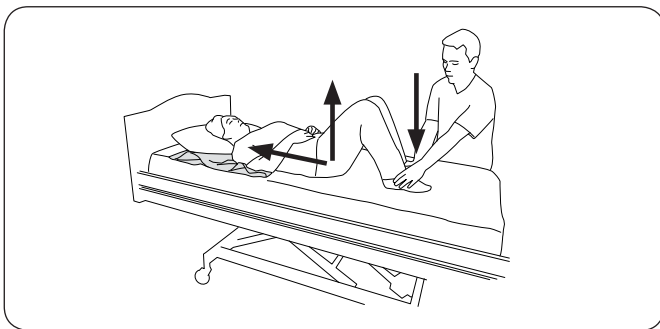


Mit einem Helfer

Platzieren Sie GleitTuch Fix unter Kopf und Schultern des Pflegebedürftigen. Der Pflegebedürftige winkelt seine Knie an und der Helfer drückt zur Erhöhung der Reibung die Füße des Pflegebedürftigen nach unten. Der Pflegebedürftige verlagert sein Gewicht auf die Füße „drückt“ sich gleichzeitig im Bett nach oben.

Diese Methode erfordert, dass der Pflegebedürftige über eine gewisse Kraft/Beweglichkeit seiner Beine sowie des Körpers verfügt.

Erhöhen Sie das Bettende, um die Umlagerung weiter zu erleichtern!

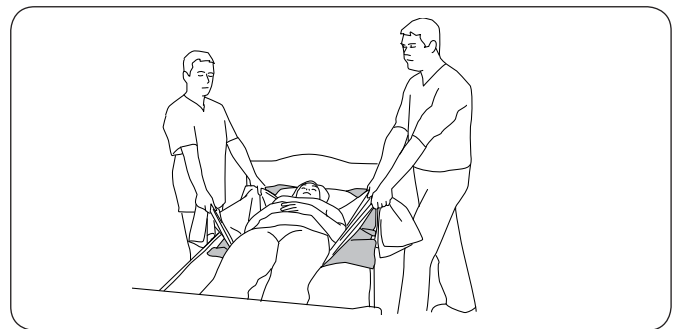

Mit zwei Helfern

Positionieren Sie GleitTuch Fix unter einem Stecklaken vom Kopf des Pflegebedürftigen bis hinab zu dessen Gesäß. Die Helfer positionieren sich in einer stehenden Position auf Höhe der Schultern des Pflegebedürftigen und alle beide ergreifen ihre jeweilige Ecke des Stecklakens. Die Helfer verlagern den Pflegebedürftigen im Bett weiter nach oben, indem Sie ihr Gewicht auf ihr hinteres Bein verlagern. Der Vorgang wird solange wiederholt, bis der Pflegebedürftige sich in der gewünschten Position befindet.

Behalten Sie die Ergonomie im Hinterkopf – vermeiden Sie, mit Ihren Armen zu ziehen!

Erhöhen Sie das Bettende, um die Umlagerung weiter zu erleichtern!



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Hersteller

Liko AB
975 92 Luleå
Schweden
info@liko.se

