


Sabina 200

Guía Rápida

Español

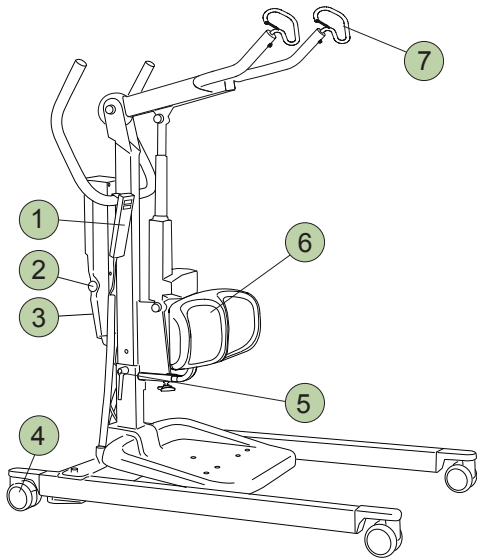

Instrucciones de seguridad

- Lea detenidamente la guía de instrucciones de la grúa y de los accesorios de elevación antes de usar estos productos.
- Planifique minuciosamente la operación de elevación.
- Antes de elevar al paciente de la base donde se encuentre, pero con las cintas debidamente tensadas, es muy importante comprobar que los lazos estén correctamente enganchados en la percha.
- **Carga máxima: 160 kg (350 lbs)**

Para mantener la carga máxima, es necesario el uso de accesorios diseñados para la misma carga o una superior.

¡IMPORTANTE!

Esta guía rápida no sustituyen a la guía de instrucciones de la grúa, la cual se puede descargar desde www.liko.com.

1 Mando




- ↑ Arriba
- ↓ Abajo
- ↕ Apertura de patas
- ↕ Cierre de patas
- A Indica capacidad de batería baja


2 Parada de emergencia

Activación:


Reposición:

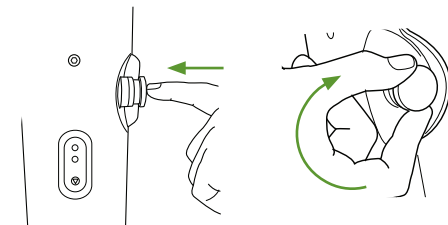

3 Bajada de emergencia eléctrica

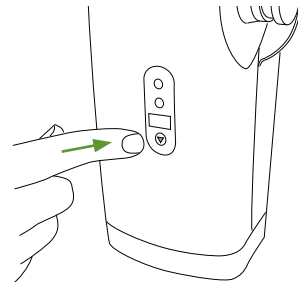

4 Bloqueo de las ruedas

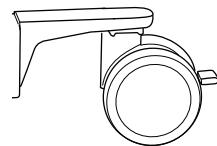

↑ Desbloquear
↓ Bloquear

Ajustes

5




Altura del paciente

- 1. < 170 cm / 67 inch.
- 2. 160-190 cm / 63-75 inch.
- 3. > 180 cm / 71 inch.




6

Reposapiernas

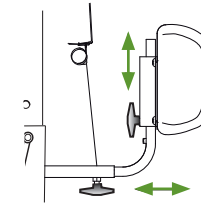


7

Protección anti-desenganche

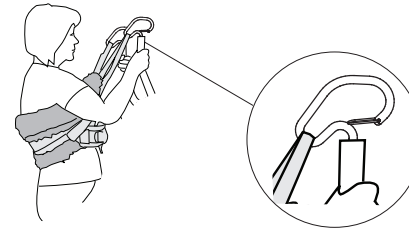

Carga de baterías

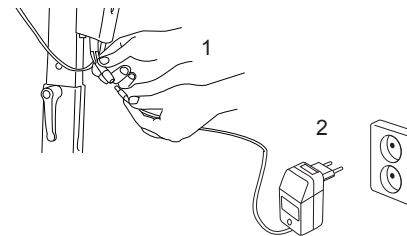

- Cargue la grúa regularmente después de haberla utilizado.
- La grúa no funciona durante el proceso de carga de la batería.
- **El botón de parada de emergencia no debe estar presionado durante la operación de carga.**

Ergonomía

- Evite las elevaciones manuales – deje que la grúa haga el trabajo.
- No se estrese – trabaje con calma y metódicamente.
- Piense en su espalda – trabaje erguido y con la espalda recta.
- Use las funciones de elevación y descenso de la cama.
- Reduzca el efecto de palanca: trabaje cerca del paciente y de la grúa.

Limpieza

Cuando sea necesario, limpie la grúa, utilizando un trapo humedecido con agua caliente o alcohol higiénico.

Posibles problemas

Compruebe que:

- la parada de emergencia no está pulsada, ver 2
- la batería está cargada
- el mando está correctamente conectado.

Otras guías rápidas

La guía rápida para las grúas y arneses de Liko pueden descargarse desde el sitio Web www.liko.com.

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricante:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se