

Étalonnage

Pour l'étalonnage, consultez la notice d'emploi du fabricant ou contactez Liko.

Caractéristiques techniques

Classe de précision:	Classe III conformément aux exigences de la directive NAWI 90/384/CEE
Affichage:	Sensibilité jusqu'à 0,2 kg
Tolérance:	10-99.9 kg +/- 0.2 kg 100-350 kg +/- 0.4 kg
Charge max.:	350 kg
Charge min.:	10 kg
Réinitialisation:	Touche de réinitialisation (↵)
Alimentation:	Pile 9 V
Pile:	Alcaline 9 V (PP3, MN1604, 6LR61, E-block) Durée de vie de la pile : environ 3000 affichages
Écran:	Numérique, à cristaux liquides (LCD)
Dimensions:	76 x 76 x 134 mm (l x L x h)
Poids:	0,575 kg
Plage de température:	+5°C à +35°C
Plage d'humidité:	0 à 95 %

© Copyright Liko AB 2009-08



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Distributeur:

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Fabricant:

SR Instruments, Inc
600 Young Street
Tonawanda, NY
14150
USA




A Hill-Rom Company

Fiche d'utilisation*

7FR160175-04

2009-08-10

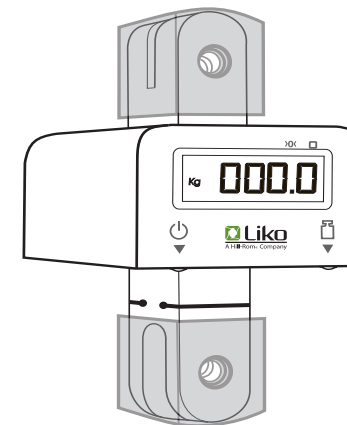

LikoScale 350

Art. n° 3156228

LikoScale 350 est un pèse-personne pratique et simple à utiliser destiné à déterminer le poids des patients placés dans les lève-personnes mobiles ou stationnaires Liko. Associé aux lève-personnes et accessoires de levage de Liko, LikoScale 350 permet une pesée sûre et aisée.

Le poids est indiqué en kilogrammes sur l'écran numérique du pèse-personne.

LikoScale 350 est certifié selon la directive européenne NAWI 90/384 (Non Automatic Weighing Instruments). Le pèse-personne ne doit être utilisé qu'avec des lève-personnes et accessoires approuvés conformément aux instructions de ce guide.

LikoScale 350 peut être utilisé avec les lève-personnes Liko suivants :

Viking (S, M, L, XL)

- Nécessite l'adaptateur 12 mm, art. n° 2016504

Uno (tous les modèles)

- Les modèles Uno au numéro de série égal ou supérieur à 31825 nécessitent l'adaptateur 12 mm, art. n° 2016504.

- Les modèles Uno au numéro de série inférieur ou égal à 31824 nécessitent l'adaptateur 8 mm, art. n° 2016502.

Étant donné que la hauteur de levage est limitée lorsque LikoScale est utilisé en association avec LikoLight ou Viking XS, nous ne recommandons pas ces configurations.

Golvo (tous les modèles)

Likorall (tous les modèles)

Multirall (tous les modèles)

Liko MasterLift (tous les modèles)

* Cette fiche d'utilisation s'ajoute à la documentation complète publiée par le fabricant du pèse-personne. Elle est destinée à nos clients et a pour but de simplifier l'utilisation de LikoScale avec les produits de Liko. Pour des informations détaillées concernant le pèse-personne, nous vous renvoyons à la notice d'emploi du fabricant (jointe).

Avant le montage, vérifiez que vous avez bien tous les éléments suivants :

- Kit d'outils, 2 vis, 2 contre-écrous
- 2 manchons
- Pile
- Fiche d'utilisation Liko
- Certificat d'homologation de l'UE
- Déclaration de conformité
- Notice d'emploi du fabricant
- Déclaration d'étalonnage

Mise en place et remplacement de la pile

LikoScale 350 est fourni avec une pile 9 V dont la durée de vie est d'environ 3000 affichages.

Mise en place de la pile :

1. Ouvrez la trappe à l'arrière du pèse-personne.
2. Insérez la pile.
3. Fermez la trappe.

Lorsque la pile doit être remplacée, un petit symbole représentant une pile apparaît sur l'écran en haut à gauche.

REMARQUE ! Les piles usagées doivent être déposées à la station de recyclage la plus proche.



Instructions de montage

Suivez les instructions de montage du lève-personnes Liko utilisé.

Likorall, MasterLift, Golvo : Montage fixe

Utilisez systématiquement l'un des manchons fournis avec le pèse-personne.


1. Retirez l'accessoire de levage du lève-personnes.
2. Placez un manchon sur le point de fixation inférieur du pèse-personne. Fixez l'accessoire de levage sous le pèse-personne à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.
3. Fixez le pèse-personne sur le lève-personnes à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.

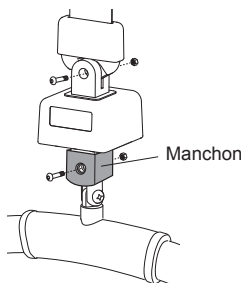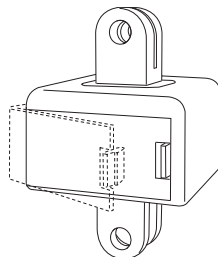

Viking, Uno : Montage fixe avec adaptateur

Utilisez systématiquement deux manchons, fournis avec le pèse-personne.

1. Retirez l'accessoire de levage du lève-personnes.
2. Fixez l'adaptateur approprié (cf. page précédente) sur le lève-personnes conformément aux instructions d'assemblage.
3. Placez un manchon sur le point de fixation inférieur du pèse-personne. Fixez l'accessoire de levage sous le pèse-personne à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.
4. Placez un manchon sur le point de fixation supérieur du pèse-personne. Montez le pèse-personne dans sa fixation supérieure sur l'adaptateur à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.

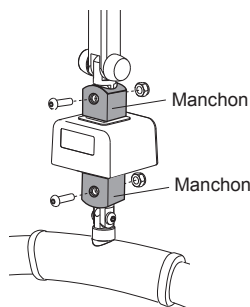


⚠ Lors du démontage du pèse-personne, déposez l'adaptateur du lève-personnes avant de mettre en place un accessoire de levage sur le lève-personnes.

Multirall, Likorall 200 / R2R : Montage par fixation rapide

Les lève-personnes Liko équipés de la fixation rapide Q-Link nécessitent le kit d'adaptateurs LikoScale, art. n° 3156232.

Utilisez systématiquement l'un des manchons fournis avec le pèse-personne.

Monter le kit d'adaptateurs LikoScale conformément aux instructions de montage.

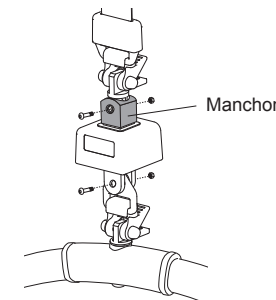

Fonctionnement

La plage normale de fonctionnement de LikoScale 350 est une température comprise entre +5°C et +35°C pour une humidité relative ne dépassant pas 95 %.

Le pèse-personne ne doit pas être stocké à des températures inférieures à -20°C ou supérieures à +50°C.

Lorsque le pèse-personne est stocké pendant plus de 6 mois, la pile doit être retirée. Suivez les instructions de mise en place et remplacement de la pile.

Avant de procéder à la pesée, assurez-vous que le pèse-personne a été installé conformément aux instructions de montage des pages 2 et 3.

⚠ Avant le levage, vérifiez que l'accessoire de levage est suspendu verticalement et peut être manœuvré librement.

Pesage avec LikoScale 350

Le pèse-personne peut être remis à zéro avec ou sans harnais. Si le pèse-personne est remis à zéro sans que le harnais soit fixé à l'étrier, le poids du patient comprendra le poids du harnais. Par conséquent, le poids du harnais doit être soustrait pour obtenir le poids réel du patient.

La réinitialisation du pèse-personne avec le harnais est décrite ci-dessous :

1. Fixez le harnais à l'étrier.
2. Allumez le pèse-personne en appuyant sur la touche
3. Réinitialisez le pèse-personne en appuyant sur la touche
- Des traits défilent sur l'écran pendant quelques secondes alors que le pèse-personne est réinitialisé. Lorsque le pèse-personne est prêt, la valeur **0.0** apparaît sur l'écran.
- Remarque ! Il n'est pas possible de tarer à zéro plus de 35 kg.**
4. Retirez le harnais de l'étrier et mettez-le en place sur le patient conformément à la notice d'emploi du harnais et du lève-personnes. Fixez le harnais à l'étrier.
5. Levez l'étrier de manière à ce que le patient soit soulevé lentement. Ne levez jamais un patient plus haut que nécessaire.
6. Lorsque le mouvement de levage s'est stabilisé, appuyez sur la touche . Le poids du patient peut être lu sur l'écran. Le pèse-personne s'éteint automatiquement après environ 60 secondes. Pour d'autres relevés, appuyez sur la touche .
7. Faites soigneusement descendre le patient puis retirez le harnais de l'étrier.