

Description du produit

La ceinture Handy est utilisée pour l'aide aux transferts. Généralement, la ceinture est mise en place sur le patient et l'assistant se sert de la ceinture pour faciliter le transfert. Ou bien, le patient et l'assistant peuvent tous deux enfiler une ceinture afin que le patient puisse aussi utiliser la ceinture comme soutien lors du transfert.


La ceinture Handy est équipée d'une boucle de sécurité dont la résistance a été testée jusqu'à 200 kg.

Lisez la notice d'emploi avant utilisation ; il est important de bien en comprendre le contenu. En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé des possibilités qu'a ce dernier de faire face à la situation de transfert. Si un point nécessite un éclaircissement, contactez le fabricant ou le fournisseur. Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.


△ Avant utilisation, gardez les points suivants à l'esprit.

- Planifiez soigneusement au préalable l'opération de transfert pour la rendre aussi sûre et aisée que possible.
- Un responsable au sein de votre établissement doit décider, au cas par cas, si un ou plusieurs assistants sont requis.
- Le patient doit comprendre et respecter les instructions de sorte à être guidé vers un mouvement naturel au cours de la verticalisation.
- Le patient doit présenter une certaine stabilité au niveau de la tête et du torse et pouvoir se tenir droit lorsqu'il est assis. Concernant l'entraînement à la marche, il est également important que le patient ait un bon équilibre en position debout et qu'il puisse déplacer ses pieds l'un après l'autre pendant la marche.
- Avant de procéder au transfert, vérifiez que la ceinture Handy est correctement mise.
- La ceinture Handy n'est pas une aide au levage et les poignées ne sont pas prévues pour soulever le patient.
- Si le patient devait tomber, il est important que l'assistant ménage ses forces et ne cherche pas à le retenir. Nous recommandons plutôt que l'assistant accompagne, d'un mouvement souple, le patient jusqu'au sol. N'oubliez pas de lâcher les poignées afin d'éviter toute blessure des mains par écrasement.
- Travaillez toujours de façon ergonomique ; consultez pour cela la norme ISO 11228 : Ergonomie – Manutention manuelle.
- Contrôlez régulièrement la ceinture Handy. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les coutures, le tissu, les sangles, les poignées et la boucle de sécurité. N'utilisez pas d'aides au levage endommagées.

Mise en place



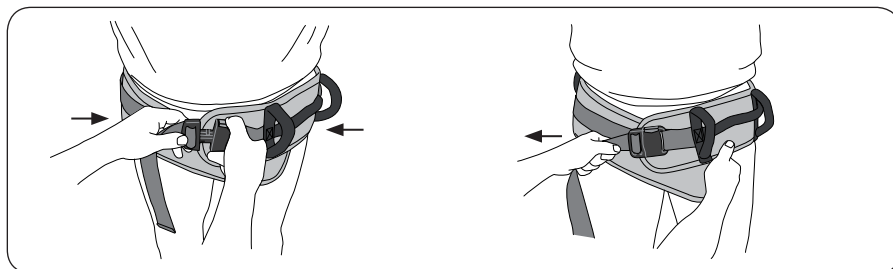


Retrait

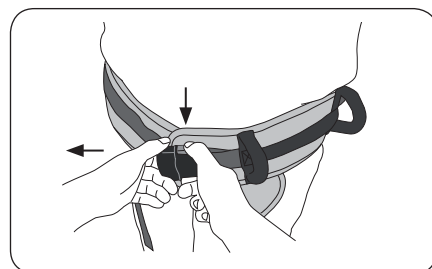


Utilisation

Passage de la position assise à la position debout, transfert d'un siège à un autre et aide au maintien debout et à la marche.

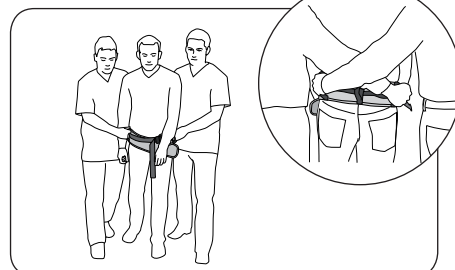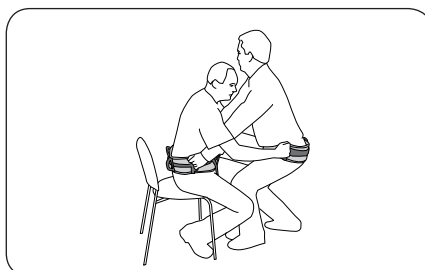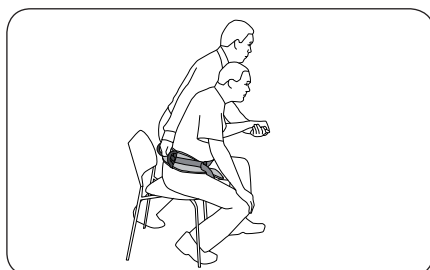

Caractéristiques de la ceinture Handy

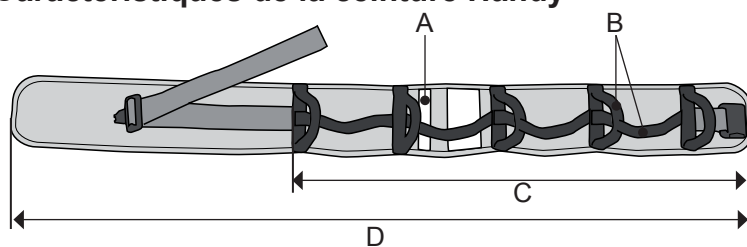

Désignation	Art. n°	Taille	Indication de taille (A)	Nombre de poignées (B)	Longueur (C/D)
Ceinture Handy	3760014	S Petite	Orange	7	60/100 cm
Ceinture Handy	3760015	M Medium	Jaune	9	75/120 cm
Ceinture Handy	3760016	L Large	Bleu	11	90/140 cm
Ceinture Handy	3760017	XL Extra Large	Noir	13	110/180 cm

Matériau : polyester

Instructions de lavage :



CE Dispositif médical de classe I

La ceinture Handy répond aux normes exigées par les directives médicotéchniques pour les produits de classe I (MDD 93/42/CEE).

Design and Quality by Liko in Sweden

Autres produits

Il est important de veiller à ce que l'opération de transfert ne soit pas trop pénible pour l'assistant. Si le patient nécessite un soutien supplémentaire, Liko recommande d'autres produits de sa gamme complète d'aides à la verticalisation et à la marche. Consultez le site Web www.liko.com pour plus d'informations.

Autres produits de la gamme Liko :

Aide à la verticalisation RollOn

Verticalisateur Sabina

Culotte de levage de Liko en combinaison avec un lève-personnes

Harnais veste Liko en combinaison avec un lève-personnes

Les produits Liko sont sans cesse développés, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans les produits sans information préalable. Contactez votre représentant Liko pour des renseignements, des conseils ou d'éventuelles mises à jour.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



A **Hill-Rom** Company

www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Distributeur en France:

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Distributeur en Suisse:

Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23
info@liko.ch

