



## Ceinture Handy



### Des transferts simples de patients actifs

La ceinture Handy facilite les transferts courts, sans équipement de levage mécanique. Elle est destinée aux patients à mobilité réduite capables de procéder eux-mêmes au transfert avec un peu d'aide. Il peut s'agir de transferts de la position assise à la position debout ou d'un siège à l'autre, d'aide à la station debout ou à la marche, etc.

La ceinture est mise en place sur le patient, ou sur le patient et l'assistant, et fournit une meilleure base pour une posture de travail correcte d'un point de vue ergonomique que des techniques purement manuelles.

La ceinture Handy est équipée d'une boucle de sécurité robuste et sûre dont la résistance a été testée jusqu'à 200 kg.



N'oubliez pas que le transfert effectué à l'aide de la ceinture Handy ne doit pas sembler pénible à l'assistant. Si tel était le cas, un équipement de levage mécanique devrait être utilisé. Si la stabilité ou la mobilité du patient n'est pas satisfaisante, envisagez de faire appel à des dispositifs mécaniques tels que RollOn ou Sabina pour la verticalisation ou un lève-personnes avec harnais veste ou culotte de levage pour l'entraînement à la marche.

Lisez la notice d'emploi correspondante pour obtenir plus d'informations sur les domaines d'application et l'usage dans la pratique. Vous pouvez également contacter le représentant Liko le plus proche pour obtenir des informations et des conseils. Vous trouverez nos coordonnées sur [www.liko.com](http://www.liko.com).


## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Désignation du produit	Réf. produit	Taille	Charge maximale	Tissu
Ceinture Handy	3760014	S	200 kg	Polyester
Ceinture Handy	3760015	M	200 kg	Polyester
Ceinture Handy	3760016	L	200 kg	Polyester
Ceinture Handy	3760017	XL	200 kg	Polyester

La ceinture Handy peut être lavée à 60-85°C.

*La ceinture Handy peut être utilisée aussi bien sur le patient que sur l'assistant afin de fournir un soutien supplémentaire durant un transfert de courte durée.*

La ceinture Handy comporte entre 7 et 13 poignées, selon sa taille. Les poignées offrent une excellente prise pour le patient ou l'assistant et sont placées à la fois horizontalement et verticalement sur toute la longueur de la ceinture. La ceinture Handy est disponible en quatre tailles, allant de S à XL. Chacune dispose d'un marquage couleur pratique visant à identifier immédiatement la taille.

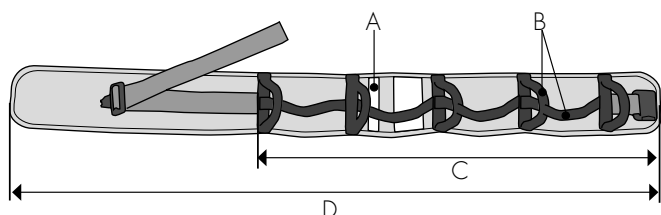

Marquage de la taille (A)	Nombre de poignées (B)	Longueur (C/D)
Petite (S) Orange	7	60/100 cm
Moyenne (M) Jaune	9	75/120 cm
Large (L) Bleu	11	90/140 cm
Extra large (XL) Noir	13	110/180 cm



*Le marquage couleur pratique indique la taille et les poignées robustes fournissent une excellente prise.*



La ceinture Handy est un produit medicotechnique de classe I.

La ceinture Handy répond aux normes exigées par les directives medicotechniques pour les produits de classe I (MDD 93/42/CEE).

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



[www.liko.com](http://www.liko.com)

#### Fabricant :

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå  
Suède  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

#### Distributeur en France :

SAS Liko France  
ZA du Haut Serroir BP7,  
FR-54690 Lay Saint Christophe  
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32  
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38  
[info@liko-france.fr](mailto:info@liko-france.fr)

#### Distributeur en Suisse :

Liko Care AG  
Bannstraße 1,  
CH-4124 Schönenbuch  
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22  
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23  
[info@liko.ch](mailto:info@liko.ch)

 **Liko**  
A Hill-Rom Company