

# LikoStretch 1900



## Levage sûr et rapide en position horizontale

Le transfert des patients en position horizontale, par exemple en vue d'une chirurgie, d'une radiologie ou de soins intensifs, représente souvent un défi. Il doit être rapide, simple et ergonomique pour les assistants ainsi que confortable et sûr pour le patient.

LikoStretch 1900 répond à toutes ces exigences. Le stretcher est accroché à un lève-personnes et le patient peut ainsi être transféré en position horizontale, entre un lit et un chariot par exemple. Les assistants n'ont plus à effectuer de levage manuel difficile. De même, les soins dispensés au patient, qu'il s'agisse de la toilette ou du changement des draps, s'en trouvent facilités. En outre, la conception ouverte permet de brancher d'autres équipements (tubes d'assistance respiratoire par exemple) tout au long du transfert.

LikoStretch 1900 ne pèse que 19 kg et est pliable pour faciliter son rangement.

## Convient à plusieurs lève-personnes

LikoStretch 1900 peut être utilisé avec les lève-personnes plafonniers Likoall et Multirall et les lève-personnes mobiles Viking L, Viking XL et Golvo.

## Accessoires

### Fixation rapide

Si le lève-personnes et LikoStretch 1900 sont équipés d'une fixation rapide, le stretcheur peut être aisément assemblé, sans outils, quand le besoin s'en fait sentir. LikoStretch 1900 peut aussi être combiné à LikoScale pour peser les patients au moment du levage.

### Stabilisateur

Avec le Stabilisateur intégré, vous pouvez très simplement ajuster le levage de sorte que le patient soit à l'horizontale ou légèrement plus haut au niveau de la tête.

### Toiles de levage

Vous avez le choix entre une toile complète et une toile en deux parties. La toile de levage en deux parties peut être particulièrement adaptée pour les interventions gynécologiques par exemple puisque la partie inférieure peut être retirée si nécessaire.



La toile est fixée au stretcheur en insérant les sangles dans le dispositif autobloquant qui se ferme par une légère pression. Elle peut être placée sur le lit avant que le patient ne s'allonge ou sous un patient déjà allongé.



Le fait que LikoStretch 1900 ne pèse que 19 kg le rend facile à manipuler par une seule personne. Il peut par ailleurs être plié pour faciliter son rangement.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Charge max. :	250 kg
Longueur :	190 cm (plié 69,5 cm)
Largeur :	90,9 cm (plié 90,9 cm)
Hauteur :	59,3 cm (plié 69,7 cm)
Poids :	19 kg

### Présentation du produit

3156051	LikoStretch 1900 y compris Stabilisateur
3685705	Toile de levage 1900, complète
3685704	Toile de levage 1900, en 2 parties



LikoStretch 1900 répond aux normes exigées par les directives médicotéchniques pour les produits de classe I (MDD 93/42/CEE).

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



[www.liko.com](http://www.liko.com)

#### Fabricant :

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå  
Suède  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

#### Distributeur en France :

SAS Liko France  
ZA du Haut Serroir BP7,  
FR-54690 Lay Saint Christophe  
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32  
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38  
[info@liko-france.fr](mailto:info@liko-france.fr)

#### Distributeur en Suisse :

Liko Care AG  
Bannstraße 1,  
CH-4124 Schönenbuch  
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22  
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23  
[info@liko.ch](mailto:info@liko.ch)

 **Liko**  
A **Hill-Rom** Company