




# Toile Solo Octo

Français  
7FR160182-02  
2009-08-24

## Description

La Toile Solo Octo est une toile de levage jetable, destinée à être utilisée avec l'accessoire pour lever à l'horizontale MasterOcto de Liko.

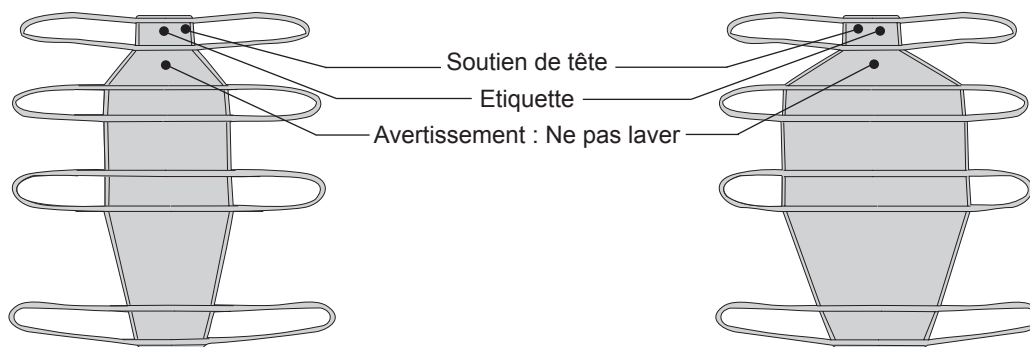

3683905 – Toile Solo Octo, medium  
Taille de la toile : 500x1600 mm (IxL)

3683906 – Toile Solo Octo, large  
Taille de la toile : 900x1700 mm (IxL)

Lire les notices d'emploi de MasterOcto et du lève-personnes utilisé, pour plus d'information sur l'utilisation et les risques.

### IMPORTANT!

La toile Solo Octo est un article jetable conçu pour être utilisé par une seule personne.

Faites des essayages pour déterminer la bonne taille et inscrivez le nom de l'utilisateur sur l'étiquette qui se trouve au dos de la toile.

La Toile Solo Octo ne doit plus être utilisée:

- lorsqu'elle a été salie ou infectée
- si elle est abîmée
- quand son utilisateur n'en a plus besoin

Jeter alors la toile de levage, conformément aux règles en vigueur dans le centre de soins ou le centre hospitalier.



**NE PAS LAVÉ.** Une étiquette portant ce symbole se trouve au dos de la toile. Si la toile est lavée, le symbole NE PAS LAVÉ disparaît et le symbole NE PAS UTILISER apparaît. La toile doit alors être jetée.



**Charge maximale: 200 kg**



Produit médico-technique de classe I



A Company

[www.liko.com](http://www.liko.com)

© Copyright Liko AB

#### Fabricant:

Liko AB  
Nedre vägen 100,  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

