

Description du produit

La Sangle Confort Liko est une sangle de verticalisation qui est unique en matière de sécurité, de forme et de fonction. La Sangle Confort est conçue pour soulever derrière le dos et par-dessus les bras. L'intérieur est revêtu d'un matériau qui empêche le glissement sur le corps.

La Sangle Confort Liko existe en plusieurs tailles.

La ceinture cousue empêche le glissement et contribue à la sécurité en évitant le risque que patient glisse de la sangle de verticalisation. Le principe consiste en l'association de deux oeillets de levage sur chaque crochet.

La Sangle Confort Liko est destinée à être utilisée avec le verticalisateur Sabina et l'Etrier Confort (600 mm).


△ Il doit être prêté la plus grande attention aux textes qui suivent ce signe.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient, et celle qui aide l'assistant.

 **Lire les notices d'emploi du harnais et du lève-personnes utilisés. Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.**

Description de la Sangle Confort Liko

1. Sangle extérieure
2. Numéro de fabrication
3. Marquage de taille (couleur)
4. Etiquette du produit
5. Étiquette : inspection périodique
6. Étiquette : marquage individuel (Belongs to)
7. Boucle de sangle supérieure
8. Boucle de sangle inférieure
9. Sangle-oeillets
10. Bord inférieur
11. Ceinture
12. Guide de sangle intérieur
13. Oeillet métallique
14. Guide de sangle extérieur

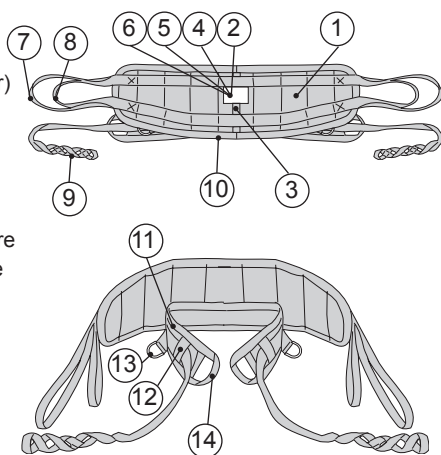


⚠ Consignes de sécurité!

- Un ou plusieurs assistants peuvent être nécessaires, selon les cas.
- Planifier l'opération, avant le transfert, de façon à ce que celui-ci se fasse de la manière la plus sûre et simple possible.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, il est important de contrôler que les sangles sont bien accrochées à l'étrier, quand les sangles sont tendues mais avant que le patient ne soit soulevé!
- Ne jamais soulever un patient plus haut que ce qui est approprié compte tenu des possibilités du patient.
- Ne jamais laisser un patient sans surveillance lors d'une situation de transfert.
- Contrôler que les roues du lit, de la couchette, etc sont verrouillées pendant l'opération.


Description du fonctionnement des boucles de sangles

A: Boucles de la sangle extérieure

La sangle extérieure est équipée de deux boucles de sangle: la boucle supérieure et la boucle inférieure, pour une plus grande flexibilité lors de l'utilisation. Il est généralement recommandé d'accrocher la boucle de sangle inférieure pour obtenir la position la plus relevée possible. La boucle de sangle supérieure s'utilise quand la taille du patient exige plus d'espace ou si patient est petit par rapport à la hauteur des crochets de Sabina. Pour le cas où la boucle de sangle inférieure est choisie, nous recommandons d'accrocher également la boucle de sangle supérieure, pour un meilleur contrôle visuel des boucles.

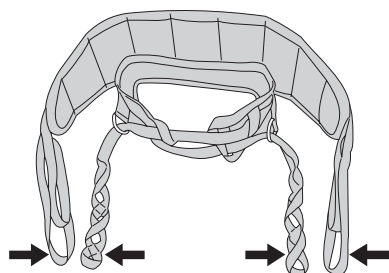


A:1 L'accrochage de la boucle de sangle supérieure de la sangle extérieure donne une plus grande distance entre le lève-personnes et le patient et implique que celui-ci est levé moins haut.

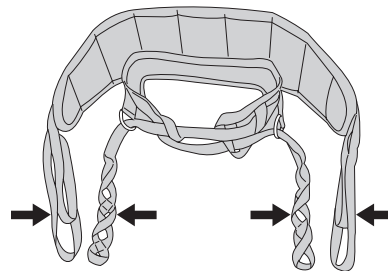


A:2 L'accrochage de la boucle de sangle inférieure de la sangle extérieure implique que le patient se rapproche de l'appareil et est soulevé plus haut.

B: Sangles-oeillets

Les sangles-oeillets permettent de resserrer plus ou moins à la taille, selon l'oeillet accroché aux crochets de Sabina. Si dans certains cas, la longueur des sangles-oeillets ne suffit pas, ils peuvent être rallongés avec les boucles d'extension Liko.

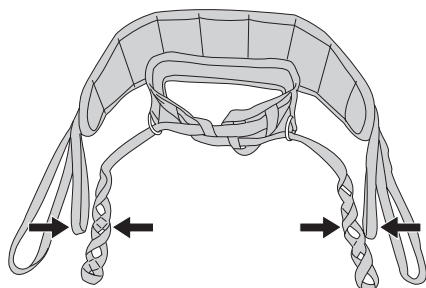

B:1 Un oeillet inférieur donne plus de resserrement

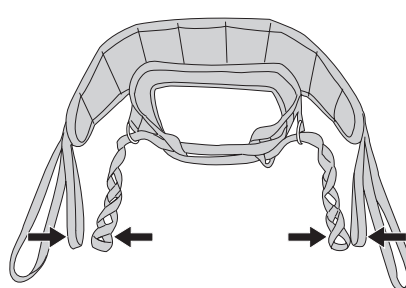


B:2 Un oeillet supérieur diminue le resserrement


Pendant une verticalisation, quand à la fois les boucles de sangles et les sangles-oeillets sont accrochés aux crochets de Sabina, la sangle se resserre autour du corps seulement tant que les boucles de sangles de la sangle extérieure sont relâchées. Quand les boucles de sangles sont tendues, elles déchargent les sangles-oeillets et le resserrement cesse.

Clips d'oeillets


Un accessoire pratique pour marquer les oeillets essayés pour une personne particulière. Cela facilite, pour les assistants, le choix du bon oeillet à accrocher sur l'étrier.

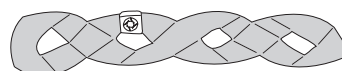


Différentes façons d'enfiler la sangle

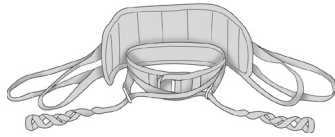

Alt. A: Pour des patients très minces
Retirez les sangles-oeillets des guides de sangles intérieurs avant de les enfiler dans les oeillets métalliques. Ceci permet un resserrage maximum.

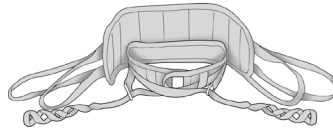

Alt. B: Position médiane
Retirez une seule sangle-oeillets de son guide intérieur. Croisez ensuite les sangles-oeillets et les enfiler à travers les oeillets métalliques.

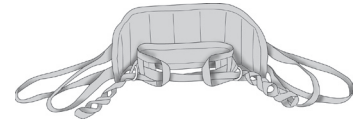

Alt. C: Pour les grandes tailles
Faites passer les sangles-oeillets dans les guides de sangles intérieurs et extérieurs avant de les enfiler dans les oeillets métalliques.


Verticaliser avec Sabina et la Sangle Confort - Participation active

1.




1. Faites glisser la Sangle Confort derrière le milieu du dos jusqu'à hauteur de la ceinture du patient. Le bord inférieur de la ceinture de la sangle doit être en bas et se place le plus près du corps, les bras entre la sangle et la ceinture.

2.

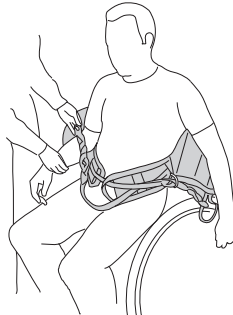


2. Croisez les sangles-oeillets et les enfiler à travers les oeillets métalliques du côté opposé. Voir la description ci-dessus des différentes possibilités.

3.

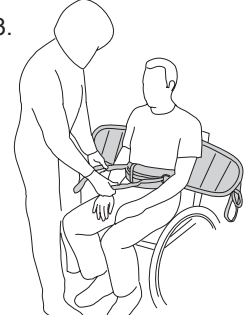

3. Tirez les sangles-oeillets vers l'avant et contrôlez le resserrment. Si la ceinture ne se resserre pas suffisamment – ajustez l'enfilage des sangles-oeillets.

4.

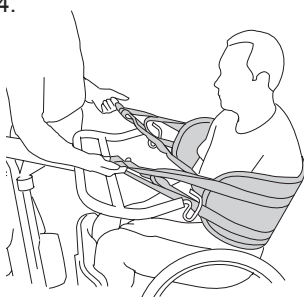


4. Choisissez les boucles de sangles appropriées en tirant (vers l'avant et l'extérieur) les boucles de la sangle extérieure en même temps que les sangles-oeillets.

Voir la description page 2, B: Sangles-oeillets.

Essayez d'obtenir la tension adéquate autour de la taille en choisissant une combinaison où les boucles de sangles et les sangles-oeillets ont la même tension pendant le resserrment/la verticalisation.

Avancez Sabina, ajustez la largeur du piètement de façon à ce que les pieds soient placés au milieu du repose-pied. Les jambes doivent être parallèles à l'appui-jambes du verticalisateur. Ajustez la hauteur et la profondeur de l'appui-jambes pour une poussée confortable sous la rotule. Fixez et serrez la sangle de mollets autour des jambes.

5.

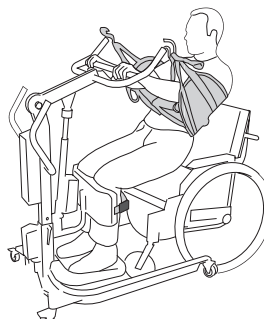


On peut maintenant accrocher les oeillets préalablement réglés aux crochets de l'étrier.

5. Verticalisation. Manoeuvrez à l'aide des boutons up/down de la commande à manuelle. Il existe deux vitesses. L'utilisateur peut participer activement en s'agrippant à la barre latérale de l'étrier et en se soulevant.

Conseil! Pendant la verticalisation, nous recommandons que le patient penche le haut du corps légèrement vers l'arrière pour compenser une faible musculature dans la partie inférieure du corps. Ceci facilite la verticalisation, augmente le confort et empêche le glissement (vers le haut) de la sangle.

6.

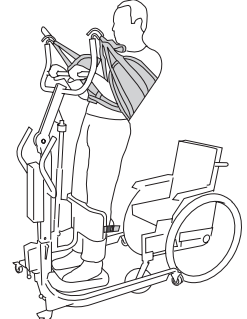

6. La hauteur de la verticalisation doit être déterminée au cas par cas. Le réglage de la hauteur maximale du levage se fait par:

- Le réglage de la hauteur du pied central de Sabina dans le piètement. Voir la notice d'emploi de votre verticalisateur Sabina.
- Le choix entre la boucle de sangle supérieure ou la boucle de sangle inférieure sur la sangle extérieure. Voir p. 2, A : Boucles de la sangle extérieure.

Caractéristiques de la sangle Confort Liko, mod. 95


Article	Art n°	Taille	Poids de la personne*
Sangle Confort Liko	3595414	Small	< 60 kg
Sangle Confort Liko	3595415	Medium	50 - 80 kg
Sangle Confort Liko	3595416	Large	70 - 110 kg
Sangle Confort Liko	3595417	Extra Large	> 100 kg

* Attention! Le poids mentionné est une simple indication. Il peut y avoir des écarts.

Les harnais Liko sont homologués pour une charge maximale de 200 kg ou plus, voir le marquage du produit.

Dimensions (cm)	A	B	C	D	E
Small	90	80	155	220	55
Medium	90	80	155	220	70
Large	110	105	180	240	85
Extra Large	110	120	180	240	100

Le poids mentionné est approximatif - Il peut y avoir des écarts.

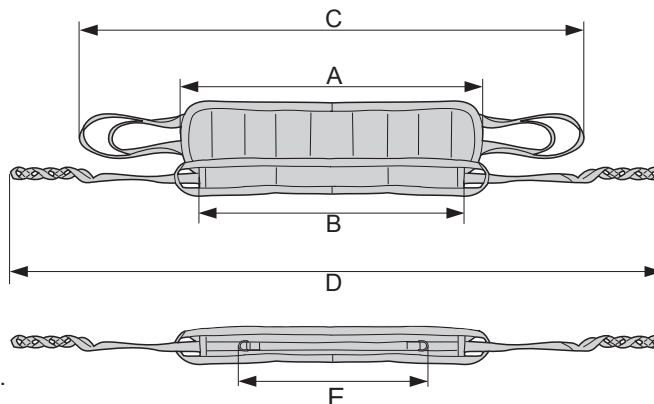

Instructions de lavage : reportez-vous à l'étiquette du harnais.

Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est de 1 à 5 ans. Elle varie en fonction du matériau, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si le produit est utilisé ou lavé plus fréquemment qu'à la normale. Consultez le protocole de Liko concernant l'inspection périodique de chaque produit.

Combinaisons

La sangle Confort Liko est exclusivement destinée à être utilisée avec les verticalisateurs Sabina de Liko. Nous recommandons Sabina avec l'Etrier Confort (600 mm).

L'association d'accessoires/produits autres que ceux recommandés par Liko peut entraîner des risques pour la sécurité du patient.

Lorsqu'un fabricant recommande les accessoires/produits de Liko conjointement avec ses propres accessoires/produits ou ceux de tiers et que la combinaison n'est pas approuvée par Liko, ce fabricant assume la responsabilité de cette combinaison. Dans cette situation, Liko renvoie aux notices d'emploi et recommandations du fabricant responsable concernant l'usage, la maintenance, le nettoyage, la vérification et l'inspection de la combinaison afin de se conformer aux exigences de la norme EN ISO 10535.

CE Produit médico-technique de classe I

Les produits Liko sont sans cesse développés, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans les produits sans information préalable. Contactez votre représentant Liko pour des renseignements, des conseils ou d'éventuelles mises à jour.

△ Important!

Lever et transférer une personne comporte toujours un certain risque. C'est pourquoi les notices d'emploi du lève-personne et de ses accessoires doivent être étudiées attentivement. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'emploi. Seul le personnel informé doit utiliser cet équipement.

Assurez-vous que l'accessoire est adapté à l'appareil utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation.

En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé des possibilités qu'a ce dernier de faire face à la situation de transfert.

Contrôlez le harnais régulièrement, spécialement après lavage, et plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages des coutures, des tissus, des sangles et des boucles. Ne pas utiliser d'accessoires endommagés. Si vous avez des questions, contactez le fabricant/le fournisseur.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant :

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Suède
info@liko.se

