

Description du produit

La notice d'emploi est valable pour la Culotte de levage Liko et la Culotte Oursons mais tout au long du texte, nous utiliserons l'appellation Culotte de levage Liko.

La Culotte de levage facilite l'entraînement à se tenir debout et à la marche sûr et sans danger pour les personnes qui souffrent d'un mauvais équilibre et d'un mauvais fonctionnement des jambes. La sécurité donne souvent le courage d'oser davantage. La Culotte de levage donne une liberté de mouvement, avec plus ou moins de décharge du poids du corps. Elle lève en toute sécurité et permet au patient de marcher et de se mouvoir sans risquer de tomber. Pendant l'entraînement, le lève-personnes est prêt à supporter toute la charge. Le patient et l'assistant peuvent alors se concentrer sur l'entraînement, sans peur des conséquences d'un faux pas.

La Culotte de levage porte la charge principale à l'entrejambe, ce qui peut convenir aux patients sensibles aux pressions sur la partie supérieure du corps. Un rembourrage à l'entrejambe diminue la pression.

La Culotte de levage Liko en taille enfant XS est fabriqué dans un tissu polyester imprimé oursons, d'où le nom Culotte Oursons. Les autres tailles sont en tissage polyester.

Plusieurs tailles

La Culotte de levage existe en plusieurs tailles s'adaptant aux patients de tailles et de corpulences différentes.

Choix du lève-personnes adapté

La Culotte de levage peut être utilisée avec les lève-personnes plafonniers et mobiles Liko.

Avec un lève-personnes plafonnier, le patient peut se mouvoir sans restrictions à l'intérieur de la zone de levage du lève-personnes. Choisissez parmi: Likorall, Multirall ou Liko MasterLift. La Culotte de levage peut également être utilisée avec l'un des lève-personnes mobiles Liko, en premier lieu Golvo, Uno ou Viking. Il est plus confortable, pour un certain nombre de patients, de pouvoir reposer les bras pendant l'entraînement avec la Culotte de levage, par exemple sur les accoudoirs du lève-personnes (Golvo, Viking) ou sur un support de marche.

Alternative

Comme alternative à la Culotte de levage, nous recommandons le Harnais Veste Liko, mod. 60 ou 64.


△ Il doit être prêté la plus grande attention aux textes qui suivent ce signe.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient, et celle qui aide l'assistant.



Lire les notices d'emploi du harnais et du lève-personnes utilisés. Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.

Culotte de levage Liko

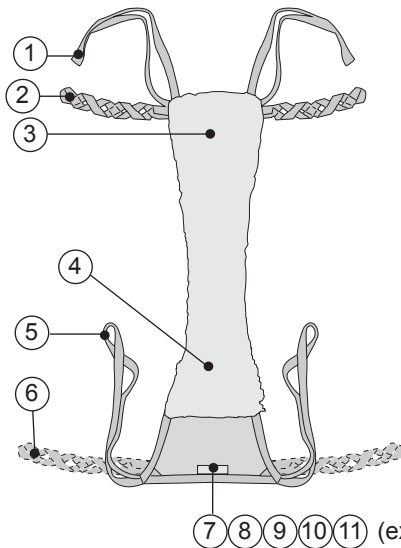

1. Sangle avant
2. Sangle-oeillets (taille XS, S, M, L)
3. Partie avant
4. Partie arrière
5. Sangle arrière
6. Sangle-oeillet (taille XL seulement)
7. Indication de taille
8. Numéro de série
9. Étiquette du produit
10. Étiquette : inspection périodique
11. Étiquette : marquage individuel (Belongs to)

(7 8 9 10 11) (extérieur)

Protégé par un brevet.


Attention! En taille XL, la sangle-oeillet se trouve à l'arrière et non à l'avant.

⚠ N'oubliez pas!


- Un ou plusieurs assistants peuvent être nécessaires, selon les cas.
- Planifier l'opération, avant de lever, de façon à ce que cela se fasse de la manière la plus sûre et simple possible.
- Avant le levage, vérifiez que l'accessoire de levage est suspendu verticalement et peut être manœuvré librement.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, il est important de contrôler que les sangles sont bien accrochées à l'étrier, quand les sangles sont tendues mais avant que le patient ne soit soulevé!
- Ne jamais soulever un patient plus haut que ce qui est approprié compte tenu des possibilités du patient.
- Ne jamais laisser un patient sans surveillance lors d'une situation de transfert.
- Contrôler que les roues du lit, de la couchette, etc sont verrouillées pendant l'opération.
- Travaillez toujours de façon ergonomique.




Le point de départ d'utilisation de la Culotte de levage est la position assise. Le patient se penche sur le côté pour que la Culotte de levage soit mise en place sous le bassin. Placez la Culotte de levage aussi loin que possible sous le patient, l'étiquette à l'arrière vers le bas.

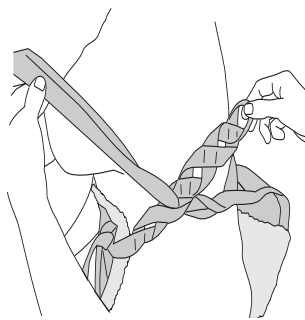


Remontez la partie avant de la Culotte de levage entre les jambes de façon à ce que les sangles soient accessibles par l'avant. Enfilez les sangles arrière à travers les sangles-oeillets dans l'oeillet adéquat.

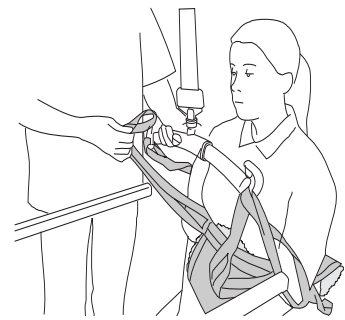

Accrochez les sangles arrière et avant à l'étrier. La boucle de sangle la plus à l'extérieur est la plus courante.

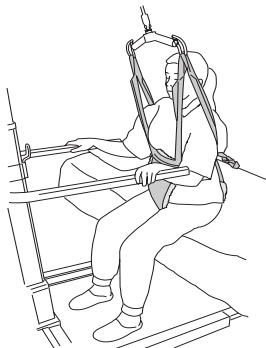

Avant la verticalisation: Faites en sorte que les pieds du patient reposent de manière stable sur le sol pour que la répartition de charge soit facilitée lors de la verticalisation. Remontez un peu le lève-personnes de façon à ce que les sangles se tendent sans que le postérieur ne se soulève et assurez-vous que la tension des sangles autour du tronc du patient est bonne.

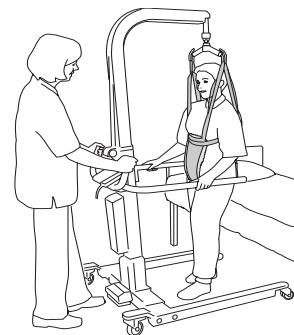

Pendant la verticalisation: Tirez le lève-personnes vers l'avant dans le sens du mouvement de façon à ce que le transfert de poids puisse se faire correctement jusqu'à ce que le patient soit debout et en bon équilibre. Levez juste ce qu'il faut pour que le patient soit suffisamment relevé mais qu'il ait toujours suffisamment de contact avec le sol.

Réglage des sangles-oeillets

Les sangles qui soutiennent autour du tronc ne doivent être ni trop relâchées ni trop resserrées autour du tronc. Un resserrement confortable est le mieux.




Pour une personne plus mince, les sangles peuvent être enfilées à travers un oeillet inférieur.

Pour une personne plus corpulente, les sangles peuvent être enfilées à travers un oeillet supérieur.

Clips d'oeillets

Un accessoire pratique pour marquer les oeillets essayés pour une personne particulière. Cela facilite, pour les assistants, le choix du bon oeillet à accrocher sur l'étrier.

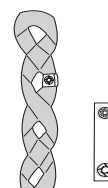

Accessoires pour la Culotte de levage Liko

Ressorts pour l'entraînement au saut/à la marche

Des ressorts élastiques existent en option pour obtenir un mouvement plus souple et élastique pour l'entraînement à la marche.

Ils stimulent le mouvement naturel et facilitent, pour le patient, l'adoption de la bonne technique de marche.


Les ressorts Liko pour un poids du patient jusqu'à 70 kg existent en deux longueurs:

- Long 28 cm art. n° 3156511
- Court 22 cm art. n° 3156512

Les ressorts courts sont recommandés pour les cas où la hauteur de levage ne permet pas les ressorts longs.

Pour un poids de la personne jusqu'à 100 kg:


- Court 22 cm art. n° 3156513

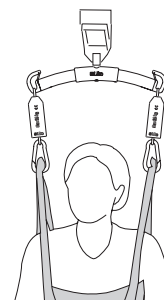

Manchons rembourrés

Il existe, en option, des manchons rembourrés, déchargeant la pression, pouvant être appliqués sur les sangles de délestage avant.

Les manchons rembourrés sont équipés d'une bande velcro sur l'un des côtés, pour une mise en place facile.

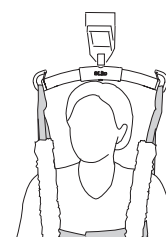

Caractéristiques de la Culotte de levage Liko, mod. 92

Article	Art n°	Taille	Poids de la personne ¹	Taille de la personne ¹	Charge max. ²	Matériau
Culotte Oursons	3592823	XS	< 30 kg	< 130 cm	200 kg	Polyester imprimé oursons
Culotte de levage	3592324	S	20 - 50 kg	120 - 160 cm	200 kg	Fibre polyester tissée
Culotte de levage	3592325	M	50 - 85 kg	160 - 180 cm	200 kg	Fibre polyester tissée
Culotte de levage	3592326	L	70 - 120 kg	170 - 200 cm	200 kg	Fibre polyester tissée
Culotte de levage	3592327	XL	100 - kg	70 - 210 cm	500 kg	Fibre polyester tissée

¹ Le poids/la taille mentionnés sont une simple indication. Il peut y avoir des écarts.

² Pour la charge maximale retenue, un lève-personnes/des accessoires prévus pour la même charge ou une charge supérieure sont requis.

Choisissez la bonne taille

La Culotte de levage doit remonter sur la taille mais pas aussi haut qu'elle implique une pression sous les bras. Une personne corpulente peut avoir besoin d'une taille plus grande qu'une personne mince de même grandeur.

Précautions d'utilisation et entretien

Conseils de lavage: Voir l'étiquette du harnais.

Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est de 1 à 5 ans. Elle varie en fonction du matériau, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si le produit est utilisé ou lavé plus fréquemment qu'à la normale. Consultez le protocole de Liko concernant l'inspection périodique de chaque produit.

Combinaisons

Combinaisons recommandées entre la Culotte de levage Liko et les étriers Liko:

	Etrier Mini 220	Petit 350	Universel 350	Standard 450	Universel 450	Universel 600	Large 670	Univ. 670 Twin	Etrier Quatre fixations	Etrier Croisé 450	Etrier Croisé 670	Etriers Latéraux Mini 220	Etriers Latéraux Petit 350	Univ. Etriers Latéraux Universel 350	Etriers Latéraux Standard 450	Univ. Etriers Latéraux Universel 450
Culotte Oursons, XS	2	1	1	1	1	3	4	4	4	2	4	4	4	2	4	2
Culotte de levage, S	2	1	1	1	1	3	4	4	4	1	4	4	4	2	4	2
Culotte de levage, M	2	1	1	1	1	3	1	1	4	1	2	4	4	2	4	2
Culotte de levage, L	3	2	2	1	1	2	1	1	4	1	1	4	4	4	4	2
Culotte de levage, XL	3	2	3	1	1	2	1	1	4	1	1	4	4	4	4	2

Explications: 1 = Recommandé 2 = Possible 3 = Déconseillé 4 = Inadéquat

Autres combinaisons

L'association d'accessoires/produits autres que ceux recommandés par Liko peut entraîner des risques pour la sécurité du patient.

Lorsqu'un fabricant recommande les accessoires/produits de Liko conjointement avec ses propres accessoires/produits ou ceux de tiers et que la combinaison n'est pas approuvée par Liko, ce fabricant assume la responsabilité de cette combinaison. Dans cette situation, Liko renvoie aux notices d'emploi et recommandations du fabricant responsable concernant l'usage, la maintenance, le nettoyage, la vérification et l'inspection de la combinaison afin de se conformer aux exigences de la norme EN ISO 10535.

CE Produit médico-technique de classe I

Les produits Liko sont sans cesse développés, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans les produits sans information préalable. Contactez votre représentant Liko pour des renseignements, des conseils ou d'éventuelles mises à jour.

⚠ Important!

Lever et transférer une personne comporte toujours un certain risque. C'est pourquoi les notices d'emploi du lève-personnes et de ses accessoires doivent être étudiées attentivement. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'emploi. Seul le personnel informé doit utiliser cet équipement.

Assurez-vous que l'accessoire est adapté à l'appareil utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation.

En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé des possibilités qu'a ce dernier de faire face à la situation de transfert.

Contrôlez le harnais régulièrement, spécialement après lavage, et plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages des coutures, des tissus, des sangles et des boucles. Ne pas utiliser d'accessoires endommagés.

Si vous avez des questions, contactez le fabricant ou le fournisseur.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

