

Description du produit

Soulever des patients très lourds nécessite des techniques spéciales et un équipement de transfert spécialement conçu. Liko a développé la série de produits Ultra pour faciliter le transfert de telles patients de manière sûre et confortable.

La Culotte de levage Liko Ultra offre aux patients très lourds, la chance de pratiquer l'entraînement à se tenir debout – et à la marche sans risquer de tomber. Elle permet également de réduire les risques de blessures aux assistants.

La Culotte de levage Liko Ultra facilite l'entraînement à se tenir debout et à la marche pour les patients qui souffrent d'un mauvais équilibre et d'un mauvais fonctionnement des jambes. La Culotte de levage permet au patient de se déplacer avec plus ou moins de décharge de poids du corps.

La Culotte de levage Liko Ultra est équipée de deux sangles de hanche de chaque côté pour une distribution encore plus uniforme du poids. Elles sont offertes en deux tailles différentes.

Choix du lève-personnes approprié

Nous recommandons qu'au moins deux assistants soient présents lors du transfert d'un patient.

La Culotte de levage Liko Ultra peut être utilisée avec les lèves-personnes plafonniers et mobiles Liko.

Avec un lève-personnes plafonnier, le patient peut se mouvoir sans restriction à l'intérieur de la zone de levage du lève-personnes. Choisissez parmi :

- Système UltraTwin Liko avec deux unités. La charge maximale est 500 kg, en fonction des produits individuels inclus dans le système de lève-personnes assemblé. Le système UltraTwin est offert pour une installation fixe ou autonome dans l'UltraTwin FreeSpan.
- VikingXL pour un transfert jusqu'à 300 kg. Peut être équipé d'un accoudoir pour offrir une assistance supplémentaire lors de l'entraînement à se tenir debout et à la marche.

Dans ce document, la personne étant transférée est appelée le patient et celle qui l'aide l'assistant.

 **Il doit être prêté la plus grande attention aux textes qui suivent ce signe.**

 **Lire les notices d'emploi du harnais et du lève-personnes utilisés.**
Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.

Table des matières

Consignes de sécurité	3
Définitions	4
Utilisation de la Culotte de levage	4-5
Réglage des sangles-oeillets	6
Retrait de la Culotte de levage	6
Choisissez la bonne taille	7
Accessoires	7
Caractéristiques de la Culotte de levage Liko Ultra, mod. 920.....	8

Consignes de sécurité

△ Avant le transfert, n'oubliez pas :

- Un ou plusieurs assistants peuvent être nécessaires, selon les cas.
- Planifier l'opération, avant de lever, de façon à ce que cela se fasse de la manière la plus sûre et simple possible.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, il est très important de contrôler que les sangles sont bien accrochées à l'étrier, quand les sangles sont tendues, mais avant que le patient ne soit soulevé.
- Ne jamais soulever un patient plus haut que ce qui est approprié compte tenu des possibilités du patient. Régler la hauteur maximale du lève-personnes pour empêcher que le patient soit involontairement soulevé trop haut.
- Ne jamais laisser un patient sans surveillance lors d'une situation de transfert.
- Contrôler que les roues du fauteuil, lit, de la couchette, etc. sont verrouillées pendant l'opération.
- Contrôler que l'abaissement d'urgence du lève-personnes utilisé fonctionne.



Produit médico-technique de classe I

Les Culottes de levage Liko Ultra ont été testées par un institut d'essais homologué et sont en conformité à toutes les exigences des produits MDD Classe I et la norme harmonisée EN ISO 10535.

Breveté aux États-Unis. Brevet en instance au Canada et en Europe.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485. Liko est également certifié ISO 14001 Environnement.

Les produits Liko sont sans cesse développés, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans les produits sans information préalable. Contactez votre représentant Liko pour des renseignements, des conseils ou d'éventuelles mises à jour.



IMPORTANT !

Lever et transférer une personne comporte toujours un certain risque. C'est pourquoi les notices d'emploi du lève-personnes et de ses accessoires doivent être étudiées attentivement. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'emploi. Seul le personnel informé doit utiliser cet équipement. Assurez-vous que l'accessoire est adapté à l'appareil utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation. En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé des possibilités qu'a ce dernier de faire face à la situation de transfert.

Soin et entretien

Contrôlez le harnais régulièrement, tout spécialement après son lavage. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- Tissu
- Sangles
- Coutures
- Oeilletons de suspension
- Clips

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

Prière de contacter le fabricant ou le fournisseur, si vous avez des questions qui restent sans réponse.

Instructions de lavage : Reportez-vous à l'étiquette du harnais.


Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est de 1 à 5 ans. Elle varie en fonction du matériau, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.

Inspection périodique


Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si le produit est utilisé ou lavé plus fréquemment qu'à la normale. Consultez le protocole de Liko concernant l'inspection périodique de chaque produit.

Définitions

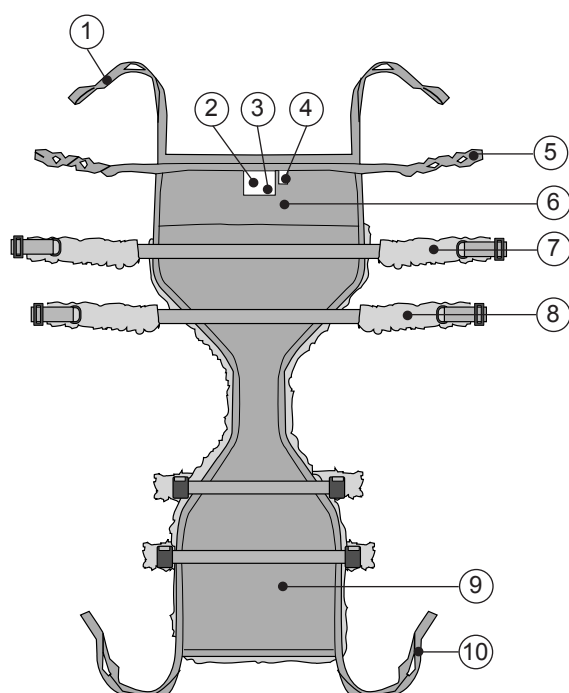

1. Sangles de suspension arrière
2. Étiquette du produit
3. Numéro de série
4. Indication de taille (taille XXL seulement)
5. Sangles-oeillets
6. Partie arrière
7. Sangle de hanche supérieure
8. Sangle de hanche inférieure
9. Partie avant
10. Sangle de suspension avant

Utilisation de la Culotte de levage

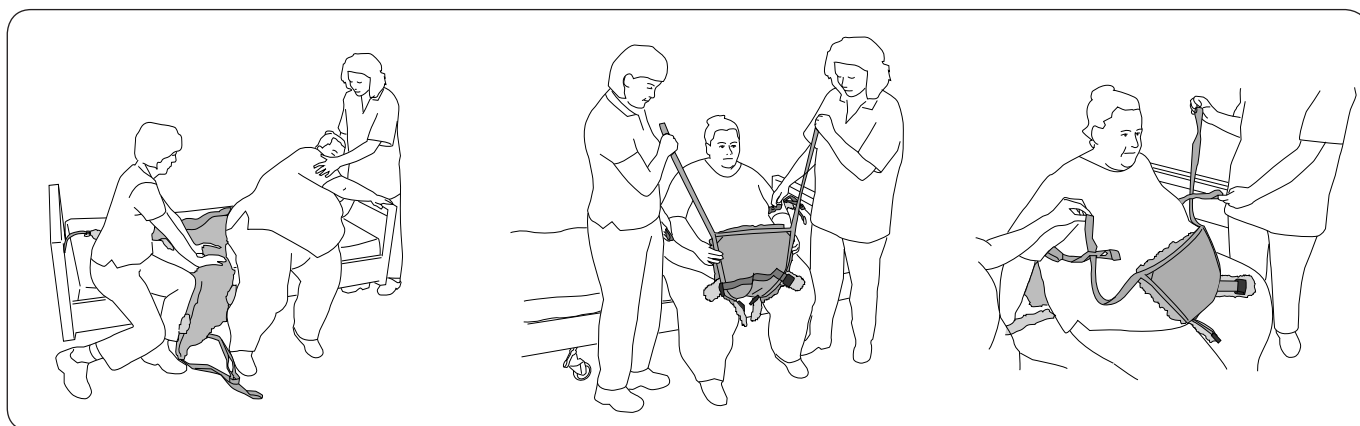


Le point de départ d'utilisation de la Culotte de levage est la position assise. Le patient se penche sur le côté pour que la Culotte de levage soit mise en place sous le bassin. Placez la Culotte de levage aussi loin que possible sous le patient, l'étiquette à l'arrière vers le bas. Assurez-vous que la Culotte de levage est correctement centrée, et dans une bonne position, avec une même quantité de matériel de culotte sur l'avant que sur l'arrière.

Remontez la partie avant de la Culotte de levage entre les jambes de façon à ce que les sangles de hanche soient accessibles par l'avant.


Enfilez les sangles de suspension avant à travers les sangles-oeillets dans l'œillet adéquat (voir page 6, Réglage des sangles-oeillets).

Autre application de la Culotte de levage Liko Ultra : Le patient peut être levé dans un harnais normal et ensuite descendu dans la Culotte de levage, placée sur un siège ou sur le bord du lit. Le harnais utilisé peut être, par exemple, le harnais Ultra Liko, mod. 06, le harnais Original Liko à dos rehaussé, mod. 20 ou le harnais Original Soft Taille haute, mod. 26. Cette application facilite l'opération si pour une raison quelconque, le patient ne peut pas se pencher sur le côté ou s'il n'y a pas assez de place pour placer la Culotte de levage à partir du côté.

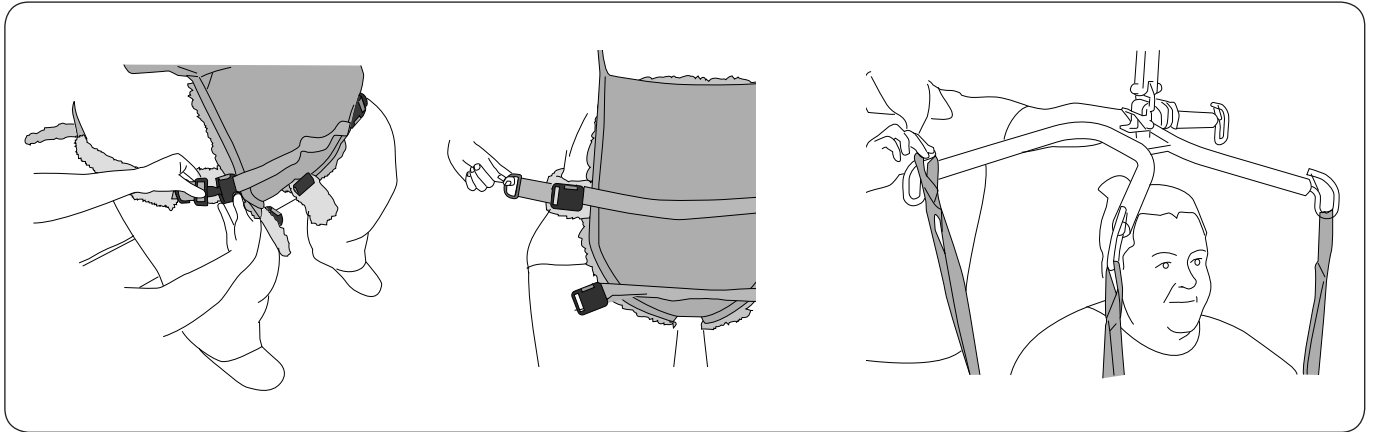

Attachez les clips de la sangle de hanche et tirez pour resserrer. En fonction de la taille du patient, une ou les deux sangles peuvent être attachées à partir de la position verticale.

Accrochez les sangles de suspension arrière sur les crochets arrière de l'étrier ou sur l'étrier arrière. Accrochez les sangles de suspension avant sur les crochets avant de l'étrier ou sur l'étrier avant. La sangle-œillet la plus à l'extérieur est la plus couramment utilisée.

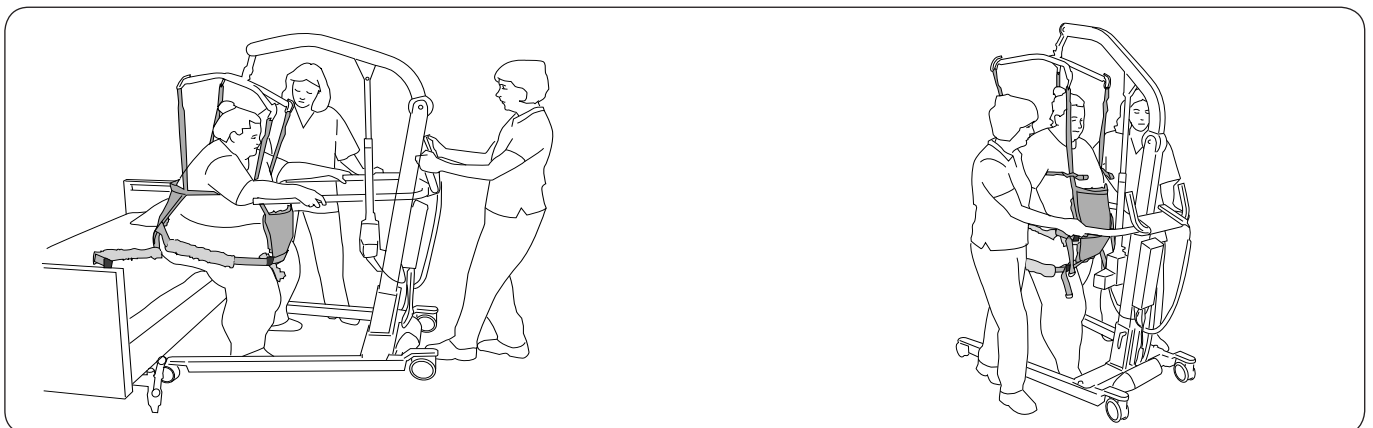


Avant la verticalisation : Vérifiez que les pieds du patient reposent de manière stable sur le sol pour alléger le poids lors de la verticalisation. Remontez un peu le lève-personnes de façon à ce que les sangles se tendent sans que le postérieur du patient ne se soulève et assurez-vous que les sangles-œilletons offrent un support adéquat autour du corps du patient.


Pendant la verticalisation : Tirez le lève-personnes vers l'avant dans le sens du mouvement de façon à ce que le transfert de poids puisse se faire correctement jusqu'à ce que le patient soit debout et en bon équilibre.

Lorsque le patient a trouvé son équilibre, la hauteur de levage est réglée de façon à une aide appropriée de la Culotte de levage. L'entraînement à la marche peut maintenant commencer !


Réglage des sangles-œillets

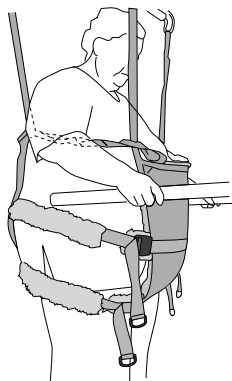

Les sangles-œillets qui soutiennent autour du tronc ne doivent être ni trop relâchées, ni trop serrées autour du tronc. Un resserrement confortable est le mieux.

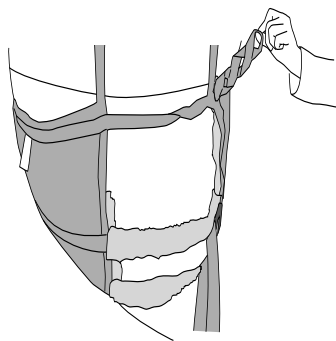


Pour une personne plus mince, les sangles peuvent être enfilées à travers un œillet inférieur.

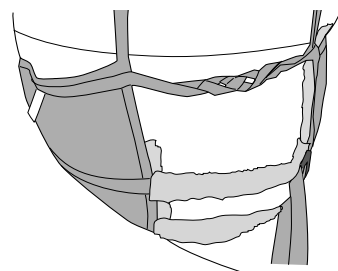


Pour une personne plus corpulente, les sangles peuvent être enfilées à travers un œillet supérieur.

Retrait de la Culotte de levage

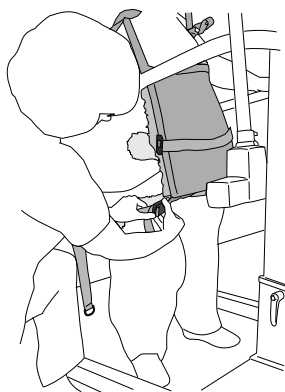

Desserrez les sangles de hanche avant de descendre le patient sur une position assise afin d'éviter une pression trop importante des sangles de hanche.

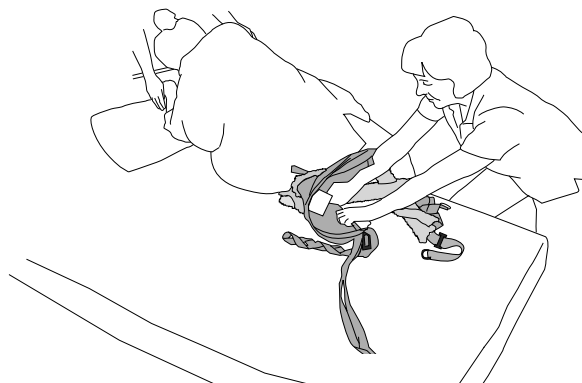


Le patient se penche sur le côté. Saisissez le coin extérieur de la partie arrière de la Culotte de levage. Repliez alors la Culotte de levage sur elle-même et retirez-la.

Choisissez la bonne taille


Le choix de la bonne taille est important pour la sécurité du patient et pour s'assurer que la hauteur de levage adéquate est obtenue. La Culotte de levage doit remonter sur la taille, mais pas aussi haut qu'elle applique une pression sous les bras. Consultez la table des mesures ci-dessous pour vous aider dans votre choix. La taille XXXL est munie de sections de tissus plus hautes et de sangles de hanches plus longues pour accommoder les patients plus corpulents.

△ La hauteur de levage requise peut ne pas être atteinte si vous choisissez une taille trop grande.

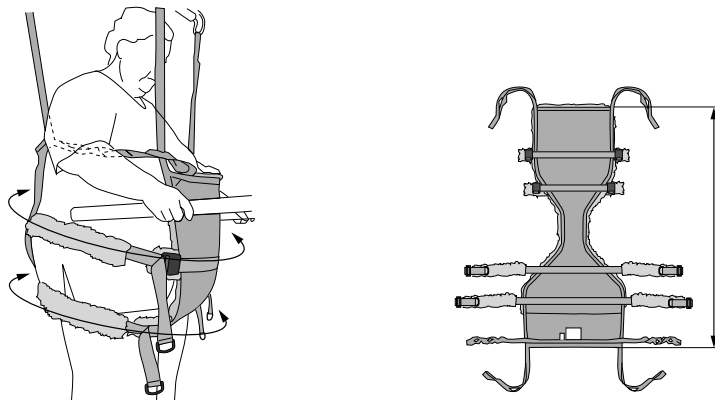

Taille	1	2	3
XXL	185-260 cm	150-210 cm	140 cm
XXXL	185-300 cm	150-250 cm	150 cm


Accessoires

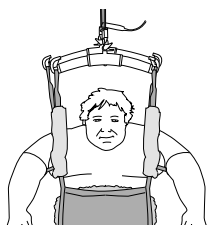

Manchons rembourrés pour sangle d'épaule Art. n° : 3666021

Manchons rembourrés déchargeant la pression, pouvant être appliqués sur les sangles de suspension avant / arrière.

Les manchons rembourrés sont équipés d'une bande velcro sur l'un des côtés pour une mise en place facile.

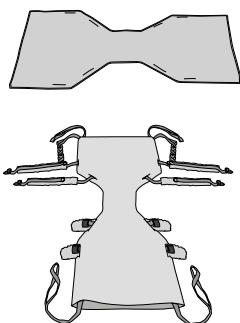


Housse Solo pour la Culotte de levage Ultra (XXL/XXXL)

Art. n° : 3692908

La housse Solo pour la Culotte de levage Ultra (XXL et XXXL) est une housse de protection fabriquée à partir de matériau jetable.

Elle est utilisée pour éviter de salir la Culotte de levage et pour éviter la contagion.

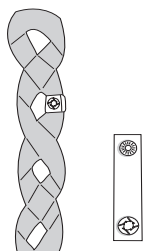

Clips d'oeillets

Art. n° : 3666033-37

Un accessoire pratique pour marquer les œillets essayés pour une personne particulière. Cela facilite, pour les assistants, le choix du bon œillet à utiliser avec la Culotte de levage.

Caractéristiques de la Culotte de levage Liko Ultra, mod. 920

Nom	Art. n°	Taille	Poids de la personne*	Taille de la personne*	Charge max.	Matériau
Culotte de levage Liko Ultra	35920328	XXL	200 - 500 kg	170 - 210 cm	500 kg	Fibre polyester tissée
Culotte de levage Liko Ultra	35920329	XXXL	200 - 500 kg	170 - 210 cm	500 kg	Fibre polyester tissée

* ATTENTION ! Le poids et la taille mentionnés sont une simple indication – il peut y avoir des écarts.

Pour choisir la bonne taille – consultez "Choisissez la bonne taille", page 7.

Combinaisons recommandées

Lors de l'utilisation d'un seul système de levage (Likorall 243 et 250, Viking L et XL)

Combinaisons recommandées entre la Culotte de levage Liko Ultra et les étriers Liko :	Étrier Mini 220	Petit 350	Universel 350	Standard 450	Universel 450	Universel 600	Large 670	Univ. 670 Twin	Étrier Ultra	Étrier quatre fixations	Étrier croisé 450	Étrier croisé 670	Étriers latéraux + Petit 350	Étriers latéraux Univ. + Universel 350	Étriers latéraux + Standard 450	Étriers latéraux Univ. + Universel 450
Culotte de levage Ultra, XXL	3	2	3	2	2	1	1	1	4	4	1	1	4	4	4	4
Culotte de levage Ultra, XXXL	3	3	3	2	2	1	1	1	4	4	1	1	4	4	4	4

Explications : 1 = Recommandé, 2 = Possible, 3 = Déconseillé, 4 = Inadéquat

Lors de l'utilisation de deux unités de levage (UltraTwin), seules les combinaisons indiquées ci-dessous sont possibles.

Combinaisons recommandées entre la Culotte de levage Liko Ultra et les étriers Liko :	Étrier Mini 220	Petit 350	Universel 350	Standard 450	Universel 450	Universel 600	Étrier Ultra
Culotte de levage Ultra, XXL	3	3	2	1	1	1	1
Culotte de levage Ultra, XXXL	3	3	2	1	1	1	1

Explications : 1 = Recommandé, 2 = Possible, 3 = Déconseillé, 4 = Inadéquat



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

