


mod. 93

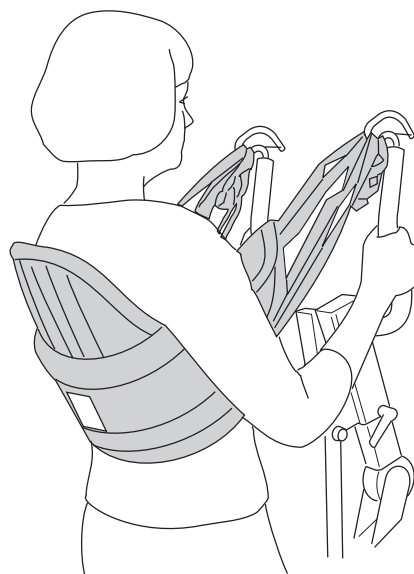

mod. 94

Description du produit

La sangle Sécurité Liko est une sangle de verticalisation unique de part la sécurité qu'elle offre, sa forme et sa fonctionnalité.

La sangle Sécurité soulève dans le dos et sous les bras. L'intérieur est doublé d'un matériau qui empêche le glissement le long du corps.

La ceinture cousue à la taille contribue à accroître la sécurité en empêchant le patient de glisser hors de la sangle. Le principe : la combinaison de deux œillets à chaque crochet.

La sangle Sécurité Liko existe en plusieurs tailles et en deux modèles. Le modèle 94 a un dos plus large, pour offrir un soutien supplémentaire derrière le dos.

La sangle Sécurité Liko est destinée en premier lieu à être utilisée avec le verticalisateur Sabina avec étrier 350 (étroit).

La sangle Sécurité Liko et le verticalisateur Sabina constituent ensemble une unité fonctionnelle. Lire les notices d'emploi des deux produits pour avoir une information complète et obtenir le meilleur résultat.


Il est important de bien comprendre le contenu des notices d'emploi, et seul le personnel informé doit utiliser l'équipement.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient, et celle qui aide, l'assistant.

△ Il doit être prêté la plus grande attention aux textes qui suivent ce signe.

 Lire les notices d'emploi du harnais et du lève-personne utilisés. Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.

Définitions

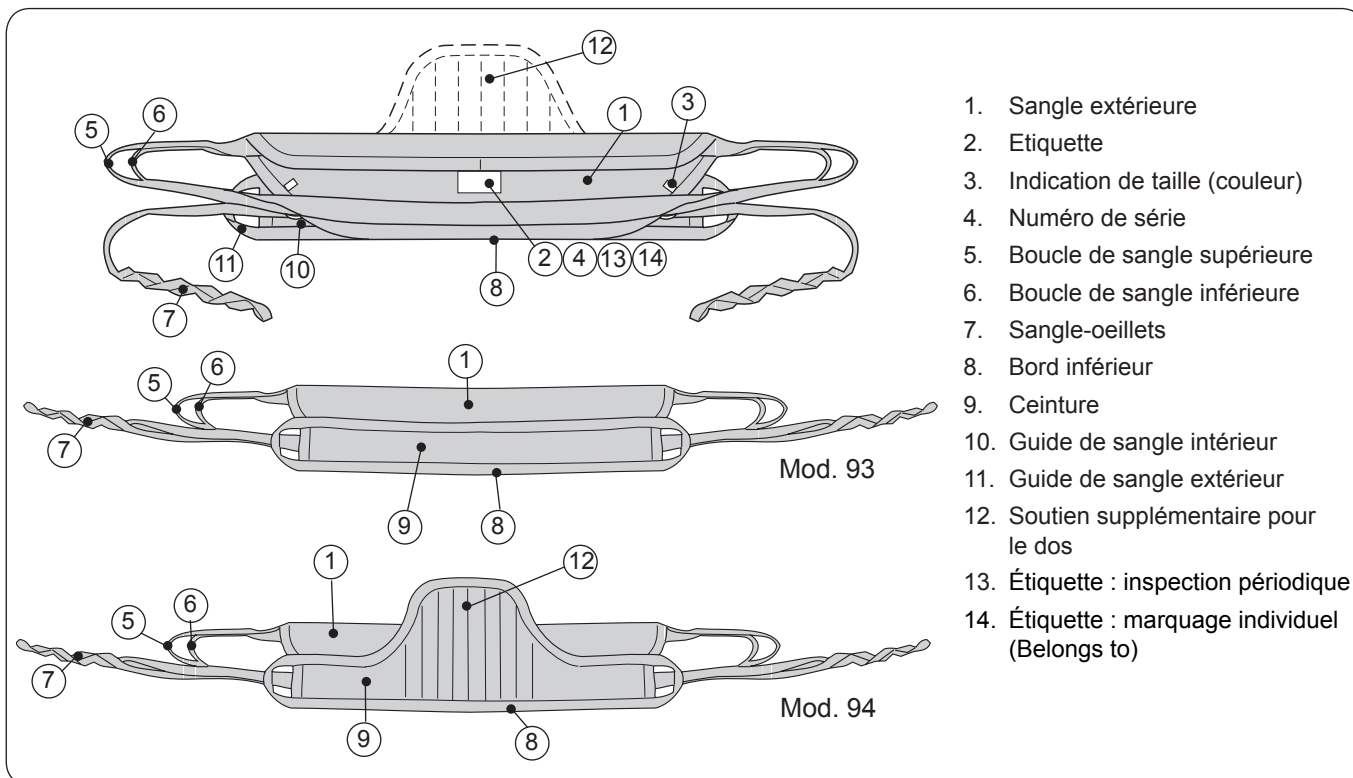


Consignes de sécurité

△ Avant le levage, gardez les points suivants à l'esprit :

- Un responsable au sein de votre établissement doit décider, au cas par cas, si un ou plusieurs assistants sont requis.
- Veillez à ce que le harnais sélectionné réponde aux besoins du patient concernant le modèle, la taille, le tissu et la conception.
- Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utilisez un harnais différent pour chaque patient.
- Préparez l'opération de levage de sorte qu'elle puisse être effectuée aussi sûrement et confortablement que possible.
- Bien que les harnais Liko soient équipés de protections anti-décrochage, des précautions particulières doivent être prises : avant de lever le patient depuis la surface d'appui, il est très important de contrôler que les sangles sont bien accrochées à l'étrier, quand les sangles sont tendues.
- La hauteur de fonctionnement du verticalisateur varie d'une personne à l'autre.
- Ne laissez jamais un patient sans surveillance dans une situation de transfert.
- Contrôlez que les roues du fauteuil ou du lit sont verrouillées pendant l'opération.
- Travaillez toujours de façon ergonomique.

Fonction des boucles de sangles

Boucles de la sangle extérieure

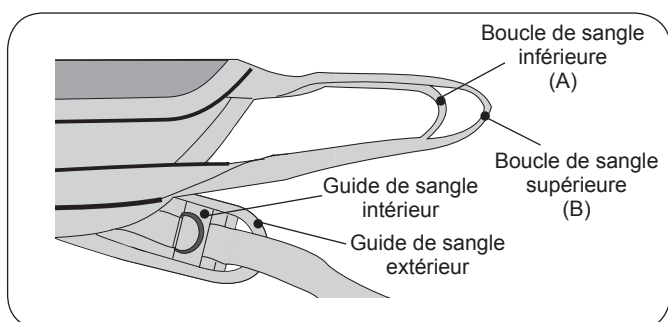


La sangle extérieure a deux boucles : la boucle de sangle supérieure et la boucle de sangle inférieure, pour une utilisation plus flexible.

De façon générale, nous recommandons d'accrocher la boucle de sangle inférieure (A) pour obtenir la position la plus droite possible.

La boucle de sangle extérieure (B) s'utilise quand la taille du patient exige un espace plus grand ou quand le patient est petit par rapport à la hauteur des crochets de Sabina. Pour les cas où l'on choisit la boucle de sangle inférieure, nous recommandons que la boucle de sangle supérieure soit également attachée aux crochets, ceci pour un meilleur contrôle visuel des boucles de sangles.


Sangle-oeillets

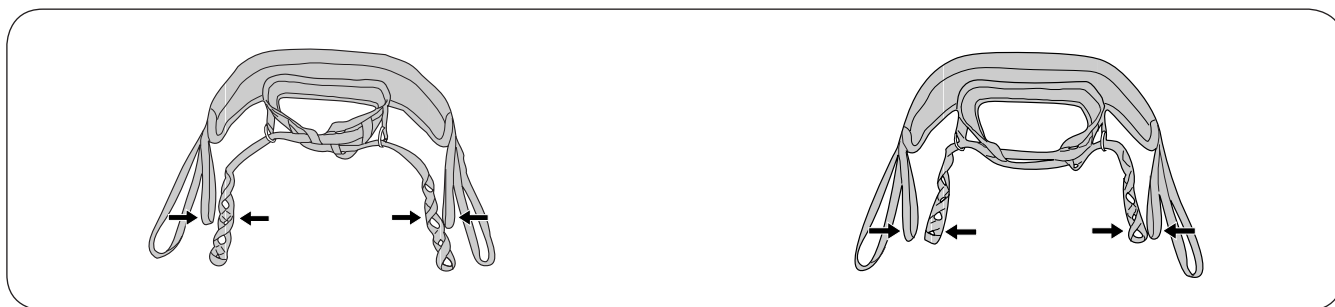

Un oeillet inférieur serre davantage.


Un oeillet supérieur diminue la pression.

Clip d'oeillets

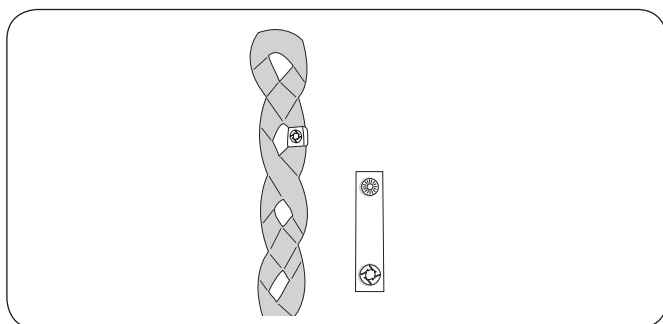

Un accessoire pratique pour marquer les oeillets essayés sur une personne particulière. Il facilite, pour les assistants, le choix du bon oeillet à accrocher sur l'étrier.

Lever avec Sabina et la sangle Sécurité, participation active

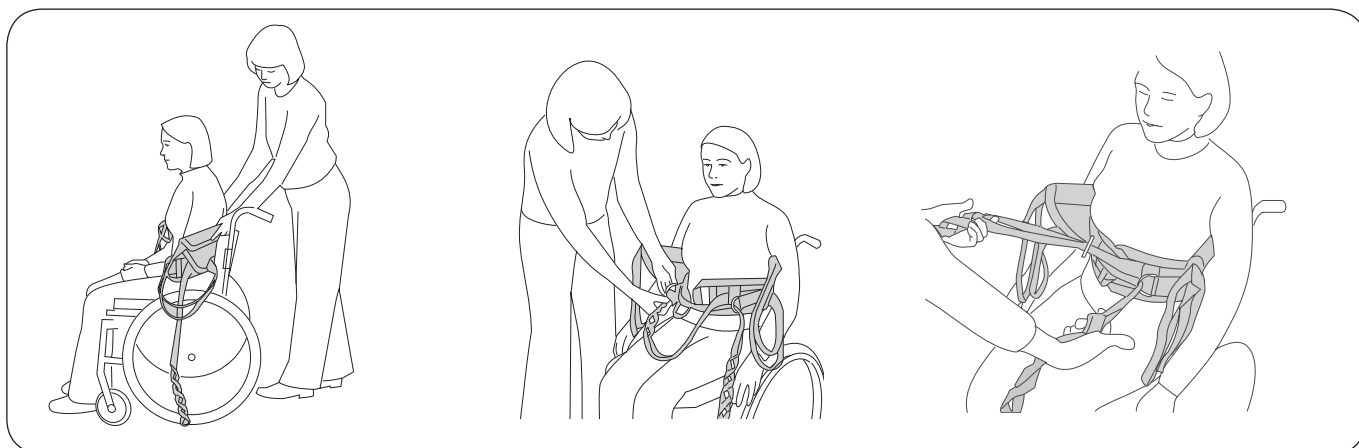


Glisser la sangle Sécurité le long du dos du patient, l'étiquette tournée vers l'extérieur. Le bord inférieur de la sangle doit atteindre la ceinture du patient et être placé tout près du corps. Les bras doivent être par-dessus la sangle et la ceinture.

Croiser les sangles-oeillets et les enfiler dans les boucles métalliques opposées. Voir la description p. 4-5 des différentes méthodes.

Tirer les sangles-oeillets et contrôler le serrage. Si la ceinture ne se resserre pas suffisamment, régler l'enfilage des sangles-oeillets.



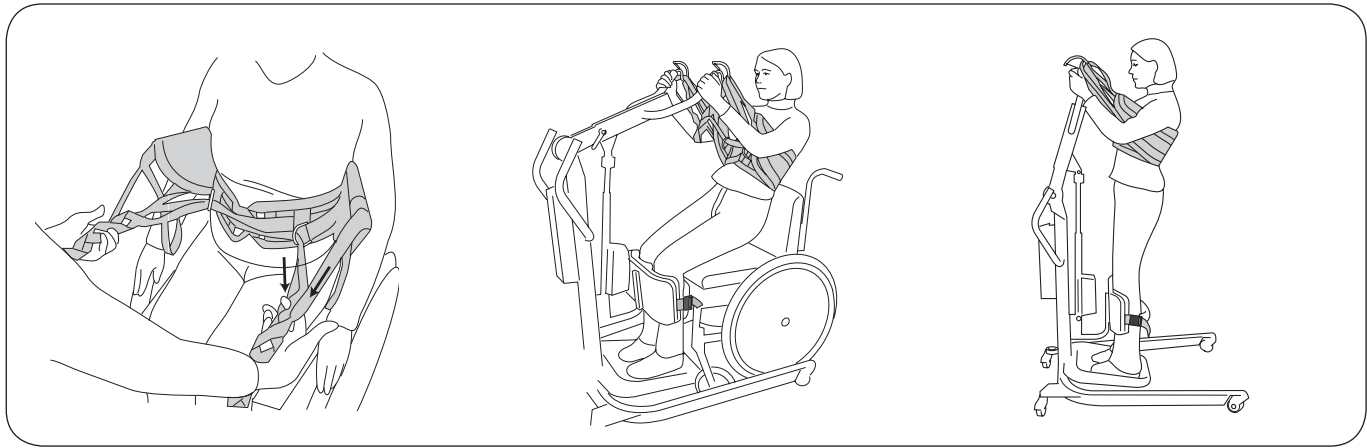

Choisir les boucles de sangles adéquates en tirant les boucles supérieures de la sangle extérieure (vers le haut) et les oeillets de sangle en même temps.

Voir description des boucles de sangle, p. 2-3; Sangles-oeillets.

Essayer d'obtenir le serrage adéquat autour de la taille en choisissant une combinaison dans laquelle la sangle-oeillet et la boucle de sangle ont le même resserrement quand on soulève.

Avancer Sabina; régler la largeur du piètement de façon à ce que les pieds puissent être centrés sur le repose-pied. Les jambes doivent être parallèles à l'appui-jambes. Régler la hauteur et la profondeur de l'appui-jambes, pour une pression confortable juste sous les rotules.

Attacher et tendre la sangle de mollet.

Vous pouvez maintenant accrocher les sangles-oeillets et boucles de sangles, préalablement essayées, aux crochets de l'étrier.

Lever: Manoeuvrer à l'aide des boutons up/down de la commande manuelle. Il existe deux vitesses. Le patient doit être encouragé à participer activement, si c'est possible, en agrippant les poignées de l'étrier et en se soulevant.

Conseil! Nous recommandons que le patient penche légèrement la partie supérieure du corps vers l'arrière pour compenser la faiblesse musculaire de la partie inférieure du corps. Ceci facilite le lever, augmente le confort et empêche la sangle de glisser (vers le haut).

Conseil! Le lever est facilité si le patient est assis relativement haut, c.a.d. la hanche au même niveau ou de préférence plus haut que le genou.

Jusqu'à quelle hauteur doit-on lever?

La hauteur du lever dépend des cas.


Le réglage de la hauteur maximale se fait de la façon suivante :

A Réglage de la hauteur du pied central de Sabina dans le piètement. Voir la notice d'emploi de votre verticalisateur Sabina.

B Choix de la boucle de sangle (inférieure ou supérieure) de la sangle extérieure.


Voir p. 2 : Boucles de la sangle extérieure.

Différentes façons d'enfiler les sangles-oeillets

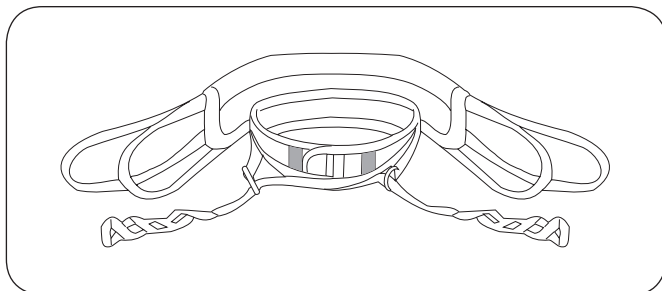

Alt. A: Pour les patients très minces


Retirer les sangles-oeillets des guides de sangles intérieurs avant de les enfiler dans les oeillets métalliques. Ceci permet un resserrement maximum.

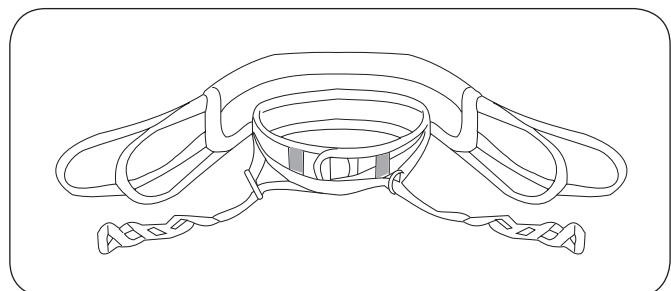

Alt. B: Position médiane

Retirer seulement une des sangles-oeillets du guide de sangle intérieur. Croiser ensuite les sangles-oeillets et les enfiler à travers les oeillets métalliques.



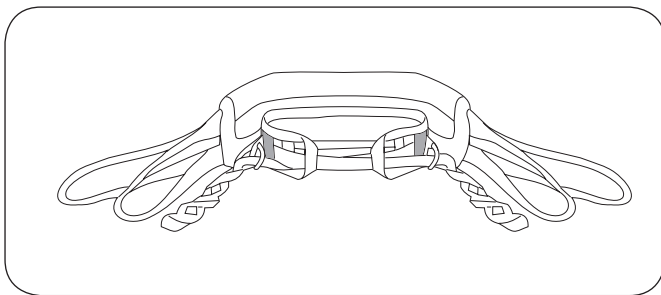

Alt. C: Pour les tailles plus larges


Passer les sangles-oeillets à travers les guides de sangles intérieurs et extérieurs avant de les enfiler dans les oeillets métalliques.

Conseil!

Pour augmenter encore la largeur, on peut rallonger les sangles-oeillets à l'aide des boucles d'extension Liko.

Accessoires pour la sangle Sécurité Liko


Sangle arrière

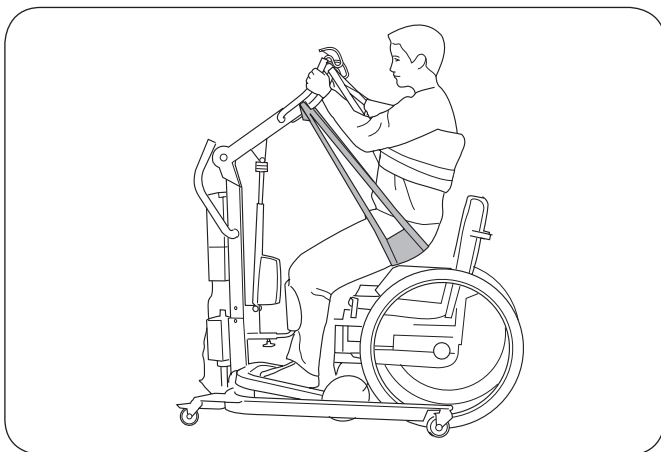

Dans certains cas, une sangle arrière (accessoire: 3591115) peut faciliter le lever. La sangle arrière est appliquée contre le coccyx aussi loin que possible, et aide ensuite à soulever sous le postérieur pendant le lever. Une fois le patient debout, la sangle se desserre et peut facilement être ôtée, par exemple en cas de transfert vers les toilettes. Quand on abaisse vers une position assise, il peut être préférable de retirer la sangle pour que le patient puisse s'installer bien au fond du siège.


Un étrier spécial est nécessaire pour utiliser la Sangle arrière. Etudier soigneusement la notice d'emploi de la Sangle arrière avant utilisation.

Doublure (pour mod. 93)

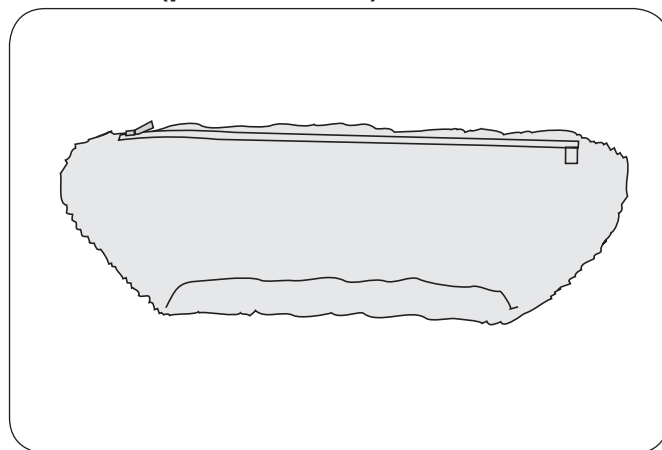

La sangle Sécurité modèle 93 est équipée d'une fermeture éclair permettant de la compléter d'une doublure en peau de mouton synthétique, pour plus de confort et une meilleure répartition de la pression.

Caractéristiques de la sangle Sécurité Liko

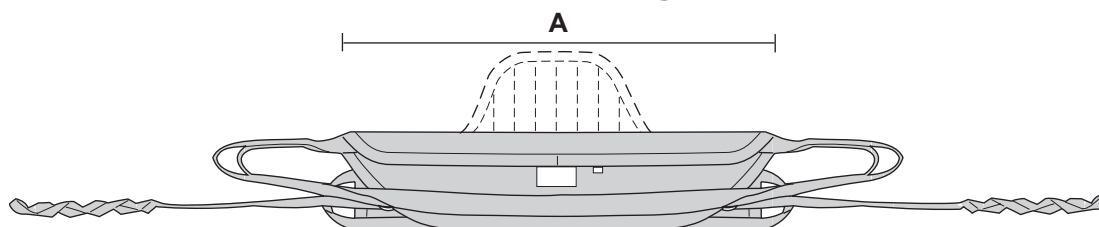

Article	Article n°	Taille	Poids du patient*	Largeur de la sangle
Sangle Sécurité	3593115	Medium	< 80 kg	A: 90 cm
Sangle Sécurité	3593116	Large	> 70 kg	A: 105 cm
Sangle Sécurité Dos rehaussé	3594415	Medium	< 80 kg	A: 90 cm
Sangle Sécurité Dos rehaussé	3594416	Large	> 70 kg	A: 105 cm

* Attention ! Le poids mentionné est une simple indication – Il peut y avoir des écarts.

Les harnais Liko sont homologués pour soulever maximum 200 kg ou plus, voir le marquage de l'article.

Accessoires	Article n°	
Doublure Medium (pour 3593115)	3691035	
Doublure Large (pour 3593116)	3691036	
Sangle arrière	3691115	
Clip d'oeillet, jaune	3666035	Le clip d'oeillet peut être commandé en d'autres couleurs.
Clip d'oeillet, bleu	3666036	

Conseils pour le choix de la taille

La partie doublée de la sangle doit bien entourer le dos et le dessous des bras.

Une sangle trop grande peut impliquer que le patient n'atteint pas l'étrier pour s'y agripper.

Instructions de lavage : reportez-vous à l'étiquette du harnais.

Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est de 1 à 5 ans. Elle varie en fonction du matériau, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si le produit est utilisé ou lavé plus fréquemment qu'à la normale. Consultez le protocole de Liko concernant l'inspection périodique de chaque produit.

Combinaisons

La sangle Sécurité Liko est destinée uniquement à être utilisée avec les verticalisateurs Sabina. Nous recommandons Sabina avec l'étrier 350 (étroit).

L'association d'accessoires/produits autres que ceux recommandés par Liko peut entraîner des risques pour la sécurité du patient.

Lorsqu'un fabricant recommande les accessoires/produits de Liko conjointement avec ses propres accessoires/produits ou ceux de tiers et que la combinaison n'est pas approuvée par Liko, ce fabricant assume la responsabilité de cette combinaison. Dans cette situation, Liko renvoie aux notices d'emploi et recommandations du fabricant responsable concernant l'usage, la maintenance, le nettoyage, la vérification et l'inspection de la combinaison afin de se conformer aux exigences de la norme EN ISO 10535.

CE Produit technico-médical de classe I

Les produits Liko sont sans cesse améliorés. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier un produit sans notice préalable. Contactez votre représentant Liko pour obtenir mises à jour, information et conseils.

⚠ Important!

Le lever et le transfert d'une personne comportent toujours un certain risque. C'est pourquoi les notices d'emploi du lève-personne et de ses accessoires doivent être étudiées attentivement. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'emploi, et seul le personnel informé doit utiliser cet équipement.

Assurez-vous que l'accessoire est adapté à l'appareil utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation.

En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient, et vous devez être informé des possibilités que ce dernier a de faire face à la situation de lever.

Contrôler le harnais régulièrement, spécialement après lavage, et plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages des coutures, des tissus, des sangles et des boucles. Ne pas utiliser d'accessoires endommagés. Si vous avez des questions, contactez le fabricant/le fournisseur.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

