

Description du produit

Le harnais Coquille est un harnais souple qui s'adapte au corps et nécessite peu d'espace dans le fauteuil roulant.

Il offre une position assise légèrement penchée en arrière et soutient tout le corps, ce qui convient aux patients qui ont un maintien réduit du tronc et de la tête. Le patient peut placer ses bras à l'intérieur comme à l'extérieur du harnais. Le soutien de tête est réglable.

Par sa conception et son matériau, le harnais Coquille convient particulièrement aux transferts vers les sièges moulés puisque le harnais reste généralement dans le fauteuil roulant une fois l'opération de levage terminée. C'est pourquoi ce harnais est très populaire en situations de soins et de rééducation où il est courant d'utiliser des corsets-sièges et des sièges moulés.

Le harnais Coquille peut aussi servir pour le bain ou la douche.

Un harnais correctement ajusté et soigneusement mis en place procure au patient un excellent sentiment de sécurité ainsi qu'un grand confort.

Tailles

Le harnais Coquille est disponible en différentes tailles. Il est important de choisir la bonne taille pour un maximum de confort et de sécurité. Un harnais trop grand augmente le risque que le patient glisse hors du harnais, tandis qu'un harnais trop petit peut scier à l'entrejambe et entraîner une gêne.

Tissus

Le harnais Coquille est fabriqué dans un tissu de type filet polyester souple et confortable qui laisse passer la chaleur et l'humidité du corps.

Les sangles sont toujours fabriquées en polyester résistant et sont très sûres.

Soutiens de jambes

Le harnais Coquille est disponible avec des soutiens de jambes de deux types. Les plus courants sont des soutiens de jambes en tissu simple, sans inserts renforcés, ce qui facilite le pliage et le rangement du harnais dans le fauteuil roulant une fois l'opération de levage terminée.

Un autre modèle est doté de soutiens de jambes renforcés. Ceux-ci répartissent la pression et évitent que le harnais ne se plisse sous les cuisses.

⚠ Il doit être prêté la plus grande attention aux textes qui suivent ce signe.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient et celle qui l'aide l'assistant.

 **Lisez la notice d'emploi du harnais et du lève-personnes utilisés. Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.**

Consignes de sécurité

Avant le levage, gardez les points suivants à l'esprit :

- Un responsable au sein de votre établissement doit décider, au cas par cas, si un ou plusieurs assistants sont requis.
- Veillez à ce que le harnais sélectionné réponde aux besoins du patient concernant le modèle, la taille, le tissu et la conception.
- Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utilisez un harnais différent pour chaque patient.
- Préparez l'opération de levage de sorte qu'elle puisse être effectuée aussi sûrement et confortablement que possible.
- Avant le levage, vérifiez que l'accessoire de levage est suspendu verticalement et peut être manœuvré librement.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, des précautions particulières doivent être prises : avant de lever le patient depuis la surface d'appui, il est très important de contrôler que les sangles sont bien accrochées à l'étrier, quand les sangles sont tendues.
- Contrôlez que le patient est assis en toute sécurité dans le harnais avant le transfert vers un autre endroit.
- Ne soulevez jamais un patient plus haut que l'opération ne le nécessite.
- Ne laissez jamais un patient sans surveillance dans une situation de transfert !
- Contrôlez que les roues du fauteuil ou du lit sont verrouillées pendant l'opération.
- Travaillez toujours de façon ergonomique.

Dispositif médical de classe I

Le harnais Coquille Liko a été testé par un institut accrédité et répond aux normes exigées par les directives médicotecniques pour les produits de classe I et la norme harmonisée EN ISO 10535.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour l'industrie des dispositifs médicaux, ISO 13485.
Liko est certifié ISO 14001 Environnement.

Design and Quality by Liko in Sweden

Les produits Liko sont sans cesse développés, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans les produits sans information préalable. Contactez votre représentant Liko pour des renseignements, des conseils ou d'éventuelles mises à jour.

IMPORTANT !

Lever et transférer une personne comporte toujours un certain risque. Lisez la notice d'emploi du lève-personnes et des accessoires avant utilisation. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'emploi. Seul le personnel formé doit utiliser cet appareil. Assurez-vous que l'accessoire est adapté à l'appareil utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation. En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé des possibilités qu'a ce dernier de faire face à la situation de transfert.

Précautions d'utilisation et entretien

Contrôlez le harnais régulièrement, tout spécialement après son lavage. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- Tissu
- Sangles
- Coutures
- Boucles de suspension

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

Veillez contacter le fabricant ou le fournisseur si vous avez des questions qui restent sans réponse.

Instructions de lavage : reportez-vous à l'étiquette du harnais.


Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est de 1 à 3 ans. Elle varie en fonction du matériau, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si le produit est utilisé ou lavé plus fréquemment qu'à la normale. Consultez le protocole de Liko concernant l'inspection périodique de chaque produit.



Définitions

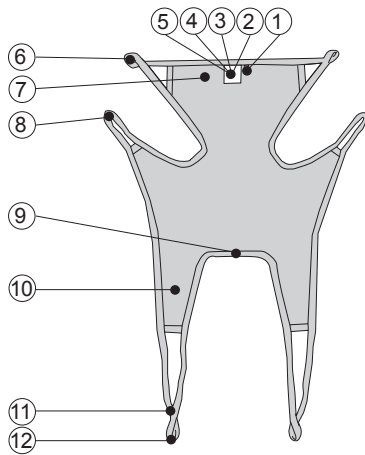

1. Indication de taille
2. Étiquette du produit
3. Numéro de série
4. Étiquette : inspection périodique
5. Étiquette : marquage individuel (Belongs to)
6. Boucle de sangle supérieure
7. Soutien de tête
8. Boucle thoracique
9. Bord inférieur
10. Soutien de jambe
11. Position de raccourcissement
12. Boucle de soutien de jambe

Levage depuis une position assise





Le patient est en général penché vers l'avant lors de l'application et il est alors important qu'un assistant se place devant lui afin de l'empêcher de tomber vers l'avant.

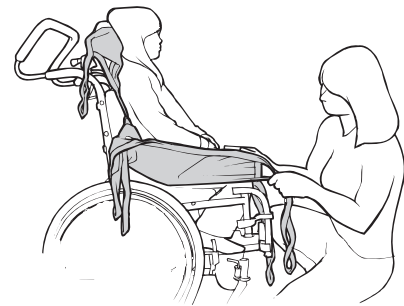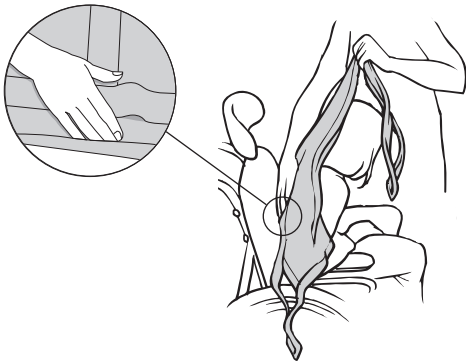

Placez le harnais derrière le dos du patient, étiquette tournée vers l'extérieur. Repliez le bord inférieur du harnais autour de vos doigts afin de diriger plus facilement le harnais en place. À l'aide de la paume de la main, placez le bord inférieur du harnais sur le coccyx du patient. **Ceci est très important.**

Astuce : la mise en place correcte est facilitée si le patient est légèrement penché vers l'avant.


Tirez les soutiens de jambes du harnais le long de l'extérieur des cuisses du patient. Placez la paume de votre main entre le corps du patient et le harnais et faites glisser le bord inférieur du soutien de jambe vers le siège. Tirez et tendez en même temps le soutien de jambe vers l'avant avec l'autre main.

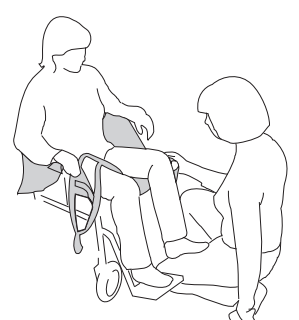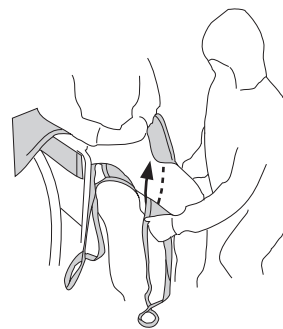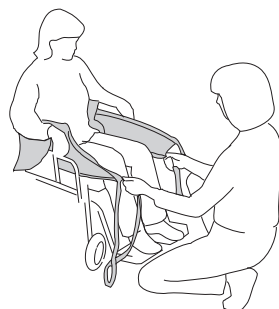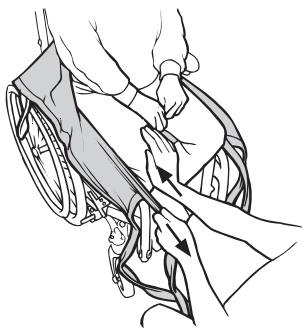

Tirez les soutiens de jambes vers l'avant pour défroisser d'éventuels plis à l'arrière. **Astuce :** appuyez légèrement sur la rotule pour pouvoir tirer plus facilement les soutiens de jambes vers vous. Contrôlez que la partie des soutiens de jambes qui dépasse est d'égale longueur des deux côtés.

Faites passer les soutiens de jambes sous chaque cuisse. **Astuce :** les soutiens de jambes sont plus faciles à mettre en place si les jambes du patient ne reposent pas sur le siège. Pour cela, placez les pieds sur le repose-pied ou sur votre propre jambe comme le montre l'illustration.



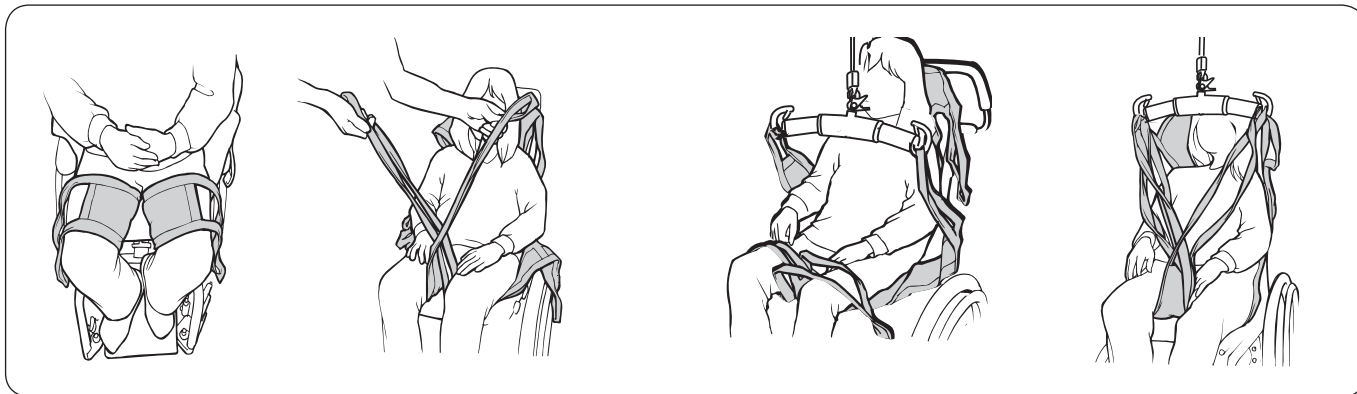


Faites en sorte que le tissu soit parfaitement tendu sous la cuisse et qu'il en fasse bien le tour. Préparez l'accrochage des soutiens de jambes. La méthode la plus courante de mise en place du harnais consiste à croiser les soutiens de jambes. Pour les autres méthodes, consultez la page 6.

Accrochez d'abord les boucles thoraciques à l'étrier. Le patient peut placer ses bras à l'intérieur comme à l'extérieur du harnais. Accrochez ensuite les boucles de sangle supérieures à l'étrier. Choisissez les boucles en fonction des besoins du patient, cf. **Réglage du soutien de tête**, page 7. Pour terminer, accrochez les boucles de soutien de jambes à l'étrier. Soulevez le patient.

Transfert vers une position assise

Dans le cas de positionnement dans un fauteuil roulant, il est essentiel que le patient s'enfonce bien en arrière dans le fauteuil pour s'asseoir correctement. Il existe pour cela plusieurs méthodes.

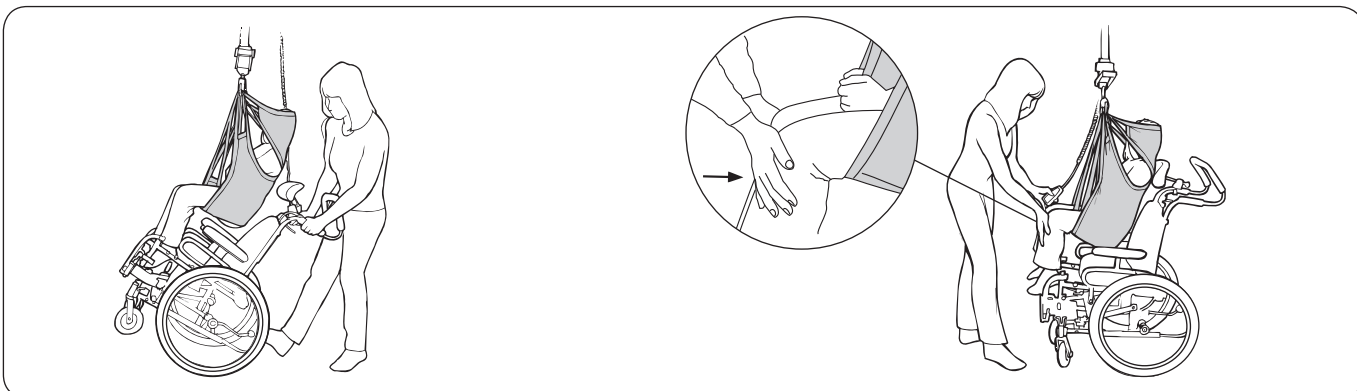

Pour placer un patient dans un fauteuil roulant : inclinez le fauteuil vers l'arrière pendant l'abaissement du patient. Laissez le postérieur glisser le long du dossier à la fin de l'opération. Réglez la position du fauteuil avec votre pied sur le basculeur.

Autre solution : appliquez une légère pression sous les genoux du patient pendant la phase d'abaissement de sorte que les fesses soient dirigées vers le dossier du siège.

Le plus souvent, le harnais Coquille reste dans le siège une fois le levage terminé et les boucles de sangle de même que les soutiens de jambes peuvent être pliés et rangés dans le siège.

Retrait du harnais d'un siège ou d'un fauteuil roulant



Retirez doucement le soutien de jambe. La meilleure façon de procéder consiste à glisser les boucles de soutien de jambes sous ces derniers et à les tirer sous la partie en tissu.


Retirez le harnais en le tirant doucement vers le haut.

Levage depuis le lit

Nous recommandons de mettre le harnais en place lorsque le patient est couché puisque c'est la procédure la plus simple. Dans certains cas (notamment si le patient ne peut pas s'allonger), le harnais peut être mis en place lorsque le patient est assis sur son lit (cf. **Autre méthode de mise en place du harnais** ci-dessous).

Pensez à votre posture de travail ainsi qu'au confort du patient. Utilisez les fonctions de montée et descente du lit.

△ Si la tête du lit ne peut pas être relevée ou abaissée, soyez particulièrement vigilant durant la première partie de levage afin de ne pas exercer de tension sur le cou du patient. L'assistant doit soutenir la nuque avec ses mains.

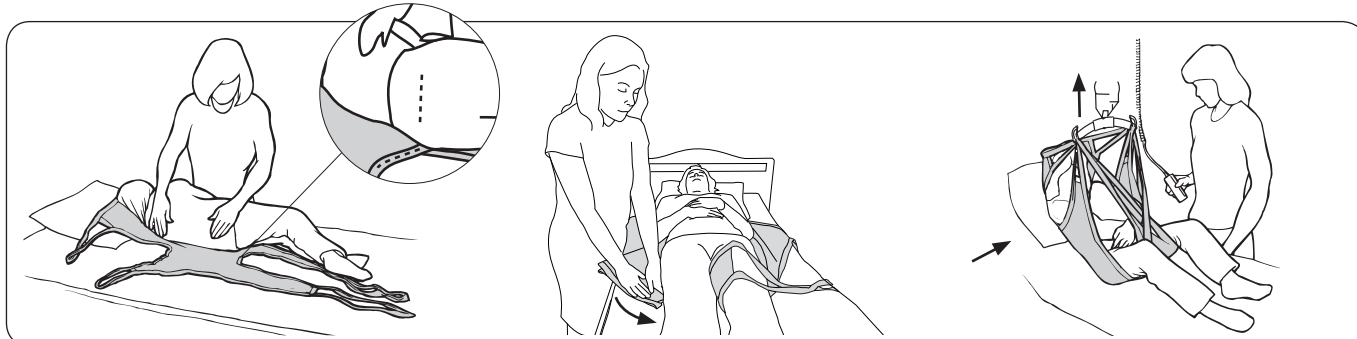

Tournez le patient vers vous afin d'éviter tout risque de chute. Placez le harnais sous le patient, le bord inférieur **au niveau du coccyx**. Le bord supérieur du soutien de tête ne doit donc pas être plus bas que la tête afin d'apporter un soutien suffisant à la tête durant le levage. Pliez le harnais de sorte que sa bande médiane se trouve le long de la colonne vertébrale du patient quand celui-ci est retourné avec précaution. Déroulez soigneusement le harnais de l'autre côté.

Introduisez les soutiens de jambes sous les jambes. Pour faciliter l'opération, pressez le soutien de jambe contre le matelas lorsque vous le faites passer sous la cuisse. Faites en sorte que le tissu soit parfaitement tendu sous la cuisse et qu'il en fasse bien le tour. Les soutiens de jambes peuvent être accrochés de différentes façons, cf. page 6.

Levez la tête de lit. Accrochez à l'étrier d'abord les boucles thoraciques puis les boucles de sangle supérieures. Choisissez les boucles en fonction des besoins du patient, cf. **Réglage du soutien de tête**, page 7. Pour terminer, accrochez les boucles de soutien de jambes à l'étrier. Soulevez le patient.


Autre méthode de mise en place du harnais : levez la tête de lit derrière le patient. Posez le harnais sur le lit, étiquette tournée vers le matelas. Faites glisser le harnais derrière le dos du patient de façon à ce que le bord inférieur **soit au niveau du coccyx**. **Astuce** : la mise en place est facilitée si le patient est penché ou se penche vers l'avant.

Transfert vers le lit

Pensez à votre posture de travail ainsi qu'au confort du patient. Utilisez les fonctions de montée et descente du lit.

△ Si la tête du lit ne peut pas être relevée ou abaissée, soyez particulièrement vigilant durant la dernière partie de l'abaissement afin de ne pas exercer de tension sur le cou du patient. L'assistant doit soutenir la nuque avec ses mains.

Retrait du harnais lorsque le patient est assis dans le lit

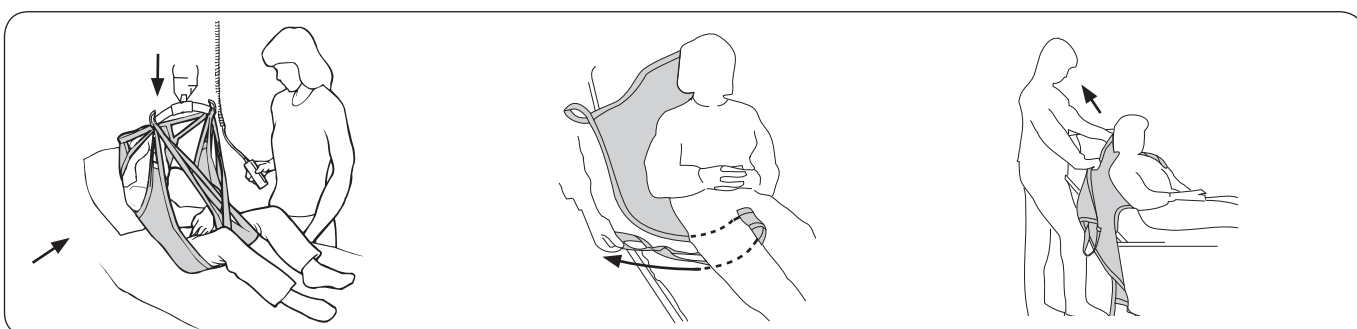


Placez le patient au-dessus du lit. Levez la tête de lit. Descendez le patient sur le lit.

Pour retirer les soutiens de jambes, faites-les glisser par-dessous et tirez-les sous la partie en tissu. **Astuce** : l'opération est plus facile si les jambes du patient sont pliées.


Retirez le harnais en le tirant doucement vers le haut.

Retrait du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit

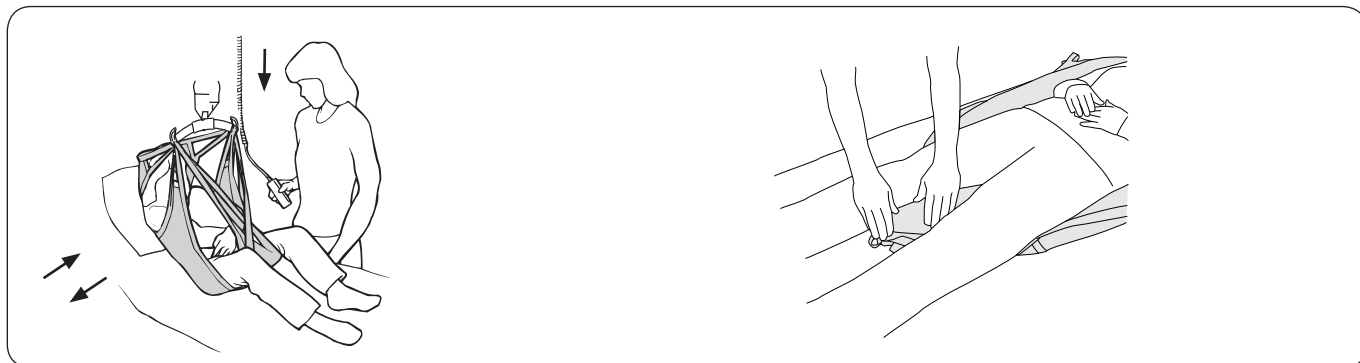

Placez le patient au-dessus du lit. Levez la tête de lit. Descendez le patient sur le lit. Abaissez la tête de lit.

Placez les boucles de soutien de jambes sous ces derniers entre les jambes du patient.

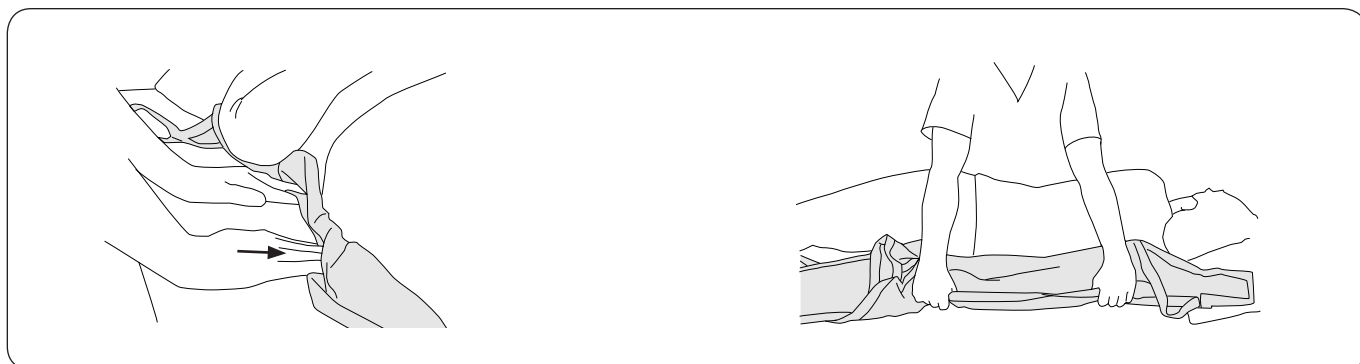

Saisissez le bord du harnais. Ramenez le harnais sous lui-même. Pressez-le contre le matelas et enfoncez-le sous le patient.


Tournez soigneusement le patient sur le côté. Agrippez le harnais par en dessous et retirez-le soigneusement.

Conseils d'ajustement

Différentes méthodes pour accrocher les soutiens de jambes

Avant de choisir une autre méthode d'accrochage, effectuez une évaluation individuelle afin d'anticiper les risques éventuels.

Suivent des conseils d'ordre général puisque les mêmes principes sont valables pour plusieurs modèles de harnais.

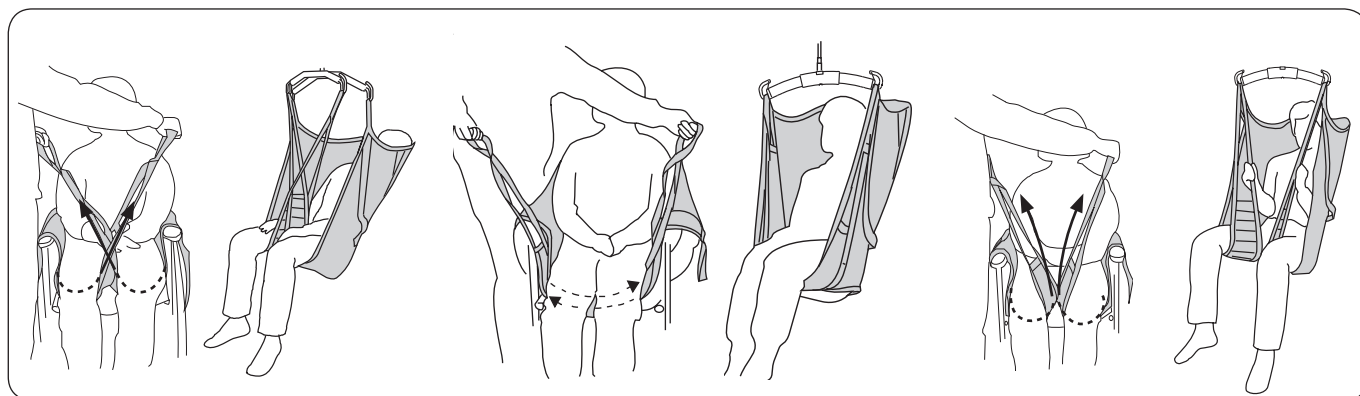

Soutiens de jambes croisés.
La méthode la plus courante de mise en place du harnais. Une boucle de soutien de jambe est enfilée dans l'autre avant que les deux soient attachées à l'étrier.

Chevauchement sous les deux cuisses.
Convient par exemple au levage des personnes amputées des jambes. **Astuce** : afin d'éviter que le patient ne soit trop incliné en position assise, des boucles d'extension peuvent être fixées aux boucles de soutiens de jambes.

Chaque soutien de jambe est accroché séparément à l'étrier.
Convient par exemple au levage des personnes dont le bas-ventre est particulièrement sensible.
△ Risque accru de glissement.


Réglage du soutien de tête

Le soutien de tête du harnais Coquille peut être réglé dans deux positions différentes.

Solution 1 : la boucle extérieure de la boucle de sangle supérieure est accrochée à l'étrier. La tête du patient est alors légèrement penchée en arrière.

Solution 2 : la boucle intérieure de la boucle de sangle supérieure est accrochée à l'étrier. La tête du patient est alors plus droite.

Différentes positions d'assise en fonction du choix de l'étrier

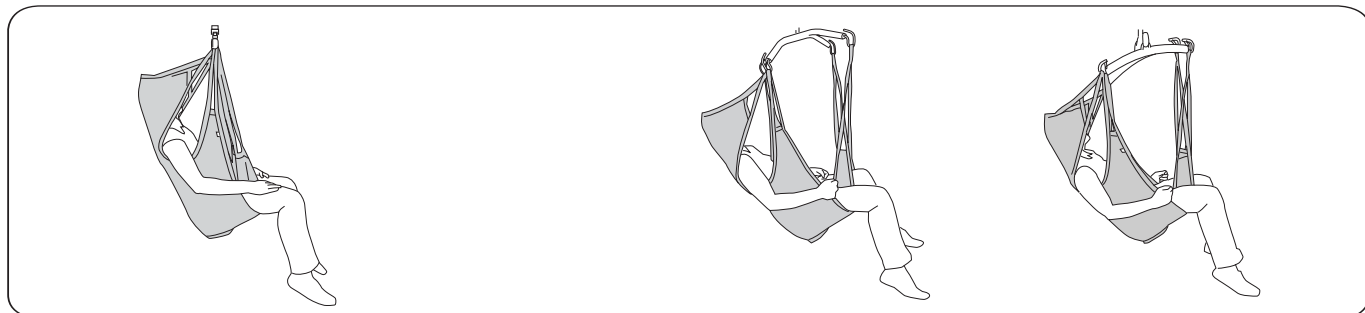


Le harnais Coquille en association avec l'**étrier Universel Liko 350/450** résulte en une position assise légèrement inclinée.

Le harnais Coquille en association avec l'**étrier Croisé Liko 450/670** résulte en une position assise plus inclinée. L'étrier Universel 350/450 en association avec les **étriers latéraux** fournit le même degré de position assise inclinée.

Le patient n'est pas bien assis dans le harnais ; quel est le problème ?

Suivent des conseils d'ordre général puisque les mêmes principes sont valables pour plusieurs modèles de harnais.

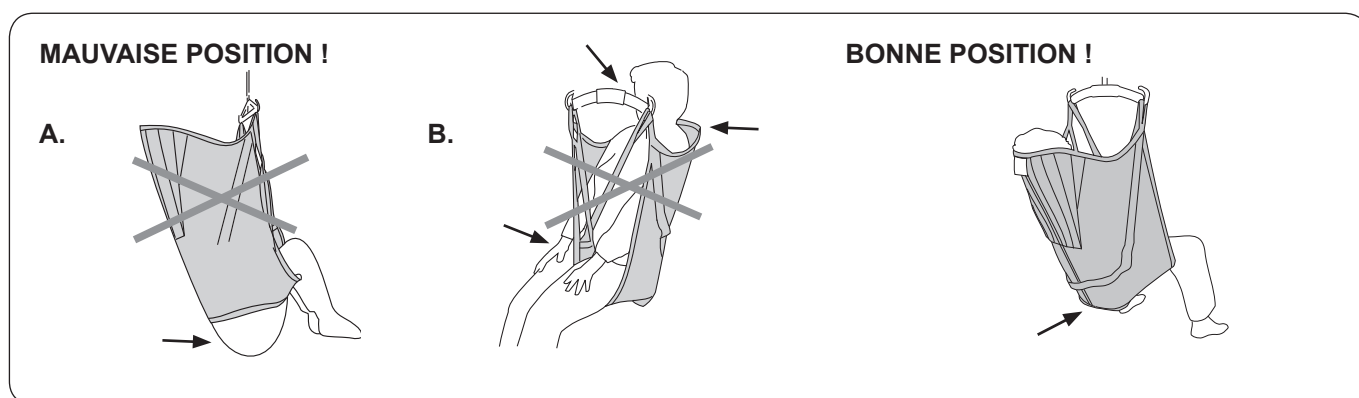

A. Risque de glissement. Le postérieur est affaissé. Le harnais est peut-être trop grand. Ou bien le harnais n'a pas été tiré suffisamment bas le long du dos lors de sa mise en place. Contrôlez, avant de lever, que le bord inférieur est tendu et que le tissu entoure correctement les jambes.

B. Un harnais trop petit peut impliquer que les soutiens de jambes remontent à l'entrejambe et provoquent un inconfort, une trop grande proximité de l'étrier et du visage et/ou un soutien insuffisant de la tête.

Le bord inférieur du harnais se trouve à la hauteur du coccyx. Les soutiens de jambes sont correctement appliqués sous les jambes.

Position de raccourcissement

Dans certains cas, il peut être avantageux de raccourcir la boucle du soutien de jambe pour que le patient soit correctement assis dans le harnais. La position de raccourcissement peut être utilisée de manière temporaire afin de tester la bonne longueur mais un usage prolongé risque d'endommager les coutures de bride. Cependant, si vous souhaitez raccourcir la boucle du soutien de jambe pour un usage à long terme, nous vous recommandons de faire un nœud dans la boucle pour la raccourcir d'environ 10 cm.

Dans ce cas, c'est la boucle extérieure du soutien de jambe qui doit être fixée à l'étrier.

Caractéristiques du harnais Coquille Liko, mod. 22

Désignation	Art. n°	Taille	Poids du patient ¹	Charge max. ²
Harnais Coquille Liko	3522603	XS Extra Small	20-28 kg	200 kg
Harnais Coquille Liko	3522604	S Petit	25-50 kg	200 kg
Harnais Coquille Liko	3522605	M Medium	45-75 kg	200 kg
Harnais Coquille Liko	3522306	L Large	65-100 kg	200 kg
Harnais Coquille Liko	3522614	S Petit	25-50 kg	200 kg
Harnais Coquille Liko	3522615	M Medium	45-75 kg	200 kg

¹Le poids mentionné du patient est une simple indication – il peut y avoir des écarts.

²Pour la charge maximale retenue, un lève-personnes/des accessoires prévus pour la même charge ou une charge supérieure sont requis.

3522-5

- 3 Filet polyester 6 Filet polyester fin
- Indique la taille
- 0 Sans renfort dans les soutiens de jambes
- 1 Soutiens de jambes renforcés

Combinaisons

Combinaisons recommandées entre le harnais Coquille Liko et les étriers Liko :	Mini 220	Petit 350	Universel 350	Standard 450	Universel 450	Universel 600	Large 670	Étrier Universel 670 Twin	Étrier quatre fixations	Étrier Croisé 450	Étrier Croisé 670	Étriers latéraux + Petit 350	Étriers latéraux Universel + Universel 350	Étriers latéraux + Standard 450	Étriers latéraux Universel + Universel 450
Harnais Coquille, XS	1	1	1	2	2	4	3	3	1	1	3	1	1	1	1
Harnais Coquille, S	2	1	1	1	1	3	3	3	1	1	3	1	1	1	1
Harnais Coquille, M	2*	1	1	1	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1
Harnais Coquille, L	2*	1*	1*	1	1	3	1	2	1	1	2	2	1*	1	1

Explications : 1 = Recommandé, 2 = Possible, 3 = Déconseillé, 4 = Inadéquat

* Bras en dehors du harnais

Autres combinaisons

L'association d'accessoires/produits autres que ceux recommandés par Liko peut entraîner des risques pour la sécurité du patient.

Lorsqu'un fabricant recommande les accessoires/produits de Liko conjointement avec ses propres accessoires/produits ou ceux de tiers et que la combinaison n'est pas approuvée par Liko, ce fabricant assume la responsabilité de cette combinaison. Dans cette situation, Liko renvoie aux notices d'emploi et recommandations du fabricant responsable concernant l'usage, la maintenance, le nettoyage, la vérification et l'inspection de la combinaison afin de se conformer aux exigences de la norme EN ISO 10535.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant :

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Suède
info@liko.se

