

Description du produit

La sangle de rehaussement Liko est une sangle de verticalisation confortable facile à utiliser qui nécessite relativement peu de réglages individuels. Elle convient aux patients qui ont besoin d'une aide importante pour se mettre debout mais qui sont ensuite capables de se tenir debout d'eux-mêmes avec stabilité.

La sangle de rehaussement soulève au niveau du dos et sous les bras. L'intérieur est doublé de velours pour éviter que la sangle glisse vers le haut du corps.

La sangle de rehaussement Liko est principalement conçue pour être utilisée en association avec le verticalisateur Sabina équipé de l'étrier 350 (étroit).

Ensemble, le Sabina et la sangle de rehaussement constituent une unité fonctionnelle. Consultez les notices d'emploi des deux produits pour obtenir des informations complètes et les meilleurs résultats.

Tailles

La sangle de rehaussement Liko est disponible en plusieurs tailles. Il est important de choisir la bonne taille pour un maximum de confort et de sécurité.

Ceinture

La sangle de rehaussement est équipée d'une ceinture qui maintient la sangle en position autour du haut du corps pendant la mise en place.

Rembourrage

La sangle de rehaussement est dotée d'une doublure rembourrée en peau de mouton synthétique pour une surface plus douce qui répartit la pression de manière uniforme. La sangle peut être utilisée avec ou sans rembourrage puisque celui-ci, fixé avec une fermeture éclair, est détachable. Des rembourrages de rechange sont disponibles.

⚠ Il doit être prêté la plus grande attention aux textes qui suivent ce signe.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient et celle qui l'aide l'assistant.

 **Lisez la notice d'emploi du harnais et du lève-personnes utilisés. Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.**

Consignes de sécurité

Avant le levage, gardez les points suivants à l'esprit :

- Un responsable au sein de votre établissement doit décider, au cas par cas, si un ou plusieurs assistants sont requis.
- Veillez à ce que le harnais sélectionné réponde aux besoins du patient concernant le modèle, la taille, le tissu et la conception.
- Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utilisez un harnais différent pour chaque patient.
- Préparez l'opération de levage de sorte qu'elle puisse être effectuée aussi sûrement et confortablement que possible.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, faites preuve de précautions : avant de lever le patient depuis la surface d'appui et alors que les sangles sont complètement tendues, assurez-vous que celles-ci sont correctement accrochées aux crochets de l'étrier.
- La hauteur de fonctionnement du verticalisateur varie d'une personne à l'autre.
- Ne laissez jamais un patient sans surveillance dans une situation de transfert.
- Contrôlez que les roues du fauteuil ou du lit sont verrouillées pendant l'opération.
- Travaillez toujours de façon ergonomique. Exploitez la capacité du patient à participer activement aux opérations.
- Lorsque le harnais n'est pas utilisé, ne le laissez pas exposé au soleil.

Dispositif médical de classe I

La sangle de rehaussement Liko a été testée par un institut accrédité et répond aux normes exigées par les directives médicotéchniques pour les produits de classe I et la norme harmonisée EN ISO 10535:2006.

Le système de gestion Hill-Rom est certifié ISO 9001 et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485, ainsi qu'ISO 14001 Environnement.

Design and Quality by Liko in Sweden

Les produits Liko sont sans cesse développés, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans les produits sans information préalable. Contactez votre représentant Liko/Hill-Rom pour des renseignements, des conseils ou d'éventuelles mises à jour.

IMPORTANT !

Lever et transférer une personne comporte toujours un certain risque. Lisez la notice d'emploi du lève-personnes et des accessoires avant utilisation. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'emploi. Seul le personnel formé doit utiliser cet appareil. Assurez-vous que l'accessoire est adapté à l'appareil utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation. En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé des possibilités qu'a ce dernier de faire face à la situation de transfert.

Précautions d'utilisation et entretien

Contrôlez le harnais avant chaque utilisation. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- Tissu
- Sangles
- Coutures
- Boucles de suspension
- Boucle

N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur si vous avez des questions qui restent sans réponse.

Instructions de lavage : reportez-vous à l'étiquette du harnais.


Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est de 1 à 5 ans. Elle varie en fonction du matériau, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si le produit est utilisé ou lavé plus fréquemment qu'à la normale. Consultez le protocole de Liko concernant l'inspection périodique de chaque produit.



Définitions

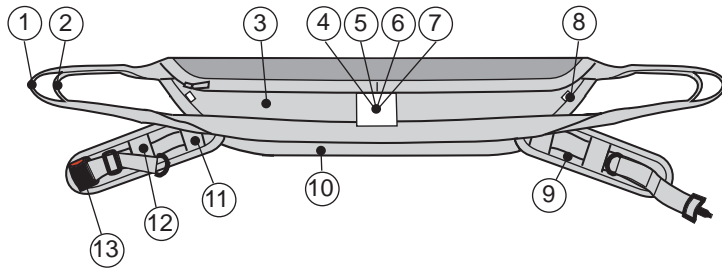

1. Boucle de sangle externe
2. Boucle de sangle interne
3. Sangle externe
4. Étiquette du produit
5. Numéro de série
6. Étiquette : inspection périodique
7. Étiquette : marquage individuel (Belongs to)
8. Indication de taille
9. Ceinture avec coussinets
10. Bord inférieur
11. Guide de sangle interne
12. Guide de sangle externe
13. Boucle

Description du fonctionnement de la ceinture

La ceinture de la sangle de rehaussement est destinée à maintenir la sangle autour du patient et non à lever le patient ou le sécuriser dans la sangle. Si le patient a besoin d'une ceinture pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'opter plutôt pour la sangle de sécurité Liko ou la sangle confort Liko.

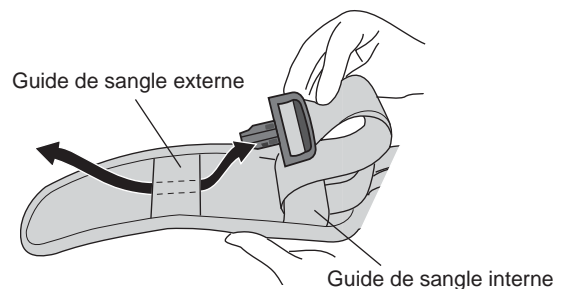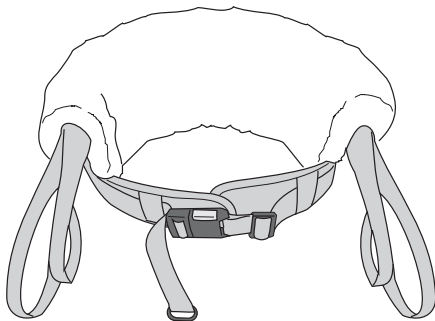

La ceinture de la sangle de rehaussement est destinée à maintenir la sangle autour du patient dans la phase initiale d'une verticalisation.


Lors de la verticalisation, le volume qu'occupe le haut du corps a toujours tendance à diminuer, provoquant la distension de la ceinture et un relâchement de la sangle entourant le haut du corps. Ce phénomène est normal et n'affecte nullement la verticalisation.

△ Si la ceinture est resserrée après la verticalisation du patient, pensez à relâcher la tension avant d'abaisser le patient pour éviter d'exercer trop de pression sur la ceinture lorsque le haut du corps s'élargit.

Si vous rencontrez des difficultés pour régler la ceinture parce qu'elle est plus large que la taille du patient, passez la boucle dans un guide de sangle, ou dans les deux, comme indiqué sur l'illustration.

Description du fonctionnement des boucles de sangle

Boucles de sangle externe

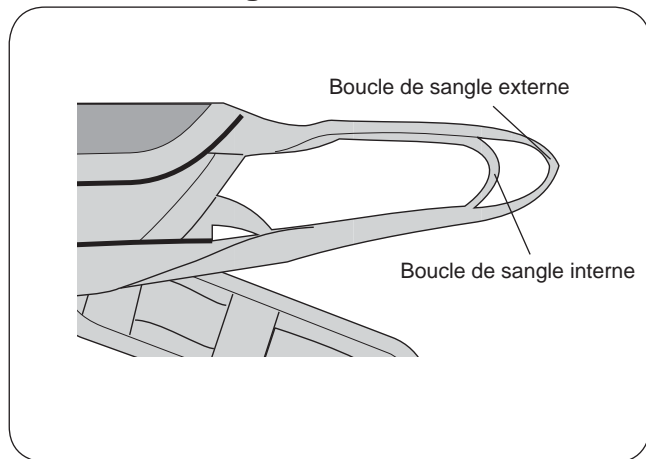


La sangle externe est dotée de deux boucles : une boucle externe et une boucle interne, pour un maximum de flexibilité lors de l'utilisation. En général, il est recommandé d'utiliser la boucle interne afin d'obtenir une position aussi verticale que possible et de permettre au patient d'atteindre l'étrier pour pouvoir participer à la verticalisation.

La boucle de sangle externe est utilisée lorsque le tour de taille du patient l'exige ou si ce dernier est trop petit pour atteindre les crochets de l'étrier sur un Sabina.


Quand la boucle interne est utilisée, nous recommandons aussi d'accrocher la boucle externe au crochet de l'étrier pour disposer d'un meilleur contrôle visuel sur les sangles.

Clips d'œillets

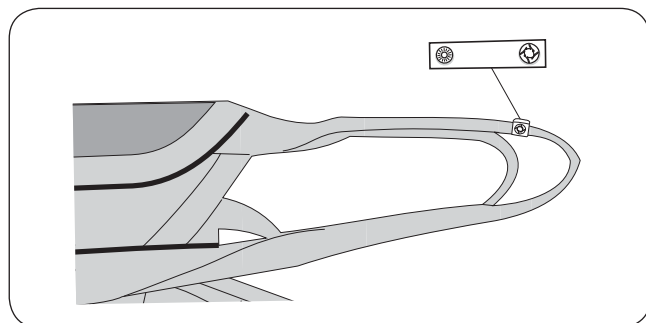

Cet accessoire pratique sert à repérer les boucles/œillets à utiliser pour une personne en particulier. Il est alors plus simple pour les assistants de choisir la bonne boucle/le bon œillet pour fixer l'étrier.


Procéder au levage actif d'une personne avec le Sabina et la sangle de rehaussement Liko

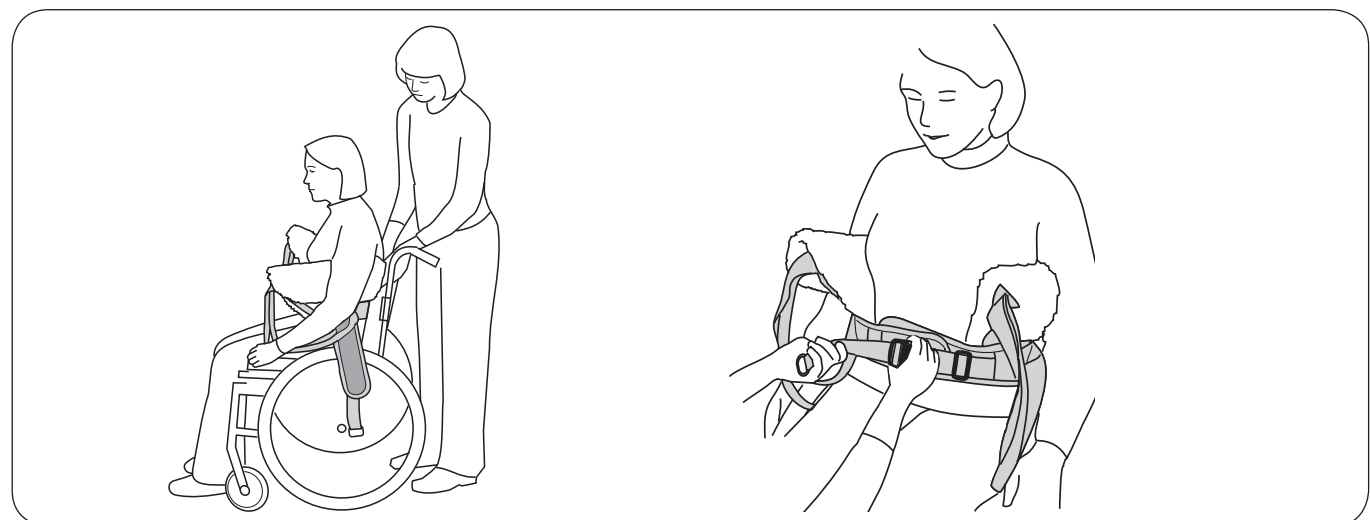

Placez la sangle sur le dos du patient, étiquette du produit vers vous. Le bas de la sangle doit se situer au niveau de la taille du patient.

△ Les bras du patient doivent **toujours** être à l'extérieur de la sangle pour éviter qu'elle glisse vers le haut.

Ajustez la ceinture avec ménagement à la taille du haut du corps du patient. Serrez la boucle de la ceinture.

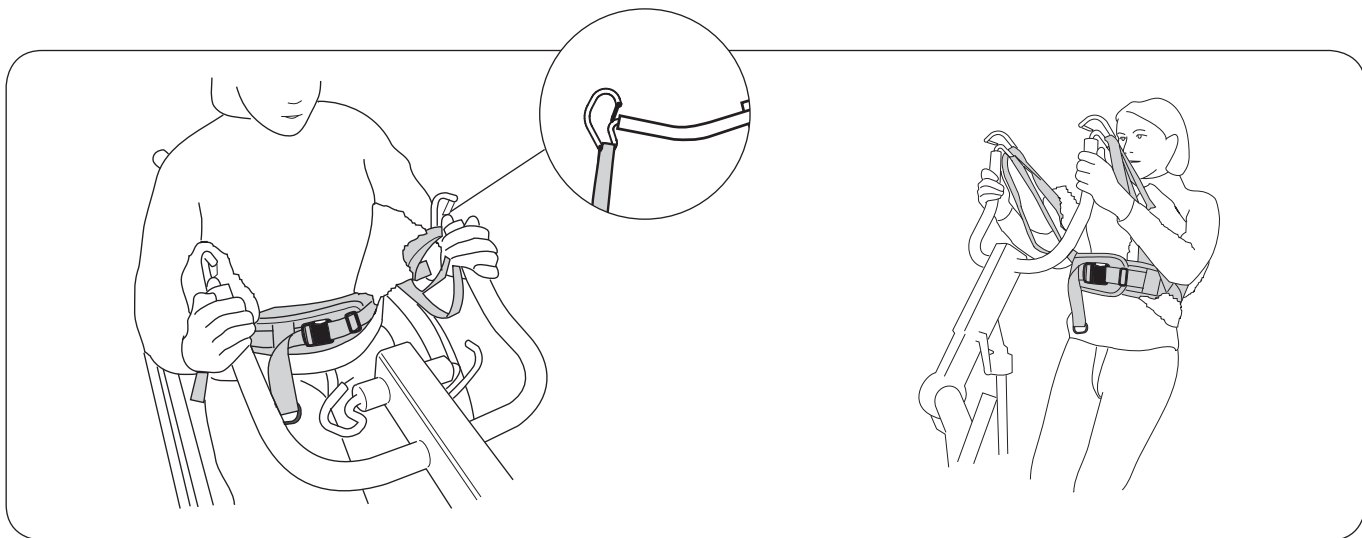


Déterminez la boucle de sangle à attacher aux crochets de l'étrier. Utilisez les clips d'œilletons pour marquer les boucles. Voir page 4, « Description du fonctionnement des boucles de sangle ».

Positionnez le verticalisateur Sabina et réglez l'écartement du piétement de manière à ce que les pieds du patient soient placés au centre du repose-pieds. Les jambes doivent être parallèles à l'appui-jambes du verticalisateur. Ajustez la hauteur et la profondeur de l'appui-jambes pour une poussée confortable sous la rotule. Fixez et serrez la sangle de mollets autour des jambes.

Vous pouvez désormais attacher les boucles de sangle (repérées auparavant) aux crochets de l'étrier.

Verticalisation : Faites fonctionner le verticalisateur à l'aide des touches haut et bas (deux vitesses disponibles). Si possible, le patient doit être encouragé à participer activement au levage en s'agrippant à l'étrier pour se lever par lui-même.

Astuce : Le patient passe plus facilement d'une position assise à debout s'il est assis relativement à la verticale ; autrement dit, si les articulations des hanches sont au même niveau, ou plus hautes de préférence, que les articulations des genoux.

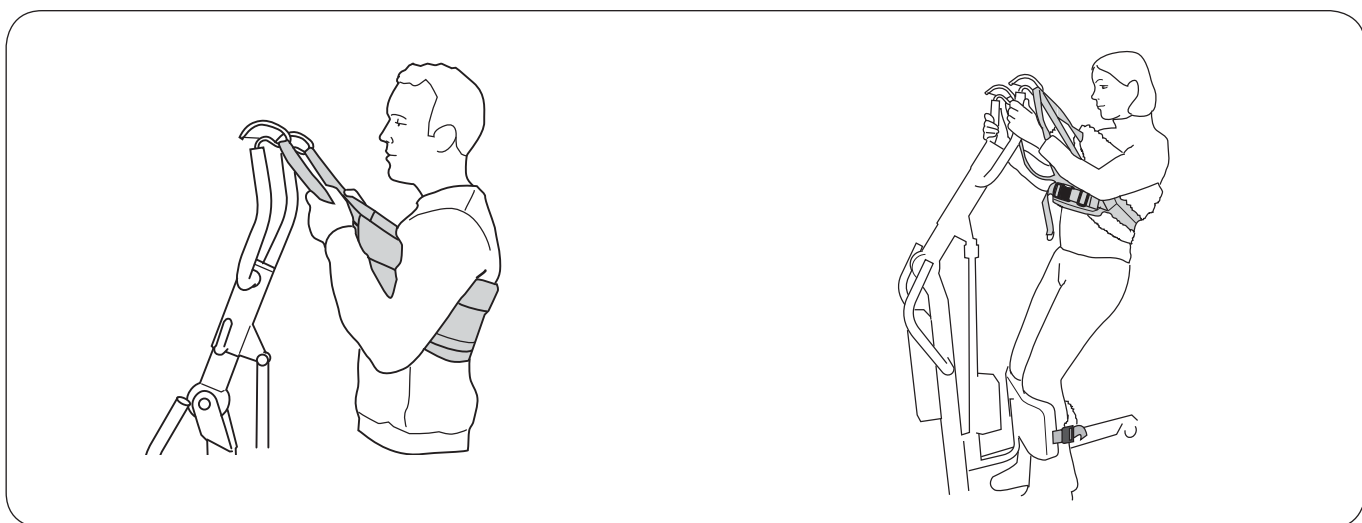

Astuce : Si la sangle glisse vers le haut au cours de la verticalisation, le patient peut s'agripper aux boucles de sangle au lieu de s'agripper à l'étrier. Cela permettra de maintenir la sangle en place et de bien soutenir le dos pendant la verticalisation.

Nous recommandons que le patient se penche légèrement vers l'arrière pour compenser la faiblesse des muscles inférieurs du corps. La verticalisation s'en trouve facilitée, le confort amélioré et la sangle reste en place.

Conseils d'ajustement

Réglages à effectuer pour une verticalisation optimale

La hauteur maximale de levage peut être réglée de la manière suivante :

- Effectuez un réglage individuel de la hauteur de levage. Voir pour cela la notice d'emploi du Sabina.
- Sélectionnez la boucle de sangle interne ou externe sur la sangle externe. Voir page 4, « Description du fonctionnement des boucles de sangle ».
- Taille de la sangle. Plus la sangle est petite, plus la hauteur de levage est élevée.


Conseils pour le choix de la taille

Pour un maximum de confort, la partie douce/rembourrée de la sangle doit bien couvrir le dos et passer sous les bras. Si la sangle est trop grande, il est possible que le patient ne puisse pas s'agripper à l'étrier.

Autres sangles de verticalisation

Si le patient a besoin d'une ceinture pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'opter plutôt pour la sangle de sécurité Liko ou la sangle confort Liko.

Remplacement du rembourrage

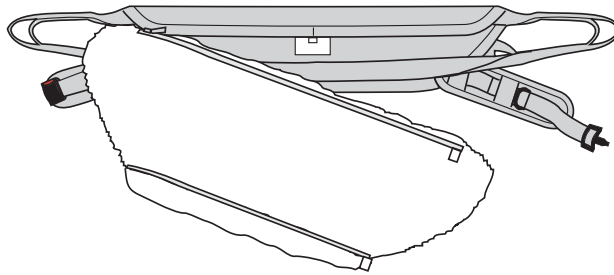

Le rembourrage doux est fixé au moyen d'une fermeture éclair. Il peut être retiré et lavé si nécessaire. Des rembourrages de rechange sont disponibles à l'achat, voir page 7.


Accessoires pour la sangle de rehaussement Liko

Sangle arrière Sabina

Art. n° 3591115

La sangle arrière est un accessoire qui facilite la première phase de la verticalisation. Elle s'accroche à un étrier de sangle arrière pour permettre au patient de monter le siège lors de la verticalisation. En position debout, la sangle arrière peut facilement être ôtée, afin de ne pas gêner, par exemple aux toilettes.


La sangle arrière requiert un accessoire spécifique : L'étrier de sangle arrière (Art. n° 2027006-07). Veuillez à lire attentivement la notice d'emploi de la sangle arrière avant de l'utiliser.

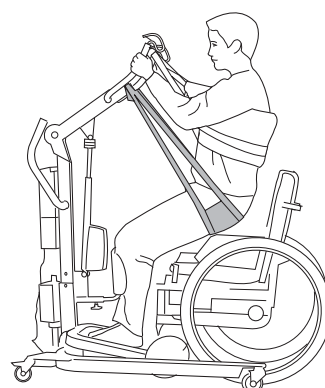

Ceinture d'extension III

Art. n° 3691107

Au besoin, la ceinture de la sangle de rehaussement peut être allongée au moyen d'une ceinture d'extension. Cela représente un allongement de 7 à 48 cm.

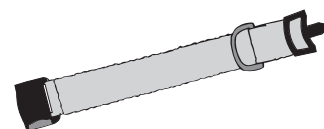


Rembourrage pour sangle, mod. 91 & 93

Rembourrage pour sangle, Petite	Art. n° 3691034
Rembourrage pour sangle, Medium	Art. n° 3691035
Rembourrage pour sangle, Large	Art. n° 3691036
Rembourrage pour sangle, Extra Large	Art. n° 3691037




Clips d'œillets

Clips d'œillets, rouges, 4 unités	Art. n° 3666033
Clips d'œillets, oranges, 4 unités	Art. n° 3666034
Clips d'œillets, jaunes, 4 unités	Art. n° 3666035
Clips d'œillets, bleus, 4 unités	Art. n° 3666036
Clips d'œillets, noirs, 4 unités	Art. n° 3666037

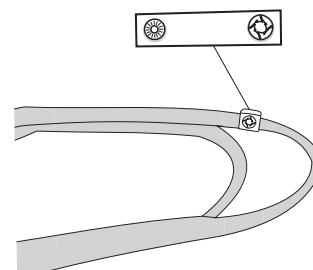

Caractéristiques de la sangle de rehaussement Liko, mod. 91

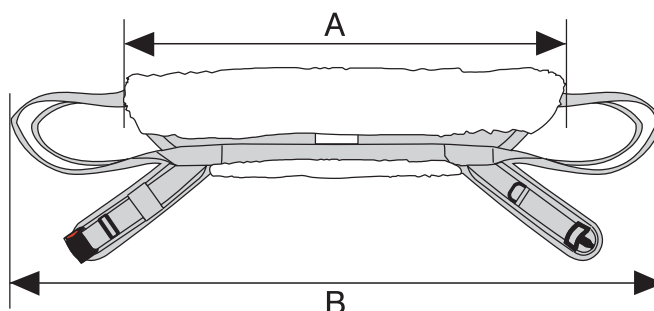

Désignation	Art. n°	Taille		Largeur de sangle		Poids du patient ¹	Charge max. ²
Sangle de rehaussement Liko	3591134	S	Petite	A: 80 cm	B: 130 cm	< 60 kg	200 kg
Sangle de rehaussement Liko	3591135	M	Medium	A: 90 cm	B: 140 cm	50-80 kg	200 kg
Sangle de rehaussement Liko	3591136	L	Large	A: 105 cm	B: 155 cm	70-100 kg	200 kg
Sangle de rehaussement Liko	3591137	XL	Extra Large	A: 120 cm	B: 160 cm	> 100 kg	200 kg

¹ Le poids et la taille mentionnés sont une simple indication – il peut y avoir des écarts.

² Pour conserver la charge maximale, un lève-personnes/des accessoires prévus pour la même charge ou une charge supérieure sont requis.

Combinaisons

La sangle de rehaussement est conçue uniquement pour les verticalisateurs Sabina de Liko (différents modèles disponibles). Nous recommandons le Sabina en association avec l'étrier Sabina 350 (étroit).

Autres combinaisons

L'association d'accessoires/produits autres que ceux recommandés par Liko peut entraîner des risques pour la sécurité du patient.

Lorsqu'un fabricant recommande les accessoires/produits de Liko conjointement avec ses propres accessoires/produits ou ceux de tiers et que la combinaison n'est pas approuvée par Liko, ce fabricant assume la responsabilité de cette combinaison. Dans cette situation, Liko renvoie aux notices d'emploi et recommandations du fabricant responsable concernant l'usage, la maintenance, le nettoyage, la vérification et l'inspection de la combinaison afin de se conformer aux exigences de la norme EN ISO 10535:2006.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant :

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

