

Description du produit

La notice d'emploi est valable pour le harnais Corset Liko et le harnais Corset Oursons mais tout au long du texte, nous utiliserons l'appellation harnais Corset Liko.

Le Harnais Corset est un harnais de verticalisation développé par Liko pour aider à la verticalisation des personnes qui ont l'aide d'un "corset" pour se tenir debout. Le harnais Corset est conçu de telle façon qu'il soulève le patient et le corset en même temps, de façon sûre, indépendamment de la construction du corset, c'est-à-dire qu'on n'effectue ni fixation ni autre action sur le Corset.

L'entrejambe joint est attaché entre les jambes et constitue une sécurité supplémentaire en empêchant le harnais Corset de glisser vers le haut.

Une fois verticalisé, le patient peut se tenir dans un support pour corset ou dans un corset-siège roulant.

Le harnais Corset Liko en tailles enfant XS et S est fabriqué dans un tissu polyester imprimé oursons, d'où le nom harnais Corset Oursons. La taille M est en polyester vert.

Le harnais Corset est destiné à être utilisé avec les lève-personnes plafonniers Liko ou avec le lève-personnes mobile Golvo. Dans certains cas, une combinaison avec Uno ou Viking peut convenir.

Pour transférer un patient vers/depuis le corset, on utilise un harnais adéquat, choisi selon les aptitudes du patient et son besoin de soutien. Dans cette notice, nous présentons le transfert avec le harnais Coquille Liko, un harnais fin et souple qui offre un soutien pour tout le corps.


Consultez notre site internet www.liko.com pour obtenir de l'information sur les nouveautés et tout notre assortiment.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient, et celle qui aide, l'assistant.

△ Il doit être prêté la plus grande attention aux textes qui suivent ce signe.

 Lire les notices d'emploi du harnais et du lève-personnes utilisés. Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.

Description du harnais Corset Liko


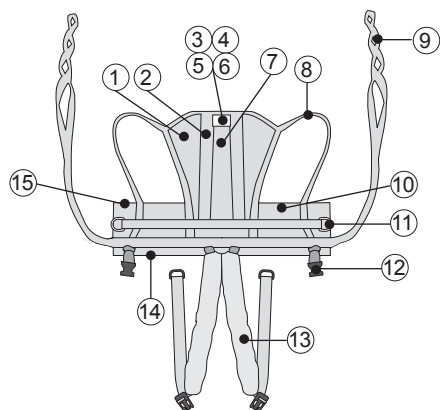


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Soutien de tête | 8. Sangle de décharge |
| 2. Lattes | 9. Sangle-oeillet |
| 3. Étiquette du produit | 10. Veste |
| 4. Numéro de série | 11. Oeillets en métal |
| 5. Étiquette : inspection périodique | 12. Fermeture avant de l'Entrejambe |
| 6. Étiquette : marquage individuel (Belongs to) | 13. Entrejambe avec doublure |
| 7. Marquage de taille | 14. Bord inférieur |
| | 15. Bord supérieur |

△ N'oubliez pas!



- Un ou plusieurs assistants peuvent être nécessaires, selon les cas.
- Veillez à ce que le harnais sélectionné réponde aux besoins du patient concernant le modèle, la taille, le tissu et la conception.
- Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utilisez un harnais différent pour chaque patient.
- Planifier l'opération, avant de lever, de façon à ce que cela se fasse de la manière la plus sûre et simple possible.
- Avant le levage, vérifiez que l'accessoire de levage est suspendu verticalement et peut être manœuvré librement.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, il est important de contrôler que les sangles sont bien accrochées à l'étrier quand les sangles sont tendues, mais avant que le patient ne soit soulevé!
- Ne jamais soulever un patient plus haut que l'opération ne le nécessite.
- Contrôlez que le patient est assis en toute sécurité dans le harnais avant le transfert vers un autre endroit.
- Ne jamais laisser un patient sans surveillance lors d'une situation de levage.
- Contrôler que les roues du lit, de la couchette etc sont bloquées pendant l'opération.
- Travaillez toujours de façon ergonomique.

Mode d'emploi

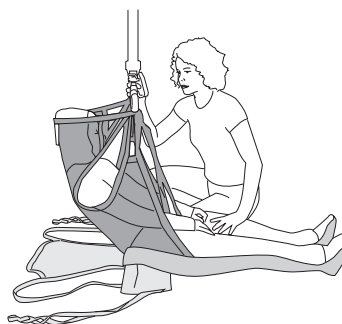
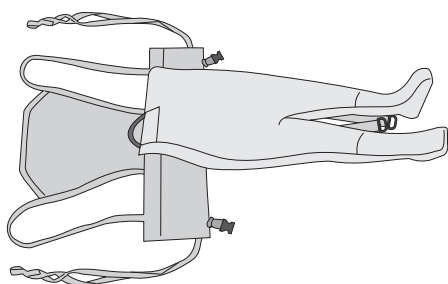


Placez le harnais Corset sur le sol et placez le corset au-dessus du harnais de telle façon que son bord supérieur se trouve légèrement plus haut que le bord supérieur du Corset. Tirez les sangles de l'Entrejambe de façon à ce qu'elles soient à portée de mains entre les jambes du corset.



Descendez le patient de façon à ce que les jambes et les pieds se retrouvent dans la bonne position dans le corset. Continuez d'abaisser doucement jusqu'à ce que le patient soit étendu et faites attention qu'il/elle reçoive le soutien nécessaire pour la tête. Fixez le corset autour du patient selon les instructions en vigueur.

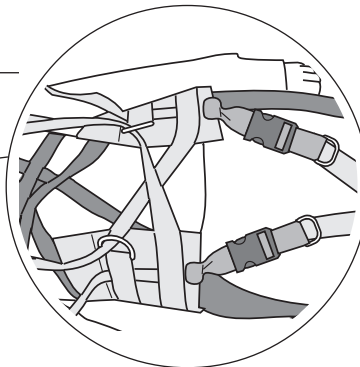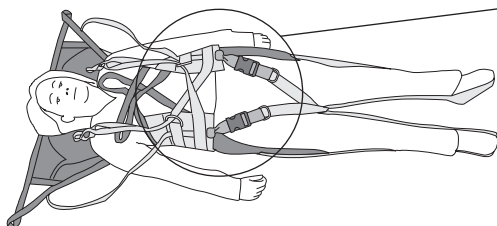

Si l'on peut, on laisse le harnais autour du patient, mais les soutiens de jambes peuvent être rectifiés de façon à ne pas gêner. Saisissez les sangles-oeillets et croisez-les, enfoncez chacune d'elle dans un oeillet de métal. Attachez les boucles de l'Entrejambe et ajuster la longueur de l'Entrejambe.

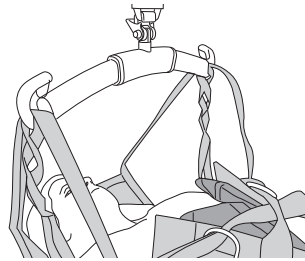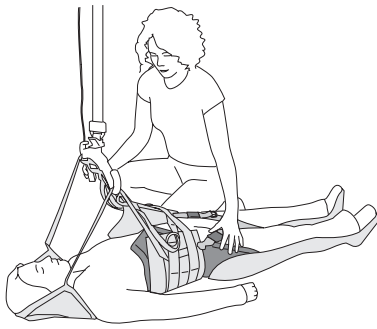


Accrochez les oeillets de sangle choisis, voir les conseils d'essayage ci-dessous. Accrochez ensuite les sangles de décharge et remontez le lève-personnes jusqu'à ce que les sangles soient tendues. Contrôlez que les sangles de décharge peuvent se mouvoir librement au-dessus des sangles-oeillets pendant la suite de la verticalisation.

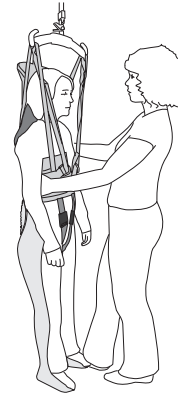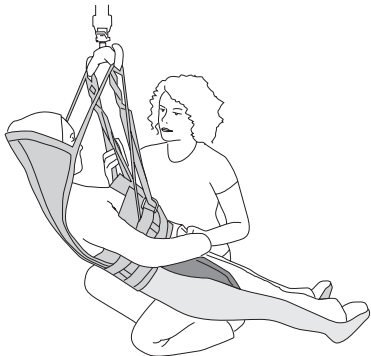


Poursuivez la verticalisation, tenez les mains du patient devant le corps si nécessaire. Faites attention au soutien de la tête et à ce que les sangles de décharge soient libres dans les crochets de l'étrier. Resserrez l'Entrejambe si nécessaire, par exemple si la veste a tendance à glisser vers le haut.

En position debout, le patient doit être fixé, par exemple dans un support ou à une table haute. Au besoin, retirez de l'étrier les oeillets du harnais Corset. Une fois les exercices terminés, le patient est redescendu et transféré par exemple vers sa chaise roulante en pratiquant l'opération inverse.

Conseils d'essayage

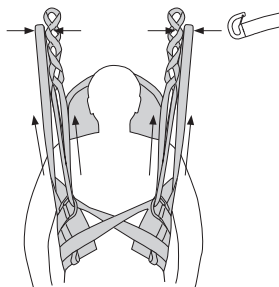

Lorsque le harnais Corset est appliqué autour du patient et que le corset ainsi que les sangles-oeillets sont enfilés en conformité avec la notice, les sangles-oeillets doivent atteindre le point le plus haut de la sangle de décharge, toutes les sangles étant tendues. Choisissez l'oeillet qui correspond à la longueur de la sangle de décharge. En cas d'incertitude, il est préférable de choisir l'oeillet dont la partie supérieure est le plus près sous le point le plus haut de la sangle de décharge.

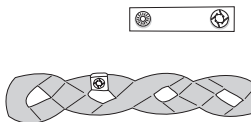

Clips d'oeillets

Un accessoire pratique pour marquer les oeillets essayés pour une personne particulière. Cela facilite, pour les assistants, le choix du bon oeillet à accrocher sur l'étrier.

Accessoires

Manchon rembourré

Art. n° 3666021

Des manchons rembourrés existent comme accessoires, pour être appliqués sur les sangles de décharge avant, dans les cas où le patient est gêné par leur pression sur le corps.

Les manchons rembourrés sont équipés d'une bande velcro sur l'un des côtés, pour une mise en place facile.



Harnais Corset Liko, mod. 67

Article	Art. n°	Taille	Matériau	Poids de la personne ¹	Charge max. ²
Harnais Corset Oursons	3567812	XXS Extra Extra Small	Polyester imprimé oursons	< 15 kg	200 kg
Harnais Corset Oursons	3567813	XS Extra Small	Polyester imprimé oursons	10-20 kg	200 kg
Harnais Corset Oursons	3567814	S Small	Polyester imprimé oursons	20-40 kg	200 kg
Harnais Corset Liko	3567115	M Medium	Polyester	40-60 kg	200 kg
Harnais Corset Liko	3567116	L Large	Polyester	60-80 kg	200 kg

¹ Le poids mentionné est une simple indication – Il peut y avoir des écarts.

² Pour la charge maximale retenue, un lève-personnes/des accessoires prévus pour la même charge ou une charge supérieure sont requis.

Lors du choix de la taille, il doit être tenu compte du fait que le corset a besoin d'espace à l'intérieur du harnais.

Conseils de lavage: Voir l'étiquette du harnais.

Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est de 1 à 5 ans. Elle varie en fonction du matériau, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si le produit est utilisé ou lavé plus fréquemment qu'à la normale. Consultez le protocole de Liko concernant l'inspection périodique de chaque produit.

Combinaisons

Combinaisons recommandées entre le Harnais Corset Liko et les étriers Liko:

	Étrier Mini 220 Universel 350 Petit 350 Universel 450 Standard 450 Universel 600 Large 670 Univ. 670 Twin							
Harnais Corset Oursons, XXS	1	1	1	1	1	3	3	3
Harnais Corset Oursons, XS	1	1	1	1	1	3	3	3
Harnais Corset Oursons, S	1	1	1	1	1	3	3	3
Harnais Corset Liko, M	2	1	1	1	1	3	3	3
Harnais Corset Liko, L	2	1	1	1	1	3	2	3

Explications:

- 1 Recommandé
- 2 Possible
- 3 Déconseillé
- 4 Inadéquat

Les combinaisons avec le harnais Corset Liko et l'étrier Quatre fixations, l'étrier Croisé 450/670 ou les étriers Latéraux sont inadéquates.

Autres combinaisons

L'association d'accessoires/produits autres que ceux recommandés par Liko peut entraîner des risques pour la sécurité du patient.

Lorsqu'un fabricant recommande les accessoires/produits de Liko conjointement avec ses propres accessoires/produits ou ceux de tiers et que la combinaison n'est pas approuvée par Liko, ce fabricant assume la responsabilité de cette combinaison. Dans cette situation, Liko renvoie aux notices d'emploi et recommandations du fabricant responsable concernant l'usage, la maintenance, le nettoyage, la vérification et l'inspection de la combinaison afin de se conformer aux exigences de la norme EN ISO 10535.

CE Produit médico-technique de classe I

Les produits Liko sont sans cesse développés, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans les produits sans information préalable. Contactez votre représentant Liko pour des renseignements, des conseils ou d'éventuelles mises à jour.

⚠ Important!

Lever et transférer une personne comporte toujours un certain risque. C'est pourquoi les notices d'emploi du lève-personnes et de ses accessoires doivent être étudiées attentivement. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'emploi, et seul le personnel informé doit utiliser cet équipement.

Assurez-vous que l'accessoire est adapté à l'appareil utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation.

En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé des possibilités qu'a ce dernier de faire face à la situation de transfert.

Contrôlez le harnais régulièrement, spécialement après lavage, et plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages des coutures, des tissus, des sangles et des boucles.

Ne pas utiliser d'accessoires endommagés.

Si vous avez des questions, contactez le fabricant ou le fournisseur.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

