

Multirall 200



Système de levage plafonnier portable/réversible

Multirall est imbattable en tant que système de levage plafonnier simple et portable qui ne fait pas de compromis sur la sécurité ou la fonctionnalité. En outre, il fonctionne parfaitement pour transférer d'une pièce à l'autre. Le système de fixation rapide de Liko est la clé de cette souplesse remarquable.

Multirall peut être installé sur un système de rails de deux manières différentes.

- Suspendez Multirall dans un chariot de traverse directement sur le système de rails. Il fonctionne exactement comme un lève-personnes plafonnier conventionnel.
- Montez-le dans l'autre sens, avec la sangle de levage fixée sur le chariot de traverse, et Multirall devient aisément portable. En outre, il permet des transferts d'une pièce à l'autre, avec une seule unité de levage.

Un chariot pratique de transfert et de stockage est disponible en option.

Le Bras d'Assistance facilite l'installation du lève-personnes dans le système de rails. Il est réglable pour s'adapter à différents utilisateurs.





D'une pièce à l'autre avec Multirall

Approchez le patient autant que possible de la porte.

Fixez la Griffe à la sangle pendulaire et abaissez le lève-personnes. Le poids du patient est alors progressivement transféré vers la sangle pendulaire.



Lorsque le poids du patient est totalement transféré sur la sangle pendulaire, la sangle de levage est décrochée de la fixation rapide dans la pièce 1.

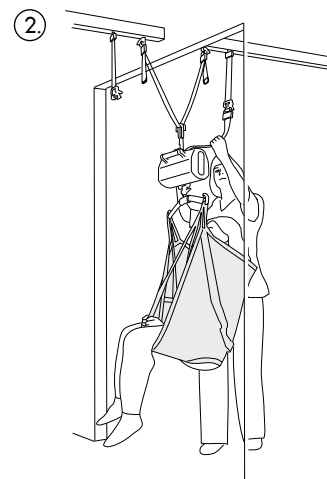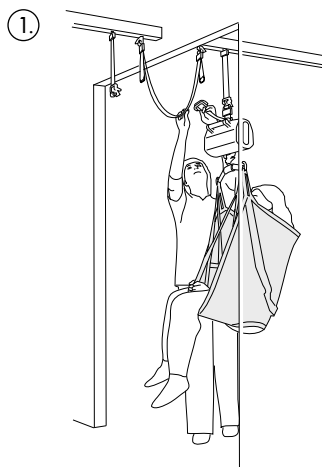

Raccordez la sangle de levage à la fixation rapide dans la pièce 2 et remontez la sangle.

Le patient est transféré vers la pièce 2.

Lorsque le patient se trouve entièrement dans la pièce 2, détachez la Griffe de la sangle pendulaire.

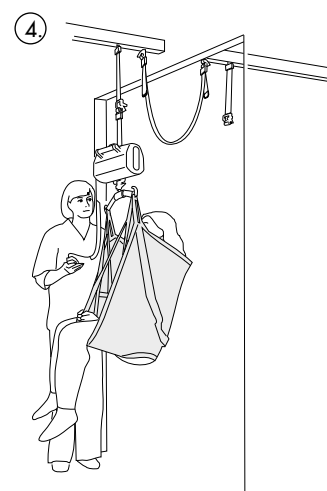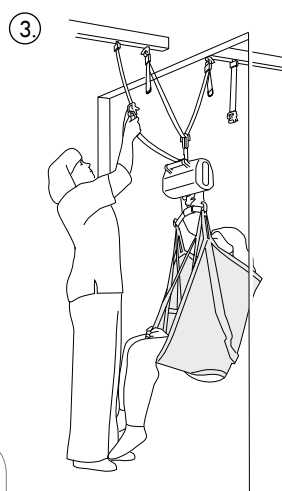

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de levage : 200 kg

Intervalle de levage : 160 cm

Batteries : 2 accumulateurs au plomb hermétiques à valves, (batteries à gelée) 12 V 2,6 Ah

Poids : 8,7 kg, batterie incluse (1,9 kg)

Contactez Liko pour plus d'informations



Multirall a été testé par un institut accrédité et répond aux normes exigées par les directives medicotechniques pour les produits de classe I (MDD 93/42/CEE). Multirall est homologué EN ISO 10535, CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, UL-60601-1 et CAN/CSA C22.2 n° 601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



www.liko.com

Fabricant :

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå
Suède
info@liko.se

Distributeur en France :

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Distributeur en Suisse :

Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23
info@liko.ch



A Hill-Rom Company