

RollOn



Debout seul sur ses jambes

De même que la capacité de se mouvoir varie, les besoins d'aide diffèrent beaucoup. Liko a toujours été proche des usagers, ce qui donne continuellement de bonnes idées pour résoudre les problèmes. C'est exactement de cette façon que nous avons également conçu RollOn, l'aide parfaite pour ceux qui ont des difficultés à marcher mais qui ont suffisamment de force dans les bras pour pouvoir se relever et se tenir eux-mêmes sur leurs jambes.

RollOn est beaucoup plus qu'une aide utile et sûre, il peut aussi jouer un rôle important dans le travail de rééducation ou comme soutien provisoire à l'équilibre et au transfert dans différentes situations de soins. RollOn contribue à un entraînement actif pendant la verticalisation, sans pénibilité pour l'assistant.

Comme beaucoup d'autres produits Liko, RollOn est construit en aluminium et est ainsi facile à manoeuvrer et facile à nettoyer. Grâce au cadre de soutien entourant l'utilisateur, celui-ci se tient debout avec stabilité dans toutes les directions.



Là où vous voulez aller

On peut dire de RollOn que c'est un appareil de verticalisation pratique, conçu pour des transferts en toute sécurité vers ou depuis une position assise. Il fonctionne parfaitement comme moyen d'aide vers les toilettes ou entre le lit et une chaise.

RollOn peut aussi être une bonne alternative au fauteuil roulant lors d'une situation où l'utilisateur peut représenter un danger pour lui-même ou pour un assistant. Par exemple quand l'utilisateur se relève après une opération ou même après un accouchement, en d'autres termes lorsque l'équilibre fait temporairement défaut. RollOn constitue également une aide utile quand on veut aider un usager qui a glissé vers l'avant de son fauteuil roulant à se remettre en position normale.



Depuis le lit



Quand l'utilisateur veut se relever du lit, il place ses pieds sur le repose-pieds de RollOn et agrippe les poignées. Il se penche légèrement en avant et se met debout. Un lit réglable facilite la verticalisation. Il est toujours plus facile de se relever d'un peu plus haut. L'assistant rabat les coussins d'assise du bassin et déplace l'utilisateur là où celui-ci veut aller.

Vers une meilleure position



Vers les toilettes ►

RollOn est l'aide sécurisante quand il est temps d'aller aux toilettes.

Tranquillement, arrivé près de la cuvette des toilettes, il est facile de relever le cadre d'assise et d'aider au déshabillage.

Il arrive trop souvent qu'un usager glisse vers l'avant de son fauteuil roulant et se retrouve dans une position inconfortable. Avec l'aide de RollOn, l'utilisateur peut lui-même se remettre au fond de son siège de façon simple et souple, sans pénibilité pour l'assistant.



RollOn – plus sûr que d'autres



Coussin thoracique
Offre sécurité et soutien à l'avant.

Construction
RollOn est construit en aluminium – un matériau léger, respectueux de l'environnement et économique.

Verrou de sécurité
Verrouille le cadre d'assise dans une position sûre.

Appui-jambes
Des coussinets doux et confortables qui s'articulent pour s'adapter automatiquement à la position des jambes. Ajustable en hauteur et en profondeur pour apporter un maximum de confort et de sécurité.

Hygiénique
Toutes les surfaces sont lisses et nettoyables à l'alcool. RollOn supporte le jet et peut même être utilisé dans la douche.

Roues
Les roues jumelles très maniables sont verrouillables pour assurer une position stable.

Coussins d'assise du bassin
Offrent sécurité et soutien à l'arrière.

Cadre d'assise
Un encadrement sûr qui est ajustable en hauteur pour s'adapter aux usagers de petite taille comme à ceux de grande taille.

Repose-pieds
Est stable et anti-dérapant. Facile à nettoyer.

Piètement
Ajustable pour s'adapter parfaitement par exemple au fauteuil roulant ou au fauteuil favori.

Sécurité totale vers l'arrière



Une des fonctions qui rendent RollOn unique, ce sont les ingénieux coussins d'assise du bassin. Ils font en sorte qu'il soit facile de rentrer et de sortir de RollOn sans négliger la sécurité. Ils facilitent également le déshabillage et l'habillage, par exemple lors des visites aux toilettes. Quand l'utilisateur a pris sa position, les coussins se referment simplement derrière le bassin et s'assurent par une simple manipulation.

Réglable, tout simplement



Ouverture des pieds

Le piètement s'ouvre facilement à l'aide d'un mouvement du pied. Généralement, on n'a pas besoin de fixer la position puisque RollOn est stable dans toutes les directions. Le repose-pieds est équipé d'un motif anti-dérapant et peut facilement s'enlever pour être nettoyé.

Adapté à l'individu

Pour convenir aussi bien aux usagers de petite taille qu'à ceux de grande taille, RollOn a différentes possibilités de réglage et plusieurs prises alternatives que l'utilisateur peut utiliser pendant la verticalisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale :	160 kg
Poids total:	24 kg
Largeur du piètement:	62- 90 cm
Longueur du piètement:	89 cm
Hauteur du piètement :	11 cm
Roues (jumelles) :	75 mm
Matériau:	Aluminium



Assis dans son fauteuil favori



Vous avez maintenant eu un aperçu des possibilités de l'appareil de verticalisation RollOn. En même temps, nous vous avons un peu présenté la façon dont raisonne Liko, que nous partons par exemple toujours du besoin ou du problème quand nous développons nos produits et nos méthodes. Un produit ne résout pas seul le problème. Les produits doivent toujours être enrichis de savoir-faire sous différentes formes, alors seulement le résultat peut être un succès et quelqu'un peut se détendre un moment dans son fauteuil favori.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur RollOn et sur d'autres éléments de notre large gamme de produits et de savoir-faire.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå
Schweden
info@liko.se

Distributor in France:

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0)3 83 22 82 32
Fax: +33 (0)3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Distributor in Switzerland:

Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 61-4822222
Fax: +41 (0) 61-4821923
info@liko.ch

 **Liko**
A  Company