



# RollOn

## Fiche d'utilisation

Français

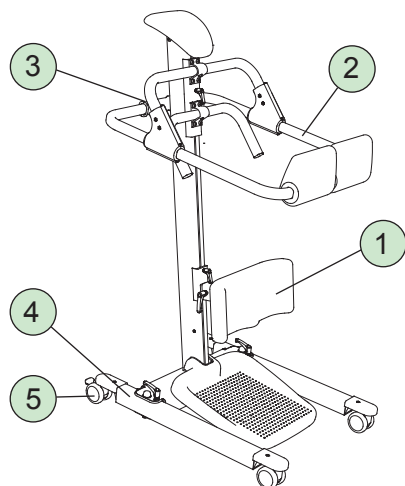

3 Verrou de sécurité

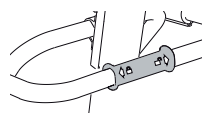

### Consignes de sécurité

- Lisez la notice d'emploi avant utilisation.
- Assurez-vous, avant le transfert, que les bons réglages ont été faits et que l'utilisateur est bien positionné dans l'appareil de verticalisation.
- Assurez-vous, avant le transfert, que toutes les poignées de verrouillage sont correctement fixées.
- En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité de l'utilisateur. Vous devez être informé des possibilités que ce dernier a de faire face à la situation de transfert avec RollOn.
- **Charge maximale: 160 kg**


Ne jamais laisser un usager sans surveillance dans une situation de transfert.



### IMPORTANT !


Cette fiche d'utilisation ne remplace pas la notice d'emploi de RollOn, qui peut être téléchargée depuis [www.liko.com](http://www.liko.com).

### 1 Appui-jambes

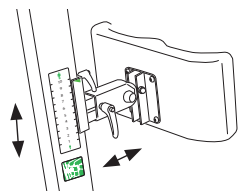

#### Réglage


Le réglage peut se faire en hauteur et en profondeur.

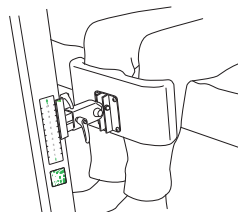

#### Essai

Ajuster la hauteur de façon à ce que l'appui-jambes offre une pression confortable juste sous la rotule. Au besoin, la profondeur de l'appui-jambes peut également être ajustée.


### 2 Cadre d'assise

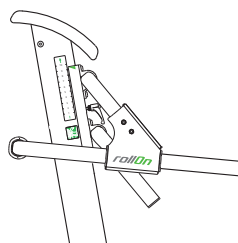

#### Réglage


Le réglage peut se faire en hauteur.

#### Essai

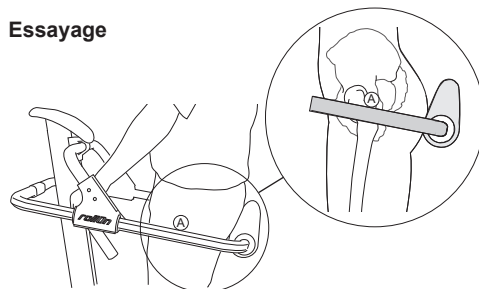


Le cadre doit se trouver juste au-dessous de la tête de fémur/de l'articulation de hanche (A) pour éviter que l'utilisateur ne glisse ou qu'il puisse s'asseoir sur les coussins d'assise du bassin.

### 3 Verrou de sécurité

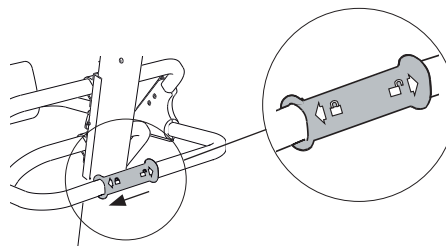


**⚠ Le verrou de sécurité doit être fermé pendant le transfert de l'utilisateur.**

### 4 Piètement

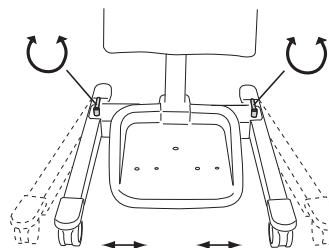

### 5 Verrouillage des roues

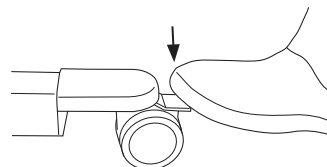

**⚠ Verrouillez les roues pendant la verticalisation.**

### Domaines d'utilisation:

- entre le lit et la chaise/le fauteuil roulant
- entre la chaise/le fauteuil roulant et les toilettes
- au fond de la chaise/du fauteuil roulant.

RollOn couvre la zone des besoins entre un déambulateur traditionnel et un verticalisateur.

### Problèmes lors de l'utilisation

Si l'utilisateur n'a pas la force d'effectuer lui-même la verticalisation, nous recommandons d'utiliser un lève-personnes, en premier lieu le verticalisateur Sabina de Liko.

### Ergonomie

- ! Pas de transferts manuels – laissez l'utilisateur et l'appareil de verticalisation faire le travail.
- ! Ne vous stressiez pas – travaillez calmement et méthodiquement.
- ! Ménagez votre dos – travaillez debout avec le dos droit.
- ! Évitez la torsion du dos – bougez les pieds.
- ! Utilisez moins les bras leviers – travaillez à proximité.

### Nettoyage

Au besoin, nettoyer RollOn à l'eau chaude ou à l'alcool. Faire en sorte que les roues n'aient pas de saletés et de cheveux.

### Autres fiches d'utilisation

Les fiches d'utilisation Liko peuvent être téléchargées depuis [www.liko.com](http://www.liko.com).



[www.liko.com](http://www.liko.com)

Distributeur en France:

**SAS Liko France**  
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32  
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38  
[info@liko-france.fr](mailto:info@liko-france.fr)

Distributeur en Suisse:

**Liko Care AG**  
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22  
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23  
[info@liko.ch](mailto:info@liko.ch)

7FR175501-01