



Cuidados e Manutenção das Fundas Liko

Português
7PT160884-02
2012-06-11

As fundas da Liko são previstas para utilização individual. Para evitar possíveis transmissões de doenças infecciosas, é importante limpar a funda se estiver suja ou se vai ser utilizada por outro paciente.

As fundas da Liko são fabricadas em vários tecidos diferentes, com características variadas. As fundas devem ser lavadas à máquina. As temperaturas de lavagem e secagem encontram-se na etiqueta de produto. A funda deve ser seca logo que possível a seguir à lavagem, de preferência numa máquina de secar ou armário de secagem. No que se refere à secagem, há alguns produtos que podem ser secos à máquina e outros que podem ser secos a temperaturas mais altas.

Várias fundas da Liko incluem material de reforço, como por exemplo, nos apoios de pernas e apoios de costas/cabeça. Este material pode ser lavado a 60-80°C. A temperaturas mais altas, o material de reforço pode ficar deformado, mais compacto, causando assim desconforto. A segurança geral da funda não é afetada.

É importante seguir as instruções de cuidados e manutenção recomendadas. De outra forma, a garantia será invalidada e a longevidade da funda reduzida.

Instruções de Lavagem

Seguir as instruções de lavagem na etiqueta de produto da funda.



Remover os ripas de plástico (onde aplicável).



Poderá fazer uma pré-lavagem a temperaturas baixas 25-30°C, se necessário. Algumas nódoas desaparecem mais facilmente a temperaturas baixas.



Lavar à máquina na temperatura indicada. Utilizar detergente.



Secar à máquina a temperatura baixas, no máximo 50°C, ou secar num armário de secagem.



Não usar agente de branqueamento de cloro.



Não lavar a seco.



Não passar a ferro.

Limpar com Álcool

Recomendamos etanol com 70% ou isopropanol com 45% para limpar os ripas de plástico e artigos feitos de tela revestida de plástico. Os ripas de plástico também podem ser lavados com sabão solúvel em água. Deve ter em atenção que algumas peças, como por exemplo bandas e costuras podem ser feitas de um material diferente e devem por isso ser lavadas na máquina para ficarem bem lavadas.

Desinfecção


Para desinfecção térmica, lavar a 65°C durante pelo menos 10 minutos ou a 71°C durante 3 minutos no mínimo. Recomendamos que acrescente 8 minutos nas duas alternativas, para assegurar que o calor penetra o tecido e assim a sua desinfecção. É importante terminar o programa de lavagem com um ciclo de água.

(Ref. HSG (95)18: Hospital Laundry Arrangements for Used and Infected Linen, Department of Health, NHS).

Inspecionar a funda depois da lavagem

Inspecionar todos os pontos para verificar se apresentam desgaste ou danos:

- Tecido
- Bandas
- Costuras
- Anéis de suspensão
- Fivelas (se aplicável)

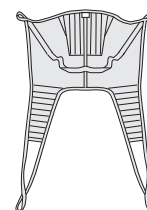

A funda tem uma durabilidade limitada, sendo uma parte importante para a segurança. Não utilizar fundas danificadas. O protocolo para as inspeções periódicas pode ser usado como orientação sobre quais são as peças mais importantes a verificar para cada modelo de funda. Fundas feitas em poliéster têm uma durabilidade mais longa do que fundas feitas em tela de poliéster. Em algumas fundas, as pegas são para guiar. Uma carga demasiado pesada nas pegas pode resultar na rutura da funda.

Produtos Solo

Os produtos Solo são artigos descartáveis, previstos apenas para utilização individual. Os produtos Solo não devem ser lavados; quando ficarem sujos ou o paciente já não os necessita devem ser eliminados.



Não lavar.



Não utilizar.

Se um produto Solo for lavado, aparece este símbolo que mostra que o produto não pode ser utilizado e deve ser eliminado.

Resumo das Instruções de Lavagem por tipo de Tecido

		Poliéster	Tela de poliéster	Poliéster em malha com padrão de ursinhos	Tela plastificada	Tecido revestido a plástico	Poliéster/Algodão RepoSheet	Poliéster/Algodão LiftSheet 1900	Tecido Solo	Poliamida HandySheet, HandyTube	Anel Extensor Bandas para Stretcher
Lavar a 60-80°C		X	X	X	X	X				X	
Lavar a 60-85°C		X ¹						X			X
Lavar a 85°C							X				
Não lavar em água									X		
Não usar agente de branqueamento de cloro		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Secar à máquina, temperaturas baixas, máx. 50°C		X	X	X				X		X	
Secar à máquina, temperaturas normais, máx. 70°C							X				X
Não secar à máquina					X	X			X		
Engomar, máx. 150°C							X ²	X ²			
Não engomar		X	X	X	X	X			X	X	X
Não usar amaciador		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Não lavar a seco		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pode ser limpo com álcool.					X	X					
Desinfecção térmica		X	X	X	X	X	X	X		X	X

¹ Prod. N.º. 3526111, 3526115, 3526116, 3526117

² Engomado ao interior do lençol (o lado sem bandas)



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Suécia
info@liko.se