



Cuidados a ter e manutenção das fundas Liko

Português
7PT160132-02
2010-06-02

Verifique regularmente as fundas, em especial após lavagem

Importante verificar:

- Fabrico
- Cintas
- Costuras
- Laços

Verificar cuidadosamente se existe desgaste ou danos.

Lavagem:

Siga as instruções de lavagem da funda.

Temperatura de lavagem: normalmente 60°-80°C (140°-176°F).


Não usar lixívia.

Máquina de Secar: por favor secar apenas em temperaturas baixas.

Limpeza a seco permitida.

As partes reforçadas e acolchoadas devem ser secas enroladas numa toalha para tirar o excesso de humidade.

No caso da funda Original HB, retirar as espátulas antes da lavagem.

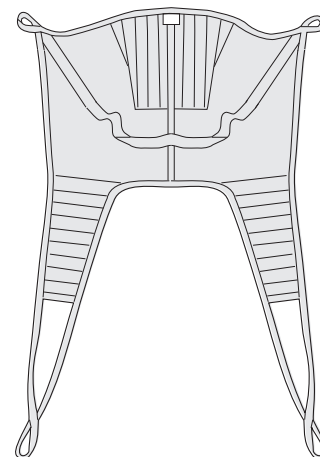

Conselhos:

As fundas devem ser consideradas como consumíveis de extrema importância para a segurança do paciente.

As fundas fabricadas em nylon e poliéster duram mais que as fabricadas em algodão.

Alguns dos suportes das fundas são para ajudar a mobilizar o paciente e não para o elevar.
Peso excessivo nos suportes pode danificar as costuras.

Por uma questão de segurança e higiene, as fundas devem ser de utilização uni-paciente.

Para mais informações contacte o seu representante Liko.



A **Hill-Rom** Company

www.liko.com

Fabricante:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se